

# ИМРАХ 6.5.1 Бърза справка: Спешна помощ

## Вписване ИМРАХ

1. Ако екранът за вписване не е изобразен, на десктопа кликнете двукратно върху краткия път до **клиент ИМРАХ**.

Или изберете **Старт > Всички програми > Agfa ИМРАХ > клиент ИМРАХ**.

2. Изберете различен клъстер или домейн.
3. На екрана за вписване на ИМРАХ напишете вашите **идентификационен номер на потребител** и **парола**.

Паролата различава главните и малките букви. Ако бутонът Caps Lock на вашата клавиатура е активиран, се появява предупредително съобщение, когато кликнете в полето Парола.

4. Кликнете върху **Вписване**.

## Намиране на пациенти с използване на Търсене

1. В областта на списъка кликнете върху лентата **Търсене**, за да я разширите.
2. В поле Фамилия, име напишете името на пациента.

Или в поле Идентификационен номер на пациента или Глобален идентификационен номер на пациент напишете **Идентификационен номер на пациента**.


3. От списъка Настоящо местоположение на пациента изберете **всяко**.
4. По избор изберете Дата за търсене.
5. Кликнете върху **Търсене**.

## Отваряне на изследвания от работен списък

1. За да отворите изследването само в областта на текста, кликнете с десния



бутон върху изследването и изберете **Отвори текст**.

или

За да отворите изображенията на изследването, кликнете с десния бутон върху изследването и изберете **Отвори изображения**. 

2. За да отворите съответните предишни изследвания с изследванията, кликнете върху **Съответствие**.

## Търсене на предходни доклади от списъка с изследвания

1. Изобразете областта на текста за пациента, който ви интересува.
2. Ако списъкът с изследвания е скрит в областта на текста, кликнете върху стрелката на разширяемата лента. 
3. Ако списъкът с изследвания е свит, кликнете върху лентата **Списък с изследвания**, за да го разширите.
4. Ако е необходимо, превключете към раздел **Радиология**.
5. За да прегледате доклад, свързан с предходно изследване, кликнете еднократно на произволно място в предходния ред.
6. За да затворите изображенията от изследването, но да оставите неговия текст в областта на текста, кликнете върху **Разглеждани изображения**. 

## Добавяне на коментари в свободен текст към изследването

1. Изобразете областта на текста за изследването, което ви интересува.

2. Придвигнете се до панел **Доклад**.
3. Ако не се вижда, превключете на раздел **Коментари към изследването**.
4. В текстовото поле напишете коментар.
5. За да направите коментара към изследването личен, кликнете върху **Направи личен**.
6. Кликнете върху **Запомети**.

## Въвеждане на избрани коментари към изследване въз основа на типа модалност

1. Изобразете областта на текста за изследването, което ви интересува.
2. Придвигнете се до панел **Докладвай**.
3. Ако не се вижда, превключете на раздел **Коментари към изследването**.
4. Кликнете върху **Избрани коментари към изследване**.
5. В диалоговия прозорец Избрани коментари към изследване, от списъка Избрани коментари към изследване за, изберете модалност (за да видите коментарите, налични за определена модалност) или изберете **Всички** (за да видите коментарите, налични за всички модалности).
6. Изберете коментара, който искате да въведете (използвайте клавиши **Shift** или **Ctrl** за избор на много избрани коментари).
7. Кликнете върху **OK**.

## Преглед на доклад

1. Изобразете областта на текста за пациента/изследването, които ви интересуват.

- В областта на текста, ако панел Доклад е свит, кликнете върху лентата **Доклад**, за да го разширите и разгледате доклада.
- За разглеждане на друг доклад за този пациент, кликнете върху диктувано изследване в списъка с изследванията.
- Също така разгледайте всички ключови изображения, свързани с доклада.
- Ако докладите идват от РИС на IMPAX, изберете разглеждане на съответния доклад.
- За уголемяване на ключовите изображения, наведете курсора на мишката над лявата страна на ключовото изображение, докато курсорът се превърне в двойна стрелка. Влчете ключовите изображения до желания размер.
- За да отворите ключово изображение в областта на изображението, кликнете върху него с десен бутон и изберете **Показване**.

### Оперативни клавиши на клавиатурата: област на списъка

За	Натиснете
Отваряне на База знания.	F1







### Оперативни клавиши на клавиатурата: област на изображението



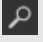

За	Натиснете
Навигация напред към следващата страница, изображение или раздел в изследването (в зависимост от състоянието на инструмент Преход по).	Страница напред*
Навигация назад към предходната страница, изображение или раздел	Страница назад*

За	Натиснете
в изследването (в зависимост от състоянието на инструмент Преход по).	
Навигация напред към следващия пациент в цикличния списък или отворено изследване на пациент.	Стрелка надясно
Навигация назад към предходния пациент в цикличния списък или отворено изследване на пациент.	Стрелка наляво
Навигация към първото изображение от серията.	Начална страница
Навигация напред към следващото изследване на настоящия пациент.	Стрелка нагоре
Навигация назад към предходното изследване на настоящия пациент.	Стрелка надолу
Навигация към последното изображение от серията.	Край
Връщане до първия кадър при навигация по лента на подшиване.	Начална страница
Увеличаване на изображението в рамките на инструмент Мащаб.	Страница напред*
Намаляване на изображението в рамките на инструмент Мащаб.	Страница назад*
Връщане към оригиналното увеличение в рамките на инструмент Мащаб.	Начална страница
Увеличаване увеличението на инструмент Лупа.	Страница напред**
Намаляване увеличението на инструмент Лупа.	Страница назад**
Връщане към нормалното увеличение на инструмент Лупа.	Начална страница
Отваряне на диалогов прозорец Персонализиране.	F12

За	Натиснете
Отваряне на IMPAX 6.5.1 Клиент База знания.	F1

### Обичайни инструменти за клинично разглеждане

Бутон	Име	Използване
	Cine Viewer	Възпроизвежда серия изображения в непрекъснат цикъл или кадър по кадър
	Селектор на съставните планове	Отпечатва едно или повече изображения от изследване върху филм или хартия в персонализиран изглед
	Лупа	Отваря отделен прозорец, който увеличава частта на изображението, намираща се отдолу
	Маркер "шублер"	Измерва разстоянието между две точки
	Закрепи/премахни изследвания	Застопорява изследване, което остава видимо по време на навигацията през другите изследвания на пациента
	Избери формат на екрана	Определя как изображенията, сериите изследванията ще бъдат подредени в колони и редици върху монитора на областта на изображението

Бутон	Име	Използване
	Виж целия доклад	Изобразява целия доклад в панела за доклад на областта на текста
	Регулиране на яркост/контраст	Променя яркостта и контраста на изображение чрез регулиране стойностите за център и ширина на прозореца и осигурява достъп до предварително зададените стойности на яркост/контраст
	Мащаб	Увеличава или удрява изображенията на стъпки
	Мащаб в цял екран	Увеличава едно изображение на цял екран