

IMPAX 6.5.1 Бърза справка: Ортопедия

Вписване IMPAX

1. Ако екранът за вписване не е изобразен, на десктопа кликнете двукратно върху краткия път до **клиент IMPAX**.

Или изберете **Старт > Всички програми > Agfa IMPAX > клиент IMPAX**.

2. Изберете различен клъстер или домейн.
3. На екрана за вписване на IMPAX напишете вашите **идентификационен номер на потребител** и **парола**.

Паролата различава главните и малките букви. Ако бутонът Caps Lock на вашата клавиатура е активиран, се появява предупредително съобщение, когато кликнете в полето Парола.

4. Кликнете върху **Вписване**.

Намиране на пациенти с използване на Търсене

1. В областта на списъка кликнете върху лентата **Търсене**, за да я разширите.
2. В поле Фамилия, име напишете името на пациента.

Или в поле Идентификационен номер на пациента или Глобален идентификационен номер на пациент напишете **Идентификационен номер на пациента**.


3. От списъка Настоящо местоположение на пациента изберете **всяко**.
4. По избор изберете Дата за търсене.
5. Кликнете върху **Търсене**.

Отваряне на изследвания от работен списък

1. За да отворите изследването само в областта на текста, кликнете с десния

бутон върху изследването и изберете **Отвори текст**.

или


За да отворите изображенията на изследването, кликнете с десния бутон върху изследването и изберете **Отвори изображения**. 

2. За да отворите съответните предишни изследвания с изследванията, кликнете върху **Съответствие**.


Отваряне на изображения в прозорец Ортопедично приложение

1. В областта на изображението използвайте инструмента **Избор на изображение**, за да изберете до 20 изображения за предоперационно планиране.
2. Навигирайте до първото изображение, което изисква предоперационно планиране.
3. От контекстната или горната лента с инструменти кликнете върху **Шаблон**. 
4. Кликнете върху изображение, което изисква предоперационно планиране.


Показване на предходни изследвания от списъка с изследвания

1. В областта на текста превключете към раздел **Радиология**.
2. За показване на изследване, което не е отворено в момента, кликнете еднократно върху **Отвори изображения**. 


Мащабиране и панорамиране на изображение

1. От горната лента с инструменти на областта на изображението, менюто на бутон Мащабирай, изберете **Мащабирай**. 
2. Кликнете върху изображението, за да го мащабирате.
3. Мащабирайте или панорамирайте изображението, както е необходимо.

Експортиране на задача за ортопедично планиране в IMPAX

1. В прозореца Ортопедично предоперационно планиране кликнете върху **Експортиране в PACS**. 

Разглеждане на информация за ортопедичен имплант


1. От контекстната или горната лента с инструменти на областта на изображението, кликнете върху **Информация за изображение**. 

Или, ако използвате текстовото меню на контекстната лента с инструменти (Ctrl + кликане с десен бутон), изберете **Информация > Информация за изображението**.

2. Кликнете върху изображението, съдържащо подробна информация за импланта.

Отпечатване на изображения с помощта на съставен план

1. В областта на изображението покажете всички изображения, които ще включите в печата на съставния план.


2. От контекстната или горната лента с инструменти кликнете върху **Селектор на съставните планове.** 
3. За да отпечатате имената на пациентите и инвентарните номера на всички страници, в диалоговия прозорец Селектор на съставните планове поставете отметка в полето **Покажи заглавията на текста.**
4. За да отпечатате номерата на страниците на всички страници, поставете отметка в полето **Включи номер на страницата.**
5. За да спестите тонер, когато печатате на хартия, поставете отметка в полето **Използвайте бял фон за печатане на хартия.**
6. От списъка Изглед изберете изгледа за печат, който ще използвате.
7. Ако печатате на принтер за филм DICOM, от списъка Принтер изберете принтера, който ще използвате.
8. Ако печатате на принтер за филм DICOM, от списъка Предварително зададени настройки изберете предварително зададената настройка за отпечатване, която ще използвате.
9. Навигирайте до изображението, което ще отпечатвате, поставете курсора върху него и го изтеглете в елемента за изображение на шаблона. Повторете за всички изображения, които ще включите в разпечатката.
10. За незабавно отпечатване кликнете върху **Печатай** (за принтер за филм) или върху **Печат на хартия.**
11. Ако печатате на принтер за хартия, от диалоговия прозорец Печат на Windows изберете опциите за печат и кликнете върху **OK.**

Оперативни клавиши на клавиатурата: област на списъка

За	Натиснете
Отваряне на База знания.	F1

Обичайни ортопедични инструменти

Бутон	Име	Използване
	Селектор на съставните планове	Отпечатва едно или повече изображения от изследване върху филм или хартия в персонализиран изглед
	Превъртане	Премества изследвания в работен списък автоматично в областта на изображението
	Информация за изображението	Изобразява демографски данни и данни за ортопедичния имплант и ви позволява да отпечатате информацията
	Избор на изображение	Избира изображения, които да се стартират в Ортопедичното приложение
	Закрепи/премахни изследвания	Застопорява изследване, което остава видимо по време на навигацията през другите изследвания на пациента
	Избери формат на екрана	Определя как изображенията, сериите изследванията ще бъдат подредени в колони и редици върху монитора на

Бутон	Име	Използване
	Шаблон	Отваря изображения в прозорец Ортопедично приложение
	Регулиране на яркост/контраст	Променя яркостта и контраста на изображение чрез регулиране стойностите за център и ширина на прозореца и осигурява достъп до предварително зададените стойности на яркост/контраст
	Мащаб	Увеличава или умалява изображенията на стъпки

Оперативни клавиши на клавиатурата: област на изображението

За	Натиснете
Навигация напред към следващата страница, изображение или раздел в изследването (в зависимост от състоянието на инструмент Преход по).	Страница назад*
Навигация назад към предходната страница, изображение или раздел в изследването (в зависимост от състоянието на инструмент Преход по).	Страница напред *
Навигация напред към следващия пациент в цикличния списък или отворено изследване на пациент.	Стрелка надясно

За	Натиснете
Навигация назад към предходния пациент в цикличния списък или отворено изследване на пациент.	Стрелка наляво
Навигация към първото изображение от серията.	Начална страница
Навигация напред към следващото изследване на настоящия пациент.	Стрелка нагоре
Навигация назад към предходното изследване на настоящия пациент.	Стрелка надолу
Навигация към последното изображение от серията.	Край
Връщане до първия кадър при навигация по лента на подшиване.	Начална страница
Увеличаване на изображението в рамките на инструмент Мащаб.	Страница напред *
Намаляване на изображението в рамките на инструмент Мащаб.	Страница назад*
Връщане към оригиналното увеличение в рамките на инструмент Мащаб.	Начална страница
Увеличаване увеличението на инструмент Лупа.	Страница напред **
Намаляване увеличението на инструмент Лупа.	Страница назад**
Връщане към нормалното увеличение на инструмент Лупа.	Начална страница
Отваряне на диалогов прозорец Персонализиране.	F12
Отваряне на IMPAX 6.5.1 Клиент База знания.	F1