

# IMPAX 6.5.1 Stručná příručka: Kliniky

## Přihlašování k IMPAX

1. Jestliže není na pracovní ploše zobrazena přihlašovací obrazovka, poklepejte na zástupce **IMPAX Client**.

Případně vyberte **Start > Všechny programy > Agfa IMPAX > IMPAX Client**.

2. Vyberte jiný klastr nebo doménu.
3. Na přihlašovací obrazovce systému IMPAX zadejte své **Uživatelské ID** a **Heslo**.

Při zadávání hesla je nutno rozlišovat mezi velkými a malými písmeny. Jestliže jste na klávesnici aktivovali klávesu Caps Lock, zobrazí se po klepnutí do pole Heslo varovné hlášení.


4. Klepněte na tlačítko **Přihlášení**.

## Hledání pacientů pomocí funkce Vyhledat

1. V oblasti seznamů klepnutím rozevřete panel **Vyhledat**.
2. Do pole Příjmení, Křestní jméno zadejte jméno pacienta.  
Nebo do pole Identifikace pacienta nebo Globální identifikace pacienta zadejte **ID pacienta**.
3. Ze seznamu Aktuální umístění pacienta vyberte **Jakékoli**.
4. Volitelně můžete zvolit hledání Do data.
5. Klepněte na **Hledat**.

## Otevírání studií z pracovního seznamu

1. Pro otevření studie pouze v textové oblasti klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte **Otevřít text**.  
nebo

Pro otevření snímků studie klepněte pravým tlačítkem myši na studii a vyberte **Otevřít snímky**. 

2. Chcete-li otevřít relevantní předchozí údaje se studiem, klepněte na **Relevance**.

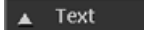
## Změna formátu obrazovky studie

1. V horním panelu nástrojů oblasti snímků klepněte na **Volba formátu obrazovky**.



2. V menu Formát obrazovky klepněte na tlačítko formátu, který chcete použít.


## Zobrazení textové oblasti


1. Na horním panelu oblasti snímků klepněte na **Text**. 

2. V textové oblasti klepněte na **Text**.



## Prohlížení předchozích popisů ze Seznamu studií



1. Zobrazte textovou oblast u požadovaného pacienta.
2. Jestliže je seznam studií v textové oblasti skrytý, klepněte na šipku rozvíracího panelu. 
3. Pokud je seznam studií stažený, klepnutím na **Seznam studií** jej rozevřete.
4. V případě potřeby přepněte na kartu **Radiologie**.
5. Pro zobrazení popisu souvisejícího s předchozím popisem klepněte kamkoli do řádku předchozího popisu.
6. Pro zavření snímků studie, avšak se současně zachovanou dostupností

souvisejícího textu v textové oblasti, klepněte na **Právě zobrazené snímky**. 

## Prohlížení popisu

1. Zobrazte textovou oblast u požadovaného pacienta/studie.
2. Pokud je v textové oblasti minimalizován panel Popis, pak jej klepnutím na tento panel **Popis** otevřete.
3. Pro zobrazení jiného popisu k tomuto pacientovi klikněte v seznamu studií na nadiktovanou studii.
4. Také si prohlédněte všechny klíčové snímky přiřazené k tomuto popisu.
5. Pokud popisy přicházejí z IMPAX RIS, vyberte příslušný popis, který chcete zobrazit.
6. Pokud chcete klíčový snímek zvětšit, přetáhněte myš na jeho levou stranu a zobrazte namísto ukazatele dvojitou šipku. Poté přetažením myši změňte klíčový snímek na požadovanou velikost.
7. Pro otevření klíčového snímku v oblasti snímku dvakrát klepněte a vyberte **Zobrazit**.

## Zobrazení klíčových snímků v textové oblasti

1. Pokud není v textové oblasti plně zobrazen popis, rozbalte jej klepnutím na panel **Popis**.
2. Je-li oblast klíčových snímků sbalená, rozbalte ji klepnutím na rozbalovací šipku  nebo klepněte na **Klíčové snímky**. 
3. Chcete-li klíčový snímek zvětšit, přetáhněte roztažitelný panel do požadované velikosti.
4. Pro otevření studie obsahující klíčový snímek v oblasti snímku klepněte dvakrát na tento

klíčový snímek nebo klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte **Zobrazit**.

## Klávesové zkratky: oblast seznamů






Pro	Stiskněte
Otevření znalostní databáze.	F1

## Klávesové zkratky: oblast snímků

Pro	Stiskněte
Přechod na následující stránku, snímek nebo kartu ve studii (v závislosti na stavu nástroje krokování).	O stránku dolů (Page Down) *
Přechod zpět na předchozí stránku, snímek nebo kartu ve studii (v závislosti na stavu nástroje krokování).	O stránku nahoru (Page Up) *
Přechod na následujícího pacienta v seznamu cyklů nebo otevřenou studii pacienta.	Šipka doprava
Přechod na předchozího pacienta v seznamu cyklů nebo otevřenou studii pacienta.	Šipka doleva
Přechod na první snímek série.	Domů (Home)
Přechod na následující studii aktuálního pacienta.	Šipka nahoru
Přechod zpět na předchozí studii aktuálního pacienta.	Šipka dolů
Přechod na poslední snímek série.	Konec (End)
Návrat na první snímek při navigaci v náhledech řezů.	Domů (Home)
Zvětšení snímku pomocí nástroje Zoom.	O stránku nahoru (Page Up) *

Pro	Stiskněte
Zmenšení snímku pomocí nástroje Zoom.	O stránku dolů (Page Down) *
Návrat k původní velikosti pomocí nástroje Zoom.	Domů (Home)
Další zvětšení pomocí nástroje Lupa.	O stránku nahoru (Page Up) **
Další zmenšení pomocí nástroje Lupa.	O stránku dolů (Page Down) **
Návrat k původnímu zvětšení nástroje Lupa.	Domů (Home)
Otevření dialogového okna Vlastní Znalostní databáze	F12
Otevření IMPAX 6.5.1 Klient	F1

## Nejčastěji používané nástroje pro klinické zobrazování

Tlačítko	Název	Použití
	Kine prohlížeč	Přehraje sérii snímků v nepřetržité smyčce nebo po jednotlivých snímcích
	Výběr kompozitního uspořádání	Vytiskne jeden nebo více snímků studie ve vlastním rozvržení na film nebo papír
	Lupa	Otevře samostatné okno, ve kterém se zobrazí zvětšená část snímku pod ním
	Označit měřítkem	Změří vzdálenost mezi dvěma body
	Přišpendlit/Zrušit přišpendlení studie	Přišpendlí studii na místě a ponechává ji viditelnou při procházení ostatními studiemi pacienta

Tlačítko	Název	Použití
	Volba formátu obrazovky	Definuje, jak budou snímky, série studie uspořádány ve sloupcích a řádkách na monitoru pro oblast snímků
	Zobrazit celý popis	Zobrazí celý popis v panelu Popis v textové oblasti
	Window / Level	Změní jas a kontrast snímku úpravou hodnot středu a šířky okna a umožní přístup k přednastaveným hodnotám window a level
	Zoom	Postupně zvětšuje nebo zmenšuje snímky
	Zoom na celou obrazovku	Zvětší jediný obrázek na celou obrazovku