

Přihlašování k IMPAX

1. Jestliže není na pracovní ploše zobrazena přihlašovací obrazovka, poklepejte na zástupce **IMPAX Client**.

Případně vyberte **Start > Všechny programy > Agfa IMPAX > IMPAX Client**.

2. Vyberte jiný klastr nebo doménu.
3. Na přihlašovací obrazovce systému IMPAX zadejte své **Uživatelské ID** a **Heslo**.

Při zadávání hesla je nutno rozlišovat mezi velkými a malými písmeny. Jestliže jste na klávesnici aktivovali klávesu Caps Lock, zobrazí se po klepnutí do pole Heslo varovné hlášení.

4. Klepněte na tlačítko **Přihlášení**.


Hledání pacientů pomocí funkce Vyhledat

1. V oblasti seznamů klepnutím rozevřete panel **Vyhledat**.
2. Do pole Příjmení, Křestní jméno zadejte jméno pacienta.
Nebo do pole Identifikace pacienta nebo Globální identifikace pacienta zadejte **ID pacienta**.
3. Ze seznamu Aktuální umístění pacienta vyberte **Jakékoli**.
4. Volitelně můžete zvolit hledání Do data.
5. Klepněte na **Hledat**.

Otevírání studií z pracovního seznamu

1. Pro otevření studie pouze v textové oblasti klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte **Otevřít text**.

nebo

Pro otevření snímků studie klepněte pravým tlačítkem myši na studii a vyberte **Otevřít snímky**. 

2. Chcete-li otevřít relevantní předchozí údaje se studiemi, klepněte na **Relevance**.


Změna formátu obrazovky studie

1. V horním panelu nástrojů oblasti snímků klepněte na **Volba formátu obrazovky**.




2. V menu Formát obrazovky klepněte na tlačítko formátu, který chcete použít.


Měření vzdálenosti mezi body

1. V horním panelu nástrojů v oblasti snímků vyberte v menu Označování možnost **Označit měřidlem**. 
2. Klepněte na počáteční bod měření.
3. Klepněte na koncový bod.
4. Pro přesun textu měření přetáhněte středový ovládací bod do nové polohy.
5. Pro změnu měření přetáhněte jeden z ovládacích bodů do nové polohy.
6. Pro nastavení měření klepněte pravým tlačítkem .
7. Chcete-li měření smazat, stiskněte klávesu **Delete**.

Zobrazování předchozích studií ze seznamu studií

1. V textové oblasti přepněte na kartu **Radiologie**.
2. Pro zobrazení studie, která není momentálně otevřená, klepněte na **Otevřít snímky**. 

Zobrazení popisu studie

1. Zobrazte textovou oblast u požadované studie.
2. Pokud je v textové oblasti minimalizován panel Studie, pak jej klepnutím na tento panel **Studie** otevřete.
3. Pro rozevření panelu Studie přetáhněte roztažitelnou lištu doleva nebo lištu Studie poněkud výše.
4. Pro získání informací o lékaři nebo asistentovi uvedeném v panelu Studie klepněte na **Kontakt**. 

Prohlížení popisu

1. Zobrazte textovou oblast u požadovaného pacienta/studie.
2. Pokud je v textové oblasti minimalizován panel Popis, pak jej klepnutím na tento panel **Popis** otevřete.
3. Pro zobrazení jiného popisu k tomuto pacientovi klikněte v seznamu studií na nadiktovanou studii.
4. Také si prohlédněte všechny klíčové snímky přiřazené k tomuto popisu.
5. Pokud popisy přicházejí z IMPAX RIS, vyberte příslušný popis, který chcete zobrazit.
6. Pokud chcete klíčový snímek zvětšit, přetáhněte myš na jeho levou stranu a zobrazte namísto ukazatele dvojitou šipku.

Poté přetažením myši změňte klíčový snímek na požadovanou velikost.

- Pro otevření klíčového snímku v oblasti snímku dvakrát klepněte a vyberte **Zobrazit**.

Klávesové zkratky: oblast seznamů






Pro	Stiskněte
Otevření znalostní databáze.	F1




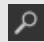

Klávesové zkratky: oblast snímků

Pro	Stiskněte
Přechod na následující stránku, snímek nebo kartu ve studii (v závislosti na stavu nástroje krokování).	O stránku dolů (Page Down) *
Přechod zpět na předchozí stránku, snímek nebo kartu ve studii (v závislosti na stavu nástroje krokování).	O stránku nahoru (Page Up) *
Přechod na následujícího pacienta v seznamu cyklů nebo otevřenou studii pacienta.	Šipka doprava
Přechod na předchozího pacienta v seznamu cyklů nebo otevřenou studii pacienta.	Šipka doleva
Přechod na první snímek série.	Domů (Home)
Přechod na následující studii aktuálního pacienta.	Šipka nahoru
Přechod zpět na předchozí studii aktuálního pacienta.	Šipka dolů
Přechod na poslední snímek série.	Konec (End)
Návrat na první snímek při navigaci v náhledech řezů.	Domů (Home)

Pro	Stiskněte
Zvětšení snímku pomocí nástroje Zoom.	O stránku nahoru (Page Up) *
Zmenšení snímku pomocí nástroje Zoom.	O stránku dolů (Page Down) *
Návrat k původní velikosti pomocí nástroje Zoom.	Domů (Home)
Další zvětšení pomocí nástroje Lupa.	O stránku nahoru (Page Up) **
Další zmenšení pomocí nástroje Lupa.	O stránku dolů (Page Down) **
Návrat k původnímu zvětšení nástroje Lupa.	Domů (Home)
Otevření dialogového okna Vlastní	F12
Otevření IMPAX 6.5.1 Klient Znalostní databáze	F1

Nejčastěji používané nástroje pro klinické zobrazování

Tlačítko	Název	Použití
	Kine prohrázeč	Přehraje sérii snímků v nepřetržité smyčce nebo po jednotlivých snímcích
	Výběr kompozitního uspořádání	Vytiskne jeden nebo více snímků studie ve vlastním rozvržení na film nebo papír
	Lupa	Otevře samostatné okno, ve kterém se zobrazí zvětšená část snímku pod ním
	Označit měřítkem	Změří vzdálenost mezi dvěma body
	Přišpendlit/Zrušit	Přišpendlí studii na místě a ponechává ji viditelnou při studii

Tlačítko	Název	Použití
		procházení ostatními studii pacienta
	Volba formátu obrazovky	Definuje, jak budou snímky, série studie uspořádány ve sloupcích a řádkách na monitoru pro oblast snímků
	Zobrazit celý popis	Zobrazí celý popis v panelu Popis v textové oblasti
	Window / Level	Změní jas a kontrast snímku úpravou hodnot středu a šířky okna a umožní přístup k přednastaveným hodnotám window a level
	Zoom	Postupně zvětšuje nebo zmenšuje snímky
	Zoom na celou obrazovku	Zvětší jediný obrázek na celou obrazovku