

Hledání studií pomocí funkce Vyhledat

1. V oblasti seznamů klepnutím rozevřete panel **Vyhledat**.
2. Chcete-li zobrazit další pole kritérií vyhledávání, klepněte pravým tlačítkem a zobrazte dialogové okno Konfigurace.
3. Pro zúžení výběru napište nebo vyberte volby vyhledávání.
4. Volitelně také můžete připojit tyto výsledky k předchozím výsledkům vyhledávání. V takovém případě zaškrtněte políčko **Přidat výsledky k poslednímu vyhledávání**.
5. V případě potřeby vyberte jiné místo pro vyhledávání.
6. Klikněte na **Hledat**.

Hledání pacientů pomocí funkce Vyhledat

1. V oblasti seznamů klepnutím rozevřete panel **Vyhledat**.
2. Do pole Příjmení, Křestní jméno zadejte jméno pacienta.
Nebo do pole Identifikace pacienta nebo Globální identifikace pacienta zadejte **ID pacienta**.
3. Ze seznamu Aktuální umístění pacienta vyberte **Jakékoli**.
4. Volitelně můžete zvolit hledání Do data.
5. Klepněte na **Hledat**.

Výběr dat od-do při vyhledávání

1. Ze seznamu možností dat vyberte volbu **V posledních** nebo **Starší než**.
2. V dialogovém okně Vyhledat napište nebo vyberte číslo.

3. Klepněte na tlačítko jednotek a přepínejte mezi **Hodiny, Dny, Týdny, Měsíce** nebo **Roky**.
4. Klepněte na **OK**.

Hledání studií podle specifického data

1. V panelu Vyhledat nebo Rozšířené hledání vyberte ze seznamu možností dat volbu **Jakékoli datum, Dnes** nebo **Včera** nebo
Vyberte **Přesná shoda**. V dialogovém okně Vyhledat pak klikněte na šipku. V kalendáři přejděte na požadované datum a klikněte na něj. Klikněte na **OK**.


Hledání v časovém rozmezí

1. V seznamu možností dat vyberte položku **Mezi**.
2. V dialogovém okně Vyhledat vyberte v seznamu volbu **Od** a v kalendáři klepněte na požadované datum.
3. V kalendáři pak ze seznamu **Do** vyberte požadované datum a klepněte na něj.
4. Klikněte na **OK**.

Přidání výsledků vyhledávání k předchozímu hledání

1. Chcete-li výběr zúžit, napište nebo vyberte volby vyhledávání.
2. Klepněte na **Hledat**.
3. Změňte volby vyhledávání podle svých potřeb.
4. V oblasti Hledání zaškrtněte políčko **Přidat výsledky k poslednímu vyhledávání**.
5. Znovu klepněte na **Hledat**.

Konfigurace vyhledávání

1. Ve výsledcích vyhledávání klepněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce.
2. Klepnutím pravým tlačítkem na záhlaví sloupce zobrazte paletu Vlastní.
3. V případě potřeby přidejte nebo odstraňte sloupce.
4. V případě potřeby změňte pořadí sloupců.
5. Chcete-li deaktivovat automatické nastavení šířky sloupců, zrušte zaškrtnutí políčka **Automaticky změnit velikost**.
6. Po dokončení zavřete dialogové okno Vlastní.


Tipy pro vyhledávání

- V zadaných hodnotách pro vyhledávání můžete použít případně také zástupný znak * (hvězdičku), čímž v případě pochyb zvýšíte šanci, že nalezené výsledky budou správné. Příklad: zadáte-li do pole Identifikace pacienta 4*3, zobrazí se všichni pacienti, jejichž identifikace začíná číslicí 4 a obsahuje také číslici 3. Zástupný znak může být na začátku nebo uprostřed řetězce. Vyhledávání automaticky vkládá na konec v kritériích vyhledávání hvězdičku.
- Váš správce systému nastaví maximální počet zobrazovaných studií. Pokud je počet nalezených studií (což je indikováno na panelu Vyhledávání) větší než toto stanovené číslo, omezte nejprve výběr a poté spusťte vyhledávání znovu.
- Vyhledávání bez jakýchkoli omezení není povoleno. Jestliže zvolíte u Data studie **jakékoli** datum, pak musíte také vybrat další specifická kritéria hledání.

- Pokud však přesto požadujete komplexnější vyhledávání, obraťte se na svého správce PACS, aby vám umožnil přístup k funkci Rozšířené hledání.
- V rámci zařízení je možné odeslat ruční dotaz klepnutím levým tlačítkem na odkaz **Vyhledat další studie** v seznamu Studie.

Volby vyhledávání

Kritérium	Popis
Číslo vyšetření	Napište číslo vyšetření studie, která je spojena s tímto pacientem.
Část těla	Vyberte část těla, které se studie týká, nebo zvolte jakákoliv .
Komentář obsahuje	Napište jakoukoli část komentáře ke studii. V dialogovém okně Konfigurace je tato volba označena jako Komentáře ke studii.
Aktuální umístění pacienta	Napište nebo vyberte aktuální umístění pacienta nebo prostřednictvím volby Upravit... otevřete dialogové okno Upravit oblíbené položky pro vyhledávání. Ze seznamu vyberte aktuální umístění pacienta a klepněte na OK .
Oddělení	Napište nebo vyberte oddělení, kde byla studie provedena nebo výběrem ... (elipsa) otevřete dialogové okno Zvolit oblíbené položky hledání. V seznamu vyberte oddělení a klepněte na OK .
Popis obsahuje	Napište jakoukoli část popisu studie. V dialogovém okně Konfigurace je tato volba označena jako Popis studie.
Globální identifikace pacienta	Zadejte úplnou globální identifikaci pacienta nebo její část. Pacient může mít několik identifikací pacienta v různých informačních systémech v nemocnici. Globální identifikace pacienta tyto různé identifikace spojuje do jednoho identifikátoru, který se u pacienta nemění a je určen vždy pouze pro jednoho pacienta.
Organizace	Vyberte název organizace, kde byla studie provedena nebo výběrem ... (elipsa) otevřete dialogové okno Oblíbené. V seznamu vyberte organizaci a klepněte na OK .

Kritérium	Popis
Název klíčového snímku	V seznamu zadejte nebo vyberte Název dokumentu klíčového snímku, pod kterým jsou klíčové snímky organizovány.
Klíčová slova	Vyberte ze seznamu nebo napište klíčové slovo, které bylo přiřazeno ke studii.
Modalita	Vyberte typ modality, kterou chcete prohledat nebo vyberte Jakákoli . U klastrové konfigurace systému IMPAX, kde IMPAX Data Center slouží jako centrální archiv, nepoužívejte modalitu jako volbu vyhledávání.
Operátor	Napište celé nebo část jména operátora, který provedl studii.
Jiné identifikace pacienta	Napište celou nebo část alternativní identifikace pacienta.
Věk pacienta	Vyberte věk pacienta v okamžiku, kdy byla studie pořízena. Do dialogového okna Kritéria zadejte parametry a klepněte na OK . Klepněte na tlačítko jednotek a přepínejte mezi hodnotami Hodiny, Dny, Týdny, Měsíce nebo Roky. V dialogovém okně Konfigurace je tato volba označena jako Věk pacienta při pořízení.
Datum narození pacienta	Napište datum nebo vyberte z kalendáře datum od-do, případně zvolte Jakékoli datum . Text zvýrazněný červenou barvou označuje, že je formát data neplatný. Jestliže zvolíte Jakékoli datum, pak musíte také vybrat další kritéria hledání. Vyhledávání bez jakýchkoli omezení není povoleno.
Historie pacienta obsahuje	Zadejte veškeré informace o historii pacienta nebo jen jejich část. V dialogovém okně Konfigurace je tato volba označena jako Doplnková historie pacienta.
Identifikace pacienta	Zadejte identifikaci pacienta.
Příjmení, křestní jméno pacienta	Napište celé nebo část jména pacienta. V dialogovém okně Konfigurace je tato volba označena jako Jméno pacienta.
Pohlaví pacienta	Jakékoli, Muž, Žena, Jiné

Kritérium	Popis
Vyšetřující lékař	Napište nebo vyberte celé nebo část jména vyšetřujícího lékaře nebo výběrem ... (elipsa) otevřete dialogové okno Zvolit oblíbené položky hledání. V seznamu vyberte vyšetřujícího lékaře a klepněte na OK .
Kód procedury obsahuje	Napište celý nebo část textu požadované procedury. V dialogovém okně Konfigurace je tato volba označena jako Požadovaná procedura.
Radiolog	Napište nebo vyberte celé nebo část jména radiologa, který studii nadiktoval nebo výběrem ... otevřete dialogové okno Zvolit oblíbené položky hledání. V seznamu vyberte radiologa a klepněte na OK .
Ošetřující lékař	Napište nebo vyberte celé nebo část jména ošetřujícího lékaře nebo výběrem ... otevřete dialogové okno Zvolit oblíbené položky hledání. V seznamu vyberte ošetřujícího lékaře a klepněte na OK .
Žádající lékař	Napište nebo vyberte celé nebo část jména žádajícího lékaře nebo výběrem ... (elipsa) otevřete dialogové okno Zvolit oblíbené položky hledání. V seznamu vyberte žádajícího lékaře a klepněte na OK .
Žádající služba	Napište celý nebo část názvu oddělení, které si vyžádalo studii.
Odbornost	Vyberte ze seznamu odbornost - např. Hlava, Hruď, Tělo, Neuro apod. U klastrové konfigurace systému IMPAX, kde IMPAX Data Center slouží jako centrální archiv, nepoužívejte specializaci jako volbu vyhledávání.
Stav	Vyberte stav studie: <ul style="list-style-type: none"> • jakákoli • nová • diktování praktikanta započalo • diktováno praktikanterem • diktování zahájeno • diktovaná • popsaná

Kritérium	Popis
	<ul style="list-style-type: none"> • schválená <p>U klastrové konfigurace systému IMPAX, kde IMPAX Data Center slouží jako centrální archiv, nepoužívejte Stav jako volbu vyhledávání.</p>
Datum studie	<p>Vyberte datum od-do nebo zvolte jakékoli datum. Jestliže zvolíte jakékoli datum, pak musíte také vybrat další specifická kritéria hledání. Vyhledávání bez jakýchkoli omezení není povoleno.</p> <p>Vyhledávací kritérium jakékoliv není mezi dvěma přihlášeními stejného uživatele do systému uchováváno, neboť při využití této volby může systém najít potenciálně příliš mnoho výsledků. Zvolíte-li jakékoli datum, pak se při příštím přihlášení do systému zobrazí v Datu studie výchozí hodnota.</p>
Číslo návštěvy obsahuje	<p>Napište celý počet nebo část počtu návštěv oddělení, podle kterého se vyhledá studie na základě počtu návštěv pacienta na oddělení, a to včetně návštěvy související s aktuální studií.</p> <p>V dialogovém okně Konfigurace je tato volba označena jako Počet návštěv oddělení.</p>