

IMPAX 6.5.1 Kvikreference: Skadestue

Logge på IMPAX

1. Hvis login-skærmen ikke vises, så dobbeltklik på genvejen **IMPAX Client** på skrivebordet.

Eller vælg **Start > Alle programmer > Agfa IMPAX > IMPAX Client**.

2. Vælg en anden gruppe eller et andet domæne.
3. På IMPAX loginskærmen indtaster man **Bruger-ID** og **Password**.

Password skelner mellem store og små bogstaver. Hvis Caps Lock er aktiveret på tastaturet, vises der en advarselmeddelelse, når man klikker på feltet Password.

4. Klik på **Log på**.

Finde patienter med Søg

1. Klik på linjen **Søg** i listeområdet for at udvide den.
2. Indtast patientens navn i felterne Efternavn of Fornavn.

Eller indtast **patientens ID** i feltet Patient-ID eller Global patient-ID.

3. Vælg **Enhver** fra listen Aktuel patientplacering.
4. Valgfrit kan man vælge en dato at søge på.
5. Klik på **Søg**.

Åbne undersøgelser fra en arbejdsliste


1. For kun at åbne undersøgelsen i tekstområdet højreklik på undersøgelsen og vælg **Åbn tekst**.
eller

For at åbne undersøgelsens billeder højreklik på undersøgelsen og vælg **Åbn billeder**.



2. For at åbne relevante fortilfælde sammen med undersøgelser klik på **Relevans**.

Søgning efter tidligere beskrivelser fra undersøgelseslisten

1. Vis tekstområdet for den pågældende patient.
2. Hvis undersøgelseslisten er skjult i tekstområdet, klikkes der på pilen, så linjen udvides. 
3. Hvis undersøgelseslisten er minimeret, klikkes der på linjen **Undersøgelsesliste**, så den udvides.
4. Skift om nødvendigt til fanen **Radiologi**.
5. For at vise en beskrivelse, der hører til et fortilfælde, klik hvor som helst i rækken med fortilfælde.
6. For at lukke undersøgelsens billeder, men lade den tilhørende tekst være tilgængelig i tekstområdet, klik på **Billeder der vises**.



Tilføjelse af fritekst-undersøgelseskommentarer

1. Vis tekstområdet for den pågældende undersøgelse.
2. Rul til panelet **Beskrivelse**.
3. Skift til fanen **Undersøgelseskommentarer** hvis den ikke allerede er synlig.
4. Indtast en kommentar i tekstboksen.
5. Klik på **Gør privat** for at gøre undersøgelseskommentaren privat.

6. Klik på **Gem**.

Indsætte foretrukne undersøgelseskommentarer baseret på modalitetstype

1. Vis tekstområdet for den pågældende undersøgelse.
2. Rul til panelet **Beskrivelse**.
3. Skift til fanen **Kommentar til studie** hvis den ikke allerede er synlig.
4. Klik på **Foretrukne undersøgelseskommentarer**.
5. I dialogen Foretrukne undersøgelseskommentarer, fra Foretrukne undersøgelseskommentarer for liste, vælger man en modalitet (for at se de kommentarer, der er disponible for en bestemt modalitet) eller **Alle** (for at se de kommentarer, der er disponible for alle modaliteter).
6. Vælg den kommentar, der skal indsættes (brug tasterne **Shift** eller **Ctrl** til at vælge flere foretrukne kommentarer).
7. Klik på **OK**.

Visning af en beskrivelse

1. Vis tekstområdet for den pågældende patient/undersøgelse.
2. Hvis panelet Beskrivelse er minimeret i tekstområdet, klik på linjen **Beskrivelse** for at udvide det og få vist beskrivelsen.
3. For at vise en anden beskrivelse for denne patient klikkes der på en dikteret undersøgelse på undersøgelseslisten.
4. Desuden kan man vise nøglebilleder, der hører sammen med beskrivelsen.

- Hvis beskrivelser kommer fra IMPAX RIS, skal den relevante beskrivelsesvisning vælges.
- For at gøre nøglebilleder større placeres cursoren over nøglebilledets venstre side, indtil den skifter form til en dobbelt pil. Træk nøglebillederne til den størrelse, der er brug for.
- For at åbne nøglebilledet i billedområdet højreklikkes der på det og vælges **Vis**.

Tastaturgenveje: Listeområde





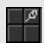
For at	Tryk på
Åbne vidensbasen.	F1

Tastaturgenveje: Billedområde

For at	Tryk på
Navigere frem til næste side, billede eller fane i undersøgelsen (afhængigt af tilstanden af værktøjet Gå frem efter).	Page Down *
Navigere tilbage til forrige side, billede eller fane i undersøgelsen (afhængigt af tilstanden af værktøjet Gå frem efter).	Page Up *
Navigere frem til næste patient på cykluslisten eller næste åbne patientundersøgelse.	Pil til højre
Navigere tilbage til forrige patient på cykluslisten eller forrige åbne patientundersøgelse.	Pil til venstre
Navigere til seriens første billede.	Hjem
Navigere frem til næste undersøgelse af den aktuelle patient.	Pil op
Navigere tilbage til forrige undersøgelse af den aktuelle patient.	Pil ned
Navigere til seriens sidste billede.	Slut

For at	Tryk på
Gå tilbage til første ramme ved navigering efter scout-snit.	Hjem
Forstørre billedet med værktøjet Zoom.	Page Up *
Formindske billedet med værktøjet Zoom.	Page Down *
Gå tilbage til den oprindelige forstørrelse med værktøjet Zoom.	Hjem
Forøge forstørrelsen med værktøjet Forstørrelsesglas.	Page Up **
Formindske forstørrelsen med værktøjet Forstørrelsesglas.	Page Down **
Gå tilbage til den oprindelige forstørrelse med værktøjet Forstørrelsesglas.	Hjem
Åbne dialogen Tilpas.	F12
Åbne IMPAX 6.5.1 Klient Vidensbase.	F1

Almindelige værktøjer til klinisk gennemsyn

Knap	Navn	Brug
	Cine-viser	Afspiller seriebilleder i en kontinuerlig sløjfe eller ramme for ramme
	Sammensat layout-vælger	Udskriver ét eller flere undersøgelsesbilleder på film eller papir i et brugerdefineret layout
	Forstørrelsesglas	Åbner et separat vindue, som forstørrer afsnittet af billedet under værktøjet
	Måling	Måler afstanden mellem to punkter
	Lås undersøgelsen/Lås undersøgelsen op	Låser en undersøgelse på plads og holder den synlig, mens der navigeres

Knap	Navn	Brug
		gennem andre undersøgelser til den patient
	Vælg skærmformat	Definerer hvordan billeder, serier og undersøgelser arrangeres i spalter og rækker på en billedområdeskærm
	Vis hele rapporten	Viser hele beskrivelsen i tekstområdet beskrivelsespanel
	Wdow/level	Ændrer billedets lyshed og kontrast ved at justere værdier for vinduets midte og bredde og giver adgang til forudindstillede værdier for window/level
	Zoom	Forstørrer eller formindsker billeder i trin
	Zoom til fuld skærm	Forstørrer et enkelt billede til hel skærmstørrelse