

IMPAX 6.5.1 Kvikreference: Ortopædi

Logge på IMPAX

1. Hvis login-skærmen ikke vises, så dobbeltklik på genvejen **IMPAX Client** på skrivebordet.

Eller vælg **Start > Alle programmer > Agfa IMPAX > IMPAX Client**.

2. Vælg en anden gruppe eller et andet domæne.
3. På IMPAX loginskærmen indtaster man **Bruger-ID** og **Password**.

Password skelner mellem store og små bogstaver. Hvis Caps Lock er aktiveret på tastaturet, vises der en advarselmeddelelse, når man klikker på feltet Password.

4. Klik på **Log på**.

Finde patienter med Søg

1. Klik på linjen **Søg** i listeområdet for at udvide den.
2. Indtast patientens navn i felterne Efternavn of Fornavn.

Eller indtast **patientens ID** i feltet Patient-ID eller Global patient-ID.

3. Vælg **Enhver** fra listen Aktuel patientplacering.
4. Valgfrit kan man vælge en dato at søge på.
5. Klik på **Søg**.

Åbne undersøgelser fra en arbejdsliste


1. For kun at åbne undersøgelsen i tekstområdet højreklik på undersøgelsen og vælg **Åbn tekst**.
eller

For at åbne undersøgelsens billeder højreklik på undersøgelsen og vælg **Åbn billeder**.




2. For at åbne relevante fortilfælde sammen med undersøgelser klik på **Relevans**.


Åbning af billeder i vinduet for det ortopædiske program

1. I billedområdet brug værktøjet **Billedvalg** til at vælge op til 20 billeder for prækirurgisk planlægning.
2. Navigér til det første billede, der kræver prækirurgisk planlægning.
3. Klik på **Skabelon** fra kontekstværktøjslinjen eller den øverste værktøjslinje. 
4. Klik på et billede, der kræver prækirurgisk planlægning.

Visning af tidligere undersøgelser fra undersøgelseslisten

1. Skift til fanen **Radiologi** i tekstområdet.
2. For at vise en undersøgelse, som ikke er åben i øjeblikket, klikkes der én gang på **Åbn billeder**. 

Zoome og panorere på et billede


1. Vælg **Zoom** fra billedområdets øverste værktøjslinje. 
2. Klik på det billede, der skal zoomes.
3. Zoom eller panorér på billedet efter behov.

Eksport af ortopædisk planlægningsarbejde til IMPAX

1. I vinduet for ortopædisk prækirurgisk planlægning klik på **Eksportér til PACS**.




Gennemgang af oplysninger om ortopædiske implantater

1. Fra billedområdets kontekstværktøjslinje eller øverste værktøjslinje klikkes der på **Billedinformation**. 

Eller, hvis man bruger kontekstværktøjslinjens tekstmenu (Ctrl + højreklik), vælg **Information > Billedinformation**.

2. Klik på et billede, som indeholder detaljer om implantater.

Udskrivning af billeder ved hjælp af et sammensat layout






1. I billedområdet vis alle billeder, der skal inkluderes i den sammensatte layoutudskift.
2. Klik på **Sammensat layout-vælger** fra kontekstværktøjslinjen eller den øverste værktøjslinje. 
3. For at udskrive patientnavne og accessionsnumre på alle sider, sæt kryds i feltet **Vis tekstoverskrifter** i dialogen Sammensat layout-vælger.
4. For at udskrive sidetal på alle sider, sættes der kryds i feltet **Inkluder sidetal**.
5. For at spare toner ved papirudskrivning vælges afkrydsningsfeltet **Brug hvid baggrund til papirudskrift**.
6. Fra listen Layout vælges det udskriftslayout, der skal bruges.
7. Hvis man udskriver på en DICOM-filmprinter, vælges den printer, der skal bruges, fra listen Printer.
8. Hvis man udskriver på en DICOM-filmprinter, vælger man fra listen Forudindstilling den udskrivningsforudindstilling, der skal bruges.





9. Navigér til et billede, der skal udskrives, placér cursoren over det og træk det ind i et billedelement i skabelonen. Gentag for alle billeder, der skal inkluderes i udskriften.
10. For at udskrive straks, klik på **Udskriv** (for en filmprinter) eller **Papirudskrift**.
11. Hvis der udskrives på en papirprinter, så vælg udskrivningsoptioner fra Windows dialogen Udskriv og klik på **OK**.

Tastaturgenveje: Listeområde

For at	Tryk på
Åbne vidensbasen.	F1

Almindelige ortopædiske værktøjer

Knap	Navn	Brug
	Sammensat layout-vælger	Udskriver et eller flere undersøgelsesbilleder på film eller papir i et brugerdefineret layout
	Cyklus	Flytter undersøgelser på en arbejdsliste automatisk ind i billedområdet
	Billedinformation	Viser demografiske detaljer og detaljer om ortopædiske implantater og giver mulighed for at udskrive oplysningerne
	Billedvalg	Vælger billeder, som skal startes i det ortopædiske program
	Lås	Låser en undersøgelse på plads og holder den synlig, mens der navigeres gennem andre undersøgelser til den patient

Knap	Navn	Brug
	Vælg skærmformat	Definerer hvordan billeder, serierog undersøgelser arrangeres i spalter og rækker på en billedområdeskærm
	Skabelon	Åbner billeder i det ortopædiske programvindue
	Window/level	Ændrer billedets lyshed og kontrast ved at justere værdier for vinduets midte og bredde og giver adgang til forudindstillede værdier for Window/level
	Zoom	Forstørrer eller formindsker billeder i trin

Tastaturgenveje: Billedområde

For at	Tryk på
Navigere frem til næste side, billede eller fane i undersøgelsen (afhængigt af tilstanden af værktøjet Gå frem efter).	Page Down *
Navigere tilbage til forrige side, billede eller fane i undersøgelsen (afhængigt af tilstanden af værktøjet Gå frem efter).	Page Up *
Navigere frem til næste patient på cykluslisten eller næste åbne patientundersøgelse.	Pil til højre
Navigere tilbage til forrige patient på cykluslisten eller forrige åbne patientundersøgelse.	Pil til venstre
Navigere til seriens første billede.	Hjem
Navigere frem til næste undersøgelse af den aktuelle patient.	Pil op

For at	Tryk på
Navigere tilbage til forrige undersøgelse af den aktuelle patient.	Pil ned
Navigere til seriens sidste billede.	Slut
Gå tilbage til første ramme ved navigering efter scout-snit.	Hjem
Forstørre billedet med værktøjet Zoom.	Page Up *
Formindske billedet med værktøjet Zoom.	Page Down *
Gå tilbage til den oprindelige forstørrelse med værktøjet Zoom.	Hjem
Forøge forstørrelsen med værktøjet Forstørrelsesglas.	Page Up **
Formindske forstørrelsen med værktøjet Forstørrelsesglas.	Page Down **
Gå tilbage til den oprindelige forstørrelse med værktøjet Forstørrelsesglas.	Hjem
Åbne dialogen Tilpas.	F12
Åbne IMPAX 6.5.1 Klient Vidensbase.	F1