

# IMPAX 6.5.1 Kvikreference: Radiologer

## Logge på IMPAX

1. Hvis login-skærmen ikke vises, så dobbeltklik på genvejen **IMPAX Client** på skrivebordet.

Eller vælg **Start > Alle programmer > Agfa IMPAX > IMPAX Client.**

2. Vælg en anden gruppe eller et andet domæne.
3. På IMPAX loginskærmen indtaster man **Bruger-ID** og **Password**.



Password skelner mellem store og små bogstaver. Hvis Caps Lock er aktiveret på tastaturet, vises der en advarselmeddelelse, når man klikker på feltet Password.


4. Klik på **Log på**.

## Tilføjelse af arbejdslistor til listeområdet


1. Klik på **Arbejdslistor** i listeområdet.
2. I spalten Aktiv ved siden af arbejdslisten sætter man kryds i feltet for hver arbejdsliste, der skal vises.
3. Tryk på **Enter** eller klik på **OK**.

## Flytte undersøgelser på en arbejdsliste

1. For at flytte alle eller grupper af undersøgelser på en arbejdsliste klik på **Auto cyklus** på arbejdslistelinjen. 
2. For at flytte prioritetsgrupperede undersøgelser på en arbejdsliste højreklik på **Autocyklus**  på arbejdslistelinjen og fjern afkrydsningsmærket ved siden af hver prioritetsgrupperingsregel, som der ikke skal flyttes undersøgelser for. Klik på **Autocyklus**.

3. For at flytte bestemte undersøgelser vælg dem og højreklik på **Tilføj til cyklusliste** eller **Cyklus**.
4. For at flytte flere arbejdslistor klik på **Autocyklus** på hver arbejdslistelinje. 

## Visning af wavelet-billeder

1. Klik på menuen Bruger-ID fra liste- eller konfigurationsområdets menu. 
2. Kontrollér, at **Vis webbilleder** er valgt.


## Synkronisering af tekstområdet med billedområdet

1. Klik på undersøgelsens dato/tid eller accessionsnummer i billedområdets informationspanel for undersøgelser, som ligger over den øverste værktøjslinje.

## Tilføjelse af nøglebilleder til en beskrivelse

1. Højreklik på et billede i billedområdet, indtil en kontekstmenu vises.
2. Vælg **Tilføj til nøglebilleder** fra kontekstmenuen.



## Visning af en undersøgelse der blev set på for nylig

1. Klik på **Historik** via navigationslinjen i billedområdet. 
2. Vælg navnet på den patient, hvis undersøgelser skal vises igen.



## Sætter en patients undersøgelser til side

1. Klik på **Tilsidesæt** ved siden af cyklusstyringen nederst til venstre i billedområdet. 



## Manuel sammenknytning af serier

1. Fra billedområdets kontekstværktøjslinje eller øverste værktøjslinje højreklikkes der på Link serier. 
2. I menuen Sammenknytningspræference vælges afkrydsningsfeltet **Manuel sammenknytning**.
3. Synkroniser alle serier, der skal knyttes sammen, ved at rulle gennem billederne, indtil de svarer til samme anatomiske region.
4. For at knytte serier sammen manuelt venstreklippes der på **Link serier**, og de ønskede serier vælges.
5. Bemærk, at teksten ændres ("Aktive serier for sammenknytning" for de fremhævede serier og "Klik for at ophæve sammenknytning" for en sammenknyttet serie), og at et sammenknytningsikon vises i øverste venstre hjørne for at angive, at serierne er blevet knyttet sammen.
6. For at anvende ændringer af Window/level på alle sammenknyttede serier, aktivér indstilling af Window/level på tværs af sammenknyttede serier.
7. For at anvende zoom og panorering på alle sammenknyttede serier aktivér zoom og panorering på tværs af sammenknyttede serier.
8. For at deaktivere tilstanden for redigering af sammenknytninger og vende tilbage til normal navigering klikkes der på **Link serier**. 


## Justering af auto-sammenknytninger for patientbevægelse

1. Fra billedområdet kontekstværktøjslinje eller øverste værktøjslinje klik på **Link serier**. 
2. Venstreklik på det billede fra serien, der skal justeres.
3. Navigér til den placering i serien, der svarer til den aktuelle placering af den anden serie i undersøgelsen.
4. Venstreklik på billedet for at knytte serierne sammen igen.
5. For at ændre sammenknytningen sæt kryds i feltet **Ja - knyt sammen ved den nye position**.
6. Klik på **Link serier**, når du er færdig med at justere sammenknytninger. 

## Tilføjelse af serie med en anden referenceramme til en auto-sammenknytningsgruppe

1. Fra billedområdet kontekstværktøjslinje eller øverste værktøjslinje venstreklikkes der på **Link serier**. 
2. Venstreklik på den serie, der skal tilføjes til auto-sammenknytningsgruppen.
3. For at angive, at du er færdig med at ændre sammenknytninger og klar til at vende tilbage til normal navigering, venstreklik på **Link serier**. 

## Indstilling af Window/level ved hjælp af forudindstillede værdier

1. Højreklik på knapmenuen **Window/level** fra billedområdet øverste værktøjslinje og vælg den forudindstillede værdi, der skal anvendes. 
2. Hvis du bruger et skærmformat, som viser mere end én serie eller undersøgelse, klikkes

der på et billede fra den serie, forudindstillingen skal anvendes på.

## Tastaturgenveje: Listeområde

For at	Tryk på
Åbne vidensbasen.	F1

## Tastaturgenveje: Tekstområde

For at	Tryk på
Kopiere en lærefil eller -mappe.	Ctrl + C
Klippe en lærefil eller -mappe.	Ctrl + X
Sætte en lærefil eller -mappe ind.	Ctrl + V
Omdøbe en lærefil eller -mappe.	F2







## Tastaturgenveje: Billedområde

For at	Tryk på
Navigere frem til næste side, billede eller fane i undersøgelsen (afhængigt af tilstanden af værktøjet Gå frem efter).	Page Down *
Navigere tilbage til forrige side, billede eller fane i undersøgelsen (afhængigt af tilstanden af værktøjet Gå frem efter).	Page Up *
Navigere frem til næste patient på cykluslisten eller næste åbne patientundersøgelse.	Pil til højre
Navigere tilbage til forrige patient på cykluslisten eller forrige åbne patientundersøgelse.	Pil til venstre
Navigere til seriens første billede.	Hjem
Navigere frem til næste undersøgelse af den aktuelle patient.	Pil op
Navigere tilbage til forrige undersøgelse af den aktuelle patient.	Pil ned

For at	Tryk på
Navigere til seriens sidste billede.	Slut
Gå tilbage til første ramme ved navigering efter scout-snit.	Hjem
Forstørre billedet med værktøjet Zoom.	Page Up *
Formindske billedet med værktøjet Zoom.	Page Down *
Gå tilbage til den oprindelige forstørrelse med værktøjet Zoom.	Hjem
Forøge forstørrelsen med værktøjet Forstørrelsesglas.	Page Up **
Formindske forstørrelsen med værktøjet Forstørrelsesglas.	Page Down **
Gå tilbage til den oprindelige forstørrelse med værktøjet Forstørrelsesglas.	Hjem
Åbne dialogen Tilpas.	F12
Åbne IMPAX 6.5.1 Klient Vidensbase.	F1

## Almindelige radiologiværktøjer

Knap	Navn	Brug
	Cine-viser	Afspiller seriebilleder i en kontinuerlig sløjfe eller ramme for ramme
	Cyklus	Flytter undersøgelser på en arbejdsliste automatisk ind i billedområdet
	Diktér	Starter diktering for en enkelt undersøgelse
	Diktér - flere undersøgelser	Starter diktering for to eller flere undersøgelser
	Invertér	Bytter om på de hvide og sorte områder i et billede

Knap	Navn	Brug
	Markeringskommentar	Tilføjer friform-markeringsstekst til et billede
	Tegn pil	Placerer en markeringspil, der peger på interesseområder
	Måling	Måler afstanden mellem to punkter
	Enhedsvisning	Åbner en serie i vinduet Enhedsvisning for MIP-, MPR- og (hvis licens findes) 3D-analyse
	Window/level	Ændrer billedets lyshed og kontrast ved at justere værdier for vinduets midte og bredde og giver adgang til forudindstillede værdier for Window/level
	Zoom	Forstørrer eller formindsker billeder i trin