

# IMPAX 6.5.1 Kurzanleitung: Intensivstation

## Anmelden bei IMPAX

1. Wenn der Anmeldebildschirm nicht angezeigt wird, doppelklicken Sie auf dem Desktop auf die Verknüpfung **IMPAX Client**.

Oder wählen Sie **Start > Alle Programme > Agfa IMPAX > IMPAX Client**.

2. Wählen Sie ein anderes Cluster oder eine andere Domäne.
3. Geben Sie auf dem Anmeldebildschirm von IMPAX Ihre **Benutzerkennung** und Ihr **Kennwort** ein.


Beim Kennwort ist die Groß- und Kleinschreibung zu beachten. Bei aktivierter Feststelltaste auf der Tastatur wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn Sie in das Kennwortfeld klicken.

4. Klicken Sie auf **Anmelden**.


## Auffinden von Patienten mithilfe der Suchfunktion

1. Klicken Sie im Listenbereich auf die Leiste **Suchen**, um diese zu erweitern.
2. Geben Sie im Feld 'Nachname, Vorname' den Namen des Patienten ein,  
oder geben Sie im Feld 'Patientenkennung' oder 'Globale Patientenkennung' die **Kennung des Patienten** ein.
3. Wählen Sie den aktuellen Patientenort aus der Liste aus und klicken Sie auf **Beliebig**.
4. Wählen Sie optional ein Datum, nach dem gesucht werden soll.
5. Klicken Sie auf **Suchen**.


## Öffnen von Studien aus einer Arbeitsliste

1. Um die Studie nur im Textbereich zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Studie und wählen **Text öffnen**,  
oder,  
um die Bilder der Studie zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Studie und wählen **Bilder öffnen**. 
2. Um relevante frühere Untersuchungen zusammen mit Studien zu öffnen, klicken Sie auf **Relevanz**.

## Ändern des Bildschirmformats für Studien


1. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste des Bildbereichs auf **Bildschirm-Layout auswählen**. 
2. Klicken Sie im Bildschirmformat-Menü auf die Schaltfläche des anzuwendenden Formats.

## Messen des Abstands zwischen Punkten


1. Wählen Sie aus der oberen Symbolleiste des Bildbereichs im Schaltflächenmenü 'Zeichen' **Zeichen 'Messlineal'**. 
2. Klicken Sie auf den Anfangspunkt des zu messenden Bereichs.
3. Klicken Sie auf den Endpunkt.
4. Um den Messwerttext zu verschieben, ziehen Sie den Steuerpunkt in der Mitte an eine neue Position.
5. Zum Ändern der Messung ziehen Sie einen der Endsteuerpunkte an eine neue Position.

6. Um die Messung festzulegen, klicken Sie mit der rechten Maustaste.
7. Um die Messung zu löschen, drücken Sie die Taste **Entf**.

## Anzeigen früherer Studien aus der Studienliste

1. Wechseln Sie im Textbereich zur Registerkarte **Radiologie**.
2. Um eine Studie anzuzeigen, die aktuell nicht geöffnet ist, klicken Sie einmal auf **Bilder öffnen**. 

## Anzeigen der Studienbeschreibung

1. Blenden Sie den Textbereich für die betreffende Studie ein.
2. Wenn das Studienfeld minimiert ist, klicken Sie im Textbereich auf die **Studienleiste**, um es zu erweitern.
3. Um das Studienfeld zu erweitern, ziehen Sie die erweiterbare Leiste nach links oder die Studienleiste weiter nach oben.
4. Um Kontaktdaten zu einem im Studienfeld aufgelisteten Arzt oder Techniker zu erhalten, klicken Sie auf **Kontakt**. 

## Anzeigen eines Befunds

1. Blenden Sie den Textbereich für den betreffenden Patienten bzw. die betreffende Studie ein.
2. Wenn das Befundfeld im Textbereich minimiert ist, klicken Sie auf die Leiste **Befund**, um es zu erweitern und sich den Befund anzusehen.
3. Um einen anderen Befund für diesen Patienten anzuzeigen, klicken Sie auf eine diktierte Studie in der Studienliste.

4. Betrachten Sie auch alle zu diesem Befund dazugehörigen wichtigen Bilder.
5. Wenn Befunde vom IMPAX RIS kommen, wählen Sie die entsprechende Befundansicht aus:
6. Um ein Befundbild zu vergrößern, halten Sie den Mauszeiger über die linke Seite des Befundbildes, bis sich der Zeiger in einen Doppelpfeil ändert. Ziehen Sie die Befundbilder auf die gewünschte Größe.
7. Um das Befundbild im Bildbereich zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen **Anzeigen**.

### Tastaturkürzel: Listenbereich



Ziel	Drücken Sie
Öffnen der Wissensdatenbank	F1







### Tastaturkürzel: Bildbereich



Ziel	Drücken Sie
Vorwärts zur/m nächsten Seite, Bild oder Tabulator in der Studie (je nach Status des Werkzeugs 'Fortschreiten per ...')	Bild-Ab *
Zurück zur/m vorherigen Seite, Bild oder Tabulator in der Studie (je nach Status des Werkzeugs 'Fortschreiten per ...')	Bild-Auf *
Vorwärts zum nächsten Patienten in der Zyklusliste oder zur nächsten offenen Patientenstudie.	Pfeil nach rechts
Zurück zum vorherigen Patienten in der Zyklusliste oder zur vorherigen offenen Patientenstudie.	Pfeil nach links
Zum ersten Bild der Serie	Pos 1
Vorwärts zur nächsten Studie für den aktuellen Patienten.	Pfeil nach oben

Ziel	Drücken Sie
Zurück zur vorherigen Studie für den aktuellen Patienten.	Pfeil nach unten
Zum letzten Bild der Serie navigieren	Ende
Zurück zum ersten Einzelbild beim Navigieren durch Referenzliniensichten.	Pos 1
Vergrößern des Bildes im Bereich des Werkzeugs 'Zoomen'.	Bild-Auf *
Verkleinern des Bildes im Bereich des Werkzeugs 'Zoomen'.	Bild-Ab *
Zurück zur ursprünglichen Vergrößerung im Bereich des Werkzeugs 'Zoomen'.	Pos 1
Erhöhen der Vergrößerung des Werkzeugs 'Lupe'.	Bild-Auf **
Verringern der Vergrößerung des Werkzeugs 'Lupe'.	Bild-Ab **
Zurück zur ursprünglichen Vergrößerung des Werkzeugs 'Lupe'.	Pos 1
Öffnen des Dialogs 'Anpassen'.	F12
Öffnen der IMPAX 6.5.1 Client umgehend in Text umgewandelt- Wissensdatenbank.	F1

### Gängige Werkzeuge für die klinische Überprüfung

Schaltfläche	Name	Verwenden
	Cine-Viewer	Gibt Serienbilder in einer fortlaufenden Schleife oder per Einzelbildwiedergabe wieder.
	Auswahl zusammengesetztes Layout	Druckt eine oder mehrere Studien in einem benutzerdefinierten

Schaltfläche	Name	Verwenden
		Layout auf Film oder Papier aus.
	Lupe	Öffnet ein separates Fenster, das den Abschnitt des Bildes darunter vergrößert.
	Zeichen 'Messlineal'	Misst den Abstand zwischen zwei Punkten.
	Studien anhängen/abhängen	Verankert eine Studie an Ort und Stelle und hält sie während der Navigation durch andere Studien für den Patienten sichtbar.
	Bildschirmformat auswählen	Legt fest, wie Bilder, Serien und Studien auf einem Bildbereichsmonitor in Spalten und Zeilen angeordnet werden.
	Gesamten Bericht anzeigen	Zeigt den gesamten Bericht im Berichtsfenster des Textbereiches an.
	Kontrast/Helligkeit	Ändert die Helligkeit und den Kontrast von Bildern über die Einstellung der Werte für Fenstermitte und -breite und ermöglicht den Zugriff auf

Schaltfläche	Name	Verwenden
		voreingestellte Helligkeits- und Kontrastwerte.
	Zoomen	Vergrößert oder verkleinert Bilder schrittweise.
	Auf gesamten Bildschirm vergrößern	Vergrößert ein einzelnes Bild auf die volle Bildschirmgröße.