

IMPAX 6.5.1 Consulta rápida: Los médicos de clínica

Inicio de sesión en IMPAX

1. Si no se muestra la pantalla de inicio de sesión, en el Escritorio haga doble clic en el acceso directo a **IMPAX Client**.

O bien, seleccione **Inicio > Todos los programas > Agfa IMPAX > IMPAX Client**.

2. Seleccione un clúster o un dominio distintos.
3. En la pantalla de inicio de sesión de IMPAX, escriba su **identificador de usuario** y su **contraseña**.

En la contraseña se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si está activado el bloqueo de mayúsculas en el teclado, aparece un mensaje de advertencia al hacer clic en el campo Contraseña.

4. Haga clic en **Inicio de sesión**.

Localización de pacientes mediante la función de búsqueda

1. En el Área de lista, haga clic en la barra de **búsqueda** para expandirla.
2. En el campo Apellidos del paciente, nombre del paciente, escriba el nombre del paciente en ese orden.

O bien, en el campo Identificador del paciente o Número de Historia global del paciente, escriba el **identificador del paciente**.

3. En la lista Ubicación del paciente actual, seleccione **cualquiera**.
4. Tiene la opción de elegir una fecha como criterio de búsqueda.
5. Haga clic en **Buscar**.

Apertura de estudios desde una lista de trabajo


1. Para abrir el estudio en el Área de texto únicamente, haga clic con el botón secundario del ratón en el estudio y seleccione **Abrir texto**.

O bien,

para abrir las imágenes del estudio, haga clic con el botón secundario en el estudio y seleccione **Abrir imágenes**. 


2. Para que se abran antecedentes relevantes con los estudios, haga clic en **Relevancia**.

Cambio del formato de pantalla para los estudios

1. En la barra de herramientas superior del Área de imagen, haga clic en **Seleccionar formato de pantalla**. 
2. En el menú Formato de pantalla, haga clic en el botón correspondiente al formato que se desea aplicar.

Visualización del Área de texto

1. En la barra de herramientas superior del Área de imagen, haga clic en **Texto**.

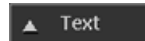



2. En el Área de texto, haga clic en **Texto**.



Exploración de informes de antecedentes de la lista de estudios

1. Visualice el Área de texto del paciente que le interesa.



2. Si la Lista de estudios está oculta en el Área de texto, haga clic en la flecha de la barra expandible. 
3. Si la Lista de estudios está contraída, haga clic en la barra **Lista de estudios** para expandirla.
4. En caso necesario, cambie a la ficha **Radiología**.
5. Para ver un informe relacionado con un estudio antecedente, haga clic en cualquier parte de la fila del antecedente.
6. Para cerrar las imágenes del estudio, pero dejar disponible el texto asociado a esas imágenes en el Área de texto, haga clic en **Se están viendo las imágenes**. 

Visualización de un informe

1. Visualice el Área de texto del paciente o estudio que le interesa.
2. En el Área de texto, si el panel Informe está contraído, haga clic en la barra de **Informe** para expandirlo y ver el informe.
3. Si desea ver otro informe asociado a este paciente, haga clic en un estudio dictado en la Lista de estudios.
4. Del mismo modo puede ver las imágenes clave asociadas al informe.
5. Si los informes provienen del sistema RIS de IMPAX, seleccione la vista de informe apropiada.
6. Para ampliar el tamaño de una imagen clave, desplace el puntero sobre la parte izquierda de la imagen clave hasta que el puntero cambie a una doble flecha. Arrastre las imágenes clave hasta que tengan el tamaño deseado.

- Para abrir la imagen clave en el Área de imagen, haga clic con el botón secundario y seleccione **Visualizar**.

Visualización de imágenes clave en el Área de texto

- En el Área de texto, si el informe está contraído, haga clic en la barra **Informe** para que se muestre.
- Si el área Imágenes clave está contraída, haga clic en la flecha expandible de la barra  o haga clic en **Imágenes clave**. 
- Para agrandar una imagen clave, arrastre la barra expandible de Imágenes clave según el tamaño deseado.
- Para abrir el estudio que contiene la imagen clave en el Área de imagen, haga doble clic en la imagen clave o haga clic con el botón secundario en la imagen y seleccione **Visualizar**.

Métodos abreviados de teclado: Área de lista









Para	Pulse
Abrir la Base de conocimientos.	F1



Métodos abreviados de teclado: Área de imagen

Para	Pulse
Avanzar a la siguiente página, imagen o pestaña del estudio (en función del estado de la herramienta Avanzar por).	Avance de página *
Retroceder a la anterior página, imagen o pestaña en el estudio (en función del estado de la herramienta Avanzar por).	Retroceso de página *
Avanzar al siguiente paciente de la lista de ciclo o estudio abierto de un paciente.	Flecha a la derecha

Para	Pulse
Retroceder al anterior paciente de la lista de ciclo o estudio abierto de un paciente.	Flecha a la izquierda
Desplazarse a la primera imagen de la serie.	Inicio
Avanzar al siguiente estudio del paciente actual.	Flecha arriba
Retroceder al anterior estudio del paciente actual.	Flecha abajo
Desplazarse a la última imagen de la serie.	Fin
Volver al primer fotograma cuando se realiza el desplazamiento por los cortes de reconocimiento.	Inicio
Aumentar la imagen en la herramienta de ampliación (zoom).	Retroceso de página *
Reducir la imagen en la herramienta de ampliación (zoom).	Avance de página *
Volver al ajuste de aumento original en la herramienta de ampliación (zoom).	Inicio
Incrementar el ajuste de aumento de la herramienta Lupa.	Retroceso de página **
Reducir el ajuste de aumento de la herramienta Lupa.	Avance de página **
Volver al ajuste de aumento original de la herramienta Lupa.	Inicio
Abrir el cuadro de diálogo Personalizar.	F12
Abrir la base de conocimientos de IMPAX 6.5.1 Client	F1

Herramientas habituales de revisión clínica

Botón	Nombre	Uso
	Visor de cine	Se reproducen imágenes de series en un bucle continuo o fotograma a fotograma
	Selector de diseño compuesto	Se imprime una o varias imágenes de estudio en película o papel con un diseño personalizado
	Lupa	Se abre una ventana independiente en la que se amplía la sección de la imagen situada debajo
	Calibrador de marcas	Mide la distancia entre dos puntos
	Fijar o liberar posición de estudios	Se fija la posición de un estudio y se mantiene visible durante el desplazamiento por otros estudios del paciente
	Seleccionar formato de pantalla	Se define cómo se disponen las imágenes, las series y los estudios en columnas y filas en un monitor de Área de imagen
	Ver informe completo	Muestra todo el informe en el panel de informes del Área de texto
	Ventana/Nivel (contraste y luminosidad)	Cambia la luminosidad y el contraste de la imagen ajustando los valores de "centro" y "anchura" de la "ventana" cromática y se proporciona acceso a los valores predefinidos de ajuste

Botón	Nombre	Uso
		de ventana/nivel (contraste y luminosidad)
	Ampliación	Aumenta o reduce las imágenes en incrementos
	Ampliar a pantalla completa	Aumenta una imagen individual para que ocupe toda la pantalla