

IMPAX 6.5.1 Consulta rápida: Radiólogos

Inicio de sesión en IMPAX

1. Si no se muestra la pantalla de inicio de sesión, en el Escritorio haga doble clic en el acceso directo a **IMPAX Client**.

O bien, seleccione **Inicio > Todos los programas > Agfa IMPAX > IMPAX Client**.

2. Seleccione un clúster o un dominio distintos.
3. En la pantalla de inicio de sesión de IMPAX, escriba su **identificador de usuario** y su **contraseña**.


En la contraseña se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si está activado el bloqueo de mayúsculas en el teclado, aparece un mensaje de advertencia al hacer clic en el campo Contraseña.


4. Haga clic en **Inicio de sesión**.

Añadición de listas de trabajo al Área de lista

1. En el Área de lista, haga clic en **Listas de trabajo**.
2. En la columna activa que hay junto a la lista de trabajo, active la casilla de verificación de cada lista de trabajo que desea que se muestre.
3. Pulse **Intro** o haga clic en **Aceptar**.


Recorrido de estudios en una lista de trabajo

1. Para recorrer grupos de estudios o todos los estudios de una lista de trabajo, haga clic en **Ciclo automático** en la barra de la lista de trabajo. 
2. Para recorrer estudios agrupados por prioridades, en la lista de trabajo haga clic con el botón secundario del ratón en **Ciclo**

automático  y deje sin marcar la casilla de verificación que hay junto a cada regla de agrupación de prioridades que desee omitir en el recorrido cíclico de los estudios. Haga clic en **Ciclo automático**.

3. Para recorrer estudios específicos, selecciónelos y haga clic con el botón secundario del ratón en **Agregar a la lista de ciclo** o en **Ciclo**.
4. Para recorrer varias listas de trabajo, en cada barra de lista de trabajo haga clic en **Ciclo automático**. 

Visualización de imágenes wavelet

1. En el menú desplegable de Área de lista o Configurar, haga clic en el menú ID de usuario. 
2. Asegúrese de que está activada la casilla **Mostrar imágenes web**.


Sincronización del Área de texto con el Área de imagen

1. En el panel de información de estudios del Área de imagen, encima de la barra de herramientas superior, haga clic en la fecha y hora del estudio o en el número de registro.


Añadición de imágenes clave a un informe

1. En el Área de imagen, haga clic con el botón secundario en una imagen hasta que aparezca un menú contextual.
2. En el menú contextual, seleccione **Añadir a imágenes clave**.


Visualización de un estudio visto recientemente


1. En el Área de imagen, sitúese en la barra de navegación, haga clic en **Historial**. 
2. Seleccione el nombre del paciente cuyos estudios desea volver a visualizar.

Reserva de estudios de un paciente



1. Junto a la barra de control de ciclo situada en la parte inferior izquierda del Área de imagen, haga clic en **Reservar**. 

Vinculación manual de series


1. En la barra de herramientas contextual o la barra de herramientas superior del Área de imagen, haga clic con el botón secundario del ratón en Vincular series. 
2. En el menú Preferencia de vínculos, active la casilla **Vínculo manual**.
3. Sincronice las series que desea vincular; para ello, desplácese por las imágenes hasta que correspondan con la misma región anatómica.
4. Para vincular series manualmente, haga clic con el botón principal en **Vincular series** y seleccione la serie necesaria.
5. Observe que el texto cambia ("Serie activa para la vinculación" para la serie resaltada y "Haga clic para desvincular" para una serie vinculada) y aparece un icono de vinculación en la esquina superior izquierda para indicar que se ha vinculado la serie.
6. Para que se apliquen los cambios de contraste y luminosidad a todas las series vinculadas, habilite el ajuste de contraste y luminosidad en las series vinculadas.

- Para que se apliquen los ajustes de zoom y desplazamiento panorámico a todas las series vinculadas, habilite el ajuste de zoom y desplazamiento panorámico en las series vinculadas.
- Para desactivar el modo de edición de vinculaciones y volver a la navegación normal, haga clic en **Vincular series.** 


Ajuste de vínculos automáticos para el movimiento del paciente

- En la barra de herramientas contextual o superior del Área de imagen, haga clic en **Vincular series.** 
- Haga clic en la imagen de la serie que desea ajustar.
- Desplácese hasta la ubicación de la serie que corresponda a la ubicación actual de la otra serie del estudio.
- Haga clic de nuevo en la imagen para volver a vincular las series.
- Para realizar el cambio en la vinculación, active la casilla **Sí - vínculo en la posición actual.**
- Para indicar que ha terminado de ajustar vínculos, haga clic en **Vincular series.** 

Adición a un grupo de vinculación automática de una serie con un fotograma de referencia distinto

- En la barra de herramientas contextual o superior del Área de imagen, haga clic en **Vincular series.** 
- Haga clic en la serie que desee añadir al grupo de vinculación automática.
- Para indicar que ha terminado de modificar vínculos y volver a modo de desplazamiento normal, haga clic en **Vincular series.** 

Configuración de ventana/nivel mediante valores predefinidos

- En la barra de herramientas superior del Área de imagen, haga clic con el botón secundario en el menú de botones **Ventana/Nivel (contraste y luminosidad)** y seleccione el valor predefinido que desea aplicar. 
- Si se utiliza un formato de pantalla con el que se muestra más de una serie o estudio, haga clic en una imagen de la serie para aplicarle el valor predefinido.

Métodos abreviados de teclado: Área de lista

Para	Pulse
Abrir la Base de conocimientos.	F1

Métodos abreviados de teclado: Área de texto

Para	Pulse
Copiar un archivo o una carpeta para docencia.	Ctrl + C
Cortar un archivo o una carpeta para docencia.	Ctrl + X
Pegar un archivo o una carpeta para docencia.	Ctrl + V
Cambiar el nombre de un archivo o una carpeta para docencia.	F2


Métodos abreviados de teclado: Área de imagen

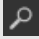
Para	Pulse
Avanzar a la siguiente página, imagen o pestaña del estudio (en función del estado de la herramienta Avanzar por).	Avance de página *

Para	Pulse
Retroceder a la anterior página, imagen o pestaña en el estudio (en función del estado de la herramienta Avanzar por).	Retroceso de página *
Avanzar al siguiente paciente de la lista de ciclo o estudio abierto de un paciente.	Flecha a la derecha
Retroceder al anterior paciente de la lista de ciclo o estudio abierto de un paciente.	Flecha a la izquierda
Desplazarse a la primera imagen de la serie.	Inicio
Avanzar al siguiente estudio del paciente actual.	Flecha arriba
Retroceder al anterior estudio del paciente actual.	Flecha abajo
Desplazarse a la última imagen de la serie.	Fin
Volver al primer fotograma cuando se realiza el desplazamiento por los cortes de reconocimiento.	Inicio
Aumentar la imagen en la herramienta de ampliación (zoom).	Retroceso de página *
Reducir la imagen en la herramienta de ampliación (zoom).	Avance de página *
Volver al ajuste de aumento original en la herramienta de ampliación (zoom).	Inicio
Incrementar el ajuste de aumento de la herramienta Lupa.	Retroceso de página **
Reducir el ajuste de aumento de la herramienta Lupa.	Avance de página **
Volver al ajuste de aumento original de la herramienta Lupa.	Inicio
Abrir el cuadro de diálogo Personalizar.	F12

Para	Pulse
Abrir la base de conocimientos de IMPAX 6.5.1 Client	F1

Herramientas habituales de radiología

Botón	Nombre	Uso
	Visor de cine	Se reproducen imágenes de series en un bucle continuo o fotograma a fotograma
	Ciclo	Se mueven estudios de una lista de trabajo al Área de imagen automáticamente
	Dictar	Se inicia el dictado para un solo estudio
	Dictar - Varios estudios	Se inicia el dictado para dos o más estudios
	Invertir	Se intercambian las áreas de blanco y negro de una imagen
	Marcar anotación	Se agrega a una imagen una marca con texto en formato libre
	Marca de flecha	Se coloca una marca de flecha para señalar áreas de interés
	Calibrador de marcas	Mide la distancia entre dos puntos
	Volume Viewing	Se inicia una serie en la ventana de Volume Viewing para análisis de MIP, MPR y (si se dispone de licencia) tridimensionales
	Ventana/Nivel (contraste y luminosidad)	Se cambia el brillo y el contraste de la imagen ajustando los valores de

Botón	Nombre	Uso
		"centro" y "anchura" de la "ventana" cromática y se proporciona acceso a los valores predefinidos de ajuste de ventana/nivel (contraste y luminosidad)
	Ampliación (zoom)	Aumenta o reduce las imágenes en incrementos