

IMPAX 6.5.1 Pikaopas: Teho-osasto

Kirjautuminen sisään - IMPAX

1. Ellei sisäänkirjautumisen kuvaruutu tule näkyviin, kaksoisnapsauta työpöydällä **IMPAX-asiakas** -pikanäppäintä.

Tai valitse **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Agfa IMPAX > IMPAX-asiakas**.

2. Valitse eri ryhmä tai alue.
3. Kirjoita IMPAX -ohjelman sisäänkirjautumisruutuun **käyttäjätunnus** ja **salasana**.

Salasana on isot ja pienet kirjaimet erotteleva. Jos näppäimistön aakkosluikko on päällä, ilmestyy varoitusviesti, kun salasana kenttää napsautetaan.


4. Napsauta **Kirjaudu sisään**.

Potilaiden löytäminen käyttämällä Hakua

1. Laajenna luetteloalueella **Etsi**-palkkia napsauttamalla sitä.
2. Syötä Suku-, etunimi -kenttään potilaan nimi
tai syötä Potilastunnus- tai Yleinen potilastunnus -kenttään **potilaan tunnus**.
3. Valitse Tämän hetkinen potilaan sijainti -luettelosta **mikä tahansa**.
4. Vaihtoehtoisesti valitse haettava päivämäärä.
5. Napsauta **Etsi**.


Tutkimusten avaaminen työlistalta

1. Tutkimus avataan pelkästään tekstialueelle napsauttamalla sitä oikealla hiiripainikkeella ja valitsemalla **Avaa teksti** tai


tutkimuksen kuvat avataan napsauttamalla tutkimusta oikealla hiiripainikkeella ja valitsemalla **Avaa kuvat**. 

2. Merkityksellisiä aiempia avataan tutkimusten kanssa napsauttamalla **Oleellinen**.

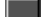
Tutkimuskuvaruudun muodon muuttaminen

1. Napsauta kuva-alueen ylätyökälpalkista **Valitse näytön muoto**. 
2. Napsauta kuvaruudun muotovalikosta sovellettavaa muotoa vastaavaa painiketta.


Pisteiden välisen etäisyyden mittaaminen

1. Valitse kuva-alueen ylätyökälpalkin merkintäpainikevalikosta **Merkkausharppi**. 
2. Napsauta mitattavan alueen alkupistettä.
3. Napsauta loppupistettä.
4. Liikuta mittatekstiä vetämällä keskimmäinen ohjauspiste uuteen paikkaan.
5. Muuta mitta vetämällä yksi päätyohjauspiste uuteen paikkaan.
6. Aseta mitta napsauttamalla oikeaa hiiripainiketta.
7. Poista mitta painamalla **Poista**-näppäintä.

Tutkimuslistan aiempien tutkimusten näyttäminen

1. Siirry tekstialueella **Radiologia**-välilehdelle.
2. Tutkimus, joka ei ole parhaillaan auki, voidaan näyttää napsauttamalla kerran **Avaa kuvat**. 

Tutkimuskuvauksen katselu

1. Näytä tekstialue kyseessä olevasta tutkimuksesta.
2. Mikäli tekstialueen tutkimuspaneeli on supistettu, avaa se napsauttamalla **Tutkimus**-palkkia.
3. Tutkimuspaneeli laajennetaan vetämällä laajennettavaa palkkia vasemmalle tai tutkimuspalkkia ylemmäksi.
4. Tutkimuspaneelissa lueteltujen lääkäreiden ja teknikkojen yhteystiedot saadaan napsauttamalla **Yhteys**. 

Raportin katselu

1. Näytä tekstialue kyseessä olevasta potilaasta/tutkimuksesta.
2. Mikäli raporttipaneeli on tekstialueella supistettu, avaa se napsauttamalla **Raportti**-palkkia ja katsele raporttia.
3. Katsele tämän potilaan toista raporttia napsauttamalla saneltua tutkimusta tutkimusluettelosta.
4. Voidaan myös katsella mitä tahansa avainkuvia, jotka liittyvät raporttiin.
5. Mikäli raportit tulevat IMPAX RISissä:istä, valitse asiaankuuluva raporttinäkymä.
6. Avainkuvien suurentamista varten leiju kursorilla avainkuvan vasemmalla puolella, kunnes osoitin muuttuu kaksoisnuoleksi. Vedä avainkuvat haluamaasi kokoon.

7. Avainkuva avataan kuva-alueella napsauttamalla sitä oikealla hiiripainikkeella ja valitsemalla **Näyttö**.

Pikanäppäimet: luetteloalue

Toiminto	Paina
Avaa tietämyskanta.	F1




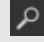

Pikanäppäimet: kuva-alue

Toiminto	Paina
Navigoi eteenpäin tutkimuksen seuraavalle sivulle, seuraavaan kuvaan tai seuraavaan välilehteen (riippuu Etene ... kerrallaan -työkalun tilasta).	Page Down *
Navigoi takaisin tutkimuksen edelliselle sivulle, edelliseen kuvaan tai edelliseen välilehteen (riippuu Etene ... kerrallaan -työkalun tilasta).	Page Up *
Navigoi eteenpäin kiertolettelon tai avoimen potilastutkimuksen seuraavaan potilaaseen.	Oikea nuoli
Navigoi takaisin kiertolettelon tai avoimen potilastutkimuksen edelliseen potilaaseen.	Vasen nuoli
Navigoi sarjan ensimmäiseen kuvaan.	Aloitussijainti
Navigoi eteenpäin tämänhetkisen potilaan seuraavaan tutkimukseen.	Ylös nuoli
Navigoi takaisin tämänhetkisen potilaan edelliseen tutkimukseen.	Alas nuoli
Navigoi sarjan viimeiseen kuvaan.	Loppu
Palaa ensimmäiseen ruutuun, kun navigoidaan tarkkailuviipale kerrallaan.	Aloitussijainti
Suurena kuvaa zoomaustyökalun rajoissa.	Page Up *

Toiminto	Paina
Pienennä kuvaa zoomaustyökalun rajoissa.	Page Down *
Palaa alkuperäiseen suurennukseen zoomaustyökalun rajoissa.	Aloitussijainti
Kasvata suurennuslasyökalun suurennusta.	Page Up **
Pienennä suurennuslasyökalun suurennusta.	Page Down **
Palaa suurennuslasyökalun alkuperäiseen suurennukseen.	Aloitussijainti
Avaa räätälöintivalintaikkuna.	F12
Avaa IMPAX 6.5.1 Asiakas tietämyskanta.	F1

Yleiset kliiniset tarkastelutyökalut

Painike	Nimi	Käytä
	Sarjakatseluohjelma	Näyttää kuvasarjoja jatkuvana kiertona tai kuva kavalta
	Yhdistetyn asetelun valitsin	Tulostaa yhden tai useamman tutkimuskuvan filmille tai paperille oman asetelun mukaan
	Suurennuslasi	Avaa erillisen ikkunan, joka suurentaa sen alla olevan kuvan osan
	Merkintäharppi	Mittaa kahden pisteen välisen etäisyyden
	Kiinnitä/Irrota tutkimuksia	Kiinnittää tutkimuksen paikalleen ja pitää sen näkyvissä navigoitaessa muissa potilaan tutkimuksissa

Painike	Nimi	Käytä
	Valitse näytön muoto	Määrittää miten kuvat, sarjat ja tutkimukset järjestetään sarakkeisiin ja riveihin kuva-aluemonitorilla
	Näytä koko raportti	Näyttää koko raportin tekstialueen raporttipaneelissa
	Ikkunataso	Muuttaa kuvan kirkkautta ja kontrastia säätämällä ikkunan keskustan ja ikkunan leveyden arvoja ja avaa pääsyn esivalittuihin ikkunatason arvoihin
	Zoomaa	Suurentaa tai pienentää kuvia lisäyksittäin
	Zoomaa täydelle ruudulle	Suurentaa yksittäisen kuvan koko ruudun kokoiseksi