

# IMPAX 6.5.1 Référence rapide : cliniciens

## Ouverture de session IMPAX

1. Si l'écran de connexion n'est pas affiché, double-cliquez sur le raccourci **IMPAX Client** qui se trouve sur le bureau.

Une autre solution consiste à sélectionner **Démarrer > Tous les programmes > Agfa IMPAX > IMPAX Client**.

2. Sélectionnez un autre groupe ou domaine.
3. Dans l'écran de connexion IMPAX, entrez votre **Id. utilisateur** et votre **mot de passe**.

Le mot de passe fait la distinction entre les majuscules et les minuscules. Si la touche Verr. Maj. de votre clavier est activée, un message d'avertissement apparaît lorsque vous cliquez dans le champ Mot de passe.

4. Cliquez sur **Connexion**.

## Recherche de patients à l'aide de la fonction Rechercher

1. Dans la zone de liste, cliquez sur la barre **Rechercher** pour la développer.
2. Saisissez les informations requises dans le champ Nom, Prénom du patient.

Ou dans le champ Id. patient ou Id. de patient global, saisissez **l'identifiant du patient**.

3. Sélectionnez **sans critère** dans la liste Service d'hospitalisation actuel du patient.
4. Vous pouvez éventuellement sélectionner une Date à rechercher.
5. Cliquez sur **Rechercher**.

## Ouverture d'examens à partir d'une liste de travail

1. Pour ouvrir l'examen dans la zone de texte uniquement, effectuez un clic droit sur

l'examen en question et sélectionnez **Ouvrir texte**.


ou

Pour ouvrir les images de l'examen, effectuez un clic droit sur l'examen en question et sélectionnez **Ouvrir les images**.





2. Pour ouvrir des examens antérieurs appropriés avec des examens, cliquez sur **Pertinence**.


## Modification du format d'écran d'un examen

1. Cliquez sur **Choisir le format d'écran** dans la barre d'outils supérieure de la zone d'image. 
2. Dans le menu Format d'écran, cliquez sur le bouton du format à appliquer.


## Affichage de la zone de texte

1. Cliquez sur **Texte** dans la barre d'outils supérieure de la zone d'image. 
2. Cliquez sur **Texte** dans la zone de texte. 

## Exploration des comptes rendus d'examens antérieurs à partir de la liste d'examens

1. Affichez la zone de texte pour le patient qui vous intéresse.
2. Si la liste d'examens est masquée dans la zone de texte, cliquez sur la flèche de la barre extensible. 
3. Si la liste d'examens est réduite, cliquez sur la barre **Liste d'examens** pour la développer.



4. S'il y a lieu, basculez vers l'onglet **Radiologie**.

5. Pour afficher un compte rendu relatif à un examen antérieur, cliquez n'importe où dans la ligne de cet examen.
6. Pour fermer les images de l'examen mais laisser le texte qui y est associé à la disposition des utilisateurs dans la zone de texte, cliquez sur **Images en cours de visualisation**. 

## Affichage d'un compte rendu

1. Affichez la zone de texte pour le patient/l'examen qui vous intéresse.
2. Si le panneau Compte rendu est réduit dans la zone de texte, cliquez sur la barre **Compte rendu** pour le développer et afficher le compte rendu.
3. Pour consulter un autre compte rendu pour ce patient, cliquez sur un examen dicté dans la liste d'examens.
4. Vous pouvez également visualiser les éventuelles images-clés associées au compte rendu.
5. Si les comptes rendus proviennent du SIR IMPAX, sélectionnez la vue appropriée.
6. Pour agrandir une image-clé, positionnez le pointeur sur le côté gauche de l'image jusqu'à ce qu'il prenne la forme d'une double flèche. Étirez ensuite l'image-clé à la taille voulue.
7. Pour ouvrir l'image-clé dans la zone d'image, cliquez sur celle-ci avec le bouton droit et sélectionnez ensuite **Afficher** dans le menu contextuel.

## Visualisation d'images-clés dans la zone de texte

1. Si le compte rendu est réduit dans la zone de texte, affichez-le en cliquant sur la barre **Compte rendu**.
2. Si la zone Images-clés est réduite, cliquez sur la flèche de la barre extensible  ou cliquez sur **Images-clés**. 
3. Pour agrandir une image-clé, glissez-déplacez la barre extensible des images-clés aux dimensions souhaitées.
4. Pour ouvrir l'examen qui contient l'image-clé dans la zone d'image, double-cliquez sur l'image ou cliquez sur celle-ci avec le bouton droit et sélectionnez ensuite **Afficher** dans le menu contextuel.

## Raccourcis clavier : Zone de liste









Pour	Appuyer sur
Ouvrir la Base de connaissances.	F1

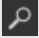

## Raccourcis clavier : Zone d'image

Pour	Appuyer sur
Passer à la page, à l'image ou à l'onglet suivant(e) dans l'examen (selon l'état de l'outil Avancer par).	Page suivante *
Revenir à la page, à l'image ou à l'onglet précédent(e) dans l'examen (selon l'état de l'outil Avancer par).	Page précédente *
Passer au patient suivant dans la liste du cycle ou dans l'examen ouvert du patient.	Flèche vers la droite
Revenir au patient précédent dans la liste du cycle ou dans l'examen ouvert du patient.	Flèche vers la gauche

Pour	Appuyer sur
Accéder à la première image de la série.	Origine
Passer à l'examen suivant pour le patient en cours.	Flèche vers le haut
Revenir à l'examen précédent pour le patient en cours.	Flèche vers le bas
Accéder à la dernière image de la série.	Fin
Revenir au premier cliché lors de l'exploration par coupe scanographique.	Origine
Agrandir l'image à l'aide de l'outil Zoom.	Page précédente *
Réduire l'image à l'aide de l'outil Zoom.	Page suivante *
Revenir au taux de grossissement d'origine de l'outil Zoom.	Origine
Augmenter le taux de grossissement de l'outil Loupe.	Page précédente **
Réduire le taux de grossissement de l'outil Loupe.	Page suivante **
Revenir au taux de grossissement d'origine de l'outil Loupe.	Origine
Ouvrir la boîte de dialogue Personnaliser.	F12
Ouvrir la Base de connaissances du IMPAX 6.5.1 Client.	F1

## Outils communs d'examen clinique

Bouton	Nom	Utiliser
	Afficheur cinématographique	Lit les images d'une série en boucle ou cliché par cliché
	Sélecteur de présentation composite	Imprime une ou plusieurs images d'examen sur film ou papier selon la disposition personnalisée
	Loupe	Ouvre une fenêtre distincte qui agrandit la section de l'image sous celle-ci
	Mesures de distance	Mesure la distance entre deux points
	Attacher/Décrocher examens	Attache un examen et le laisse visible à l'écran lors de l'exploration d'autres examens du patient
	Choisir le format d'écran	Définit l'organisation des images, séries et examens en colonnes et en lignes sur un moniteur de zone d'image
	Visualiser compte rendu entier	Affiche l'intégralité du compte rendu dans le volet Compte rendu de la zone de texte
	Contraste/brillance	Permet de modifier la luminosité et le contraste de l'image en réglant les valeurs de largeur et de centrage de la fenêtre, et d'accorder l'accès aux valeurs de plage/niveau prédéfinies

Bouton	Nom	Utiliser
	Zoom	Agrandit ou réduit les images de manière incrémentielle
	Zoom en mode plein écran	Agrandit une seule image au format plein écran