

IMPAX 6.5.1 Référence rapide : Service des urgences

Ouverture de session IMPAX

1. Si l'écran de connexion n'est pas affiché, double-cliquez sur le raccourci **IMPAX Client** qui se trouve sur le bureau.
Une autre solution consiste à sélectionner **Démarrer > Tous les programmes > Agfa IMPAX > IMPAX Client**.
2. Sélectionnez un autre groupe ou domaine.
3. Dans l'écran de connexion IMPAX, entrez votre **Id. utilisateur** et votre **mot de passe**.

Le mot de passe fait la distinction entre les majuscules et les minuscules. Si la touche Verr. Maj. de votre clavier est activée, un message d'avertissement apparaît lorsque vous cliquez dans le champ Mot de passe.

4. Cliquez sur **Connexion**.

Recherche de patients à l'aide de la fonction Rechercher

1. Dans la zone de liste, cliquez sur la barre **Rechercher** pour la développer.
2. Saisissez les informations requises dans le champ Nom, Prénom du patient.
Ou dans le champ Id. patient ou Id. de patient global, saisissez **l'identifiant du patient**.
3. Sélectionnez **sans critère** dans la liste Service d'hospitalisation actuel du patient.
4. Vous pouvez éventuellement sélectionner une Date à rechercher.
5. Cliquez sur **Rechercher**.

Ouverture d'examens à partir d'une liste de travail

1. Pour ouvrir l'examen dans la zone de texte uniquement, effectuez un clic droit sur

l'examen en question et sélectionnez **Ouvrir texte**.



ou

Pour ouvrir les images de l'examen, effectuez un clic droit sur l'examen en question et sélectionnez **Ouvrir les images**.



2. Pour ouvrir des examens antérieurs appropriés avec des examens, cliquez sur **Pertinence**.

Exploration des comptes rendus d'examens antérieurs à partir de la liste d'examens

1. Affichez la zone de texte pour le patient qui vous intéresse.
2. Si la liste d'examens est masquée dans la zone de texte, cliquez sur la flèche de la barre extensible. 
3. Si la liste d'examens est réduite, cliquez sur la barre **Liste d'examens** pour la développer.
4. S'il y a lieu, basculez vers l'onglet **Radiologie**.
5. Pour afficher un compte rendu relatif à un examen antérieur, cliquez n'importe où dans la ligne de cet examen.
6. Pour fermer les images de l'examen mais laisser le texte qui y est associé à la disposition des utilisateurs dans la zone de texte, cliquez sur **Images en cours de visualisation**. 

Ajout de commentaires en texte libre à l'examen

1. Affichez la zone de texte pour l'examen qui vous intéresse.

2. Accédez au panneau **Compte rendu**.
3. Basculez vers l'onglet **Commentaires sur l'examen** si celui-ci ne s'affiche pas.
4. Saisissez un commentaire dans la zone de texte.
5. Cliquez sur **Rendre privé** si vous souhaitez que le commentaire d'examen soit privé.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Insertion de commentaires favoris de l'examen en fonction du type de modalité

1. Affichez la zone de texte pour l'examen qui vous intéresse.
2. Accédez au panneau **Compte rendu**.
3. Basculez vers l'onglet **Commentaires sur l'examen** si celui-ci ne s'affiche pas.
4. Cliquez sur **Commentaires favoris de l'examen**.
5. Dans la boîte de dialogue Commentaires favoris de l'examen, depuis la liste Commentaires favoris de l'examen pour, sélectionnez une modalité (pour afficher les commentaires disponibles pour une modalité en particulier) ou sélectionnez **Tous** (pour afficher tous les commentaires disponibles pour toutes les modalités).
6. Sélectionnez le commentaire à insérer (utilisez les touches **Maj** ou **Ctrl** pour sélectionner plusieurs commentaires favoris).
7. Cliquez sur **OK**.

Affichage d'un compte rendu

1. Affichez la zone de texte pour le patient/l'examen qui vous intéresse.
2. Si le panneau Compte rendu est réduit dans la zone de texte, cliquez sur la barre

Compte rendu pour le développer et afficher le compte rendu.

3. Pour consulter un autre compte rendu pour ce patient, cliquez sur un examen dicté dans la liste d'examens.
4. Vous pouvez également visualiser les éventuelles images-clés associées au compte rendu.
5. Si les comptes rendus proviennent du SIR IMPAX, sélectionnez la vue appropriée.
6. Pour agrandir une image-clé, positionnez le pointeur sur le côté gauche de l'image jusqu'à ce qu'il prenne la forme d'une double flèche. Étirez ensuite l'image-clé à la taille voulue.
7. Pour ouvrir l'image-clé dans la zone d'image, cliquez sur celle-ci avec le bouton droit et sélectionnez ensuite **Afficher** dans le menu contextuel.

Raccourcis clavier : Zone de liste









| Pour | Appuyer sur |
|----------------------------------|-------------|
| Ouvrir la Base de connaissances. | F1 |



Raccourcis clavier : Zone d'image

| Pour | Appuyer sur |
|--|-----------------------|
| Passer à la page, à l'image ou à l'onglet suivant(e) dans l'examen (selon l'état de l'outil Avancer par). | Page suivante * |
| Revenir à la page, à l'image ou à l'onglet précédent(e) dans l'examen (selon l'état de l'outil Avancer par). | Page précédente * |
| Passer au patient suivant dans la liste du cycle ou dans l'examen ouvert du patient. | Flèche vers la droite |
| Revenir au patient précédent dans la liste du cycle ou dans l'examen ouvert du patient. | Flèche vers la gauche |

| Pour | Appuyer sur |
|---|---------------------|
| Accéder à la première image de la série. | Origine |
| Passer à l'examen suivant pour le patient en cours. | Flèche vers le haut |
| Revenir à l'examen précédent pour le patient en cours. | Flèche vers le bas |
| Accéder à la dernière image de la série. | Fin |
| Revenir au premier cliché lors de l'exploration par coupe scanographique. | Origine |
| Agrandir l'image à l'aide de l'outil Zoom. | Page précédente * |
| Réduire l'image à l'aide de l'outil Zoom. | Page suivante * |
| Revenir au taux de grossissement d'origine de l'outil Zoom. | Origine |
| Augmenter le taux de grossissement de l'outil Loupe. | Page précédente ** |
| Réduire le taux de grossissement de l'outil Loupe. | Page suivante ** |
| Revenir au taux de grossissement d'origine de l'outil Loupe. | Origine |
| Ouvrir la boîte de dialogue Personnaliser. | F12 |
| Ouvrir la Base de connaissances du IMPAX 6.5.1 Client. | F1 |

Outils communs d'examen clinique

| Bouton | Nom | Utiliser |
|---|-------------------------------------|---|
|  | Afficheur cinématographique | Lit les images d'une série en boucle ou cliché par cliché |
|  | Sélecteur de présentation composite | Imprime une ou plusieurs images d'examen sur film ou papier selon la disposition personnalisée |
|  | Loupe | Ouvre une fenêtre distincte qui agrandit la section de l'image sous celle-ci |
|  | Mesures de distance | Mesure la distance entre deux points |
|  | Attacher/Décrocher examens | Attache un examen et le laisse visible à l'écran lors de l'exploration d'autres examens du patient |
|  | Choisir le format d'écran | Définit l'organisation des images, séries et examens en colonnes et en lignes sur un moniteur de zone d'image |
|  | Visualiser compte rendu entier | Affiche l'intégralité du compte rendu dans le volet Compte rendu de la zone de texte |
|  | Contraste/brillance | Permet de modifier la luminosité et le contraste de l'image en réglant les valeurs de largeur et de centrage de la fenêtre, et d'accorder l'accès aux valeurs de plage/niveau prédéfinies |

| Bouton | Nom | Utiliser |
|---|--------------------------|---|
|  | Zoom | Agrandit ou réduit les images de manière incrémentielle |
|  | Zoom en mode plein écran | Agrandit une seule image au format plein écran |