

# IMPAX 6.5.1 Référence rapide : Radiologie

## Ouverture de session IMPAX

1. Si l'écran de connexion n'est pas affiché, double-cliquez sur le raccourci **IMPAX Client** qui se trouve sur le bureau.

Une autre solution consiste à sélectionner **Démarrer > Tous les programmes > Agfa IMPAX > IMPAX Client**.

2. Sélectionnez un autre groupe ou domaine.
3. Dans l'écran de connexion IMPAX, entrez votre **Id. utilisateur** et votre **mot de passe**.


Le mot de passe fait la distinction entre les majuscules et les minuscules. Si la touche Verr. Maj. de votre clavier est activée, un message d'avertissement apparaît lorsque vous cliquez dans le champ Mot de passe.


4. Cliquez sur **Connexion**.


## Ajout de listes de travail à la zone de la liste

1. Dans la zone de liste, cliquez sur **Listes de travail**.
2. Dans la colonne Actif adjacente à la liste de travail, cochez la case correspondant à chaque liste de travail que vous voulez afficher.
3. Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.


## Consultation des examens d'une liste de travail

1. Pour faire défiler tous les examens ou des regroupements d'examens d'une liste de travail, cliquez sur l'option **Cycle automatique** de la barre de liste de travail. 
2. Pour faire défiler les examens regroupés par priorité d'une liste de travail, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'option **Cycle**

**automatique**  de la barre de liste de travail et décochez la case à cocher correspondant à chaque regroupement de priorité dont vous ne voulez pas parcourir les examens. Cliquez sur **Cycle automatique**.

3. Pour parcourir certains examens, sélectionnez-les et cliquez avec le bouton droit sur **Ajouter à la liste du cycle** ou **Cycle**.
4. Pour parcourir plusieurs listes de travail, cliquez sur **Cycle automatique** dans la barre de chacune de ces listes. 

## Affichage des images par ondelettes

1. Cliquez sur le menu Id. utilisateur dans la zone de liste ou la zone Configurer. 
2. Assurez-vous que l'option **Afficher les images Web** est sélectionnée.


## Synchronisation de la zone de texte avec la zone d'image

1. Dans le volet Informations de la zone d'image, au-dessus de la barre d'outils supérieure, cliquez sur la date/l'heure de l'examen ou sur le numéro d'accès.


## Ajout d'images-clés à un compte rendu

1. Dans la zone d'image, cliquez avec le bouton droit sur une image jusqu'à ce qu'un menu contextuel apparaisse.
2. Sélectionnez **Ajouter aux images-clés** dans le menu contextuel.


## Affichage d'un examen affiché récemment


1. Dans la zone d'image, cliquez sur **Historique** dans la barre de navigation. 
2. Sélectionnez le nom du patient dont vous souhaitez afficher les examens.

## Mise de côté des examens du patient



1. Cliquez sur **Mettre de côté** près de la commande de défilement située dans le coin inférieur gauche de la zone d'image. 

## Liaison manuelle de séries



1. Dans la barre d'outils contextuelle ou supérieure de la zone d'image, cliquez avec le bouton droit sur **Lier les séries**. 
2. Dans le menu Préférences de liaison, cochez la case **Liaison manuelle**.
3. Synchronisez chaque série à lier en parcourant les images jusqu'à ce qu'elles appartiennent à la même région anatomique.
4. Pour lier manuellement les séries, cliquez sur **Lier les séries** et sélectionnez les séries requises.
5. Remarque : le texte change (« Séries actives à lier » pour les séries mises en surbrillance et « Cliquez pour annuler le lien » pour les séries liées) et l'icône de liaison apparaît dans le coin supérieur gauche indiquant que la série a été liée.
6. Pour appliquer les modifications de contraste/brillance à toutes les séries liées, activez la fonction de contraste/brillance sur toutes les séries liées.

7. Pour appliquer les valeurs de zoom et de panoramique à toutes les séries liées, activez les fonctions de zoom et de panoramique sur toutes les séries liées.
8. Pour désactiver le mode Modification de lien et continuer l'exploration, cliquez sur **Lier les séries.** 


## Ajustement des liaisons automatiques en fonction des mouvements du patient

1. Dans la barre d'outils contextuelle ou supérieure de la zone d'image, cliquez avec le bouton droit sur **Lier les séries.** 
2. Cliquez sur l'image de la série que vous souhaitez ajuster.
3. Explorez la série jusqu'à l'emplacement qui correspond à l'emplacement actuel des autres séries de l'examen.
4. Cliquez à nouveau sur l'image pour rétablir le lien entre les séries.
5. Pour modifier la liaison, cochez la case **Oui - lier à cette nouvelle position.**
6. Pour indiquer que vous avez fini l'ajustement des liens, cliquez sur **Lier les séries.** 

## Ajout d'une série avec un cadre de référence différent à un groupe de liaisons automatiques

1. Dans la barre d'outils contextuelle ou supérieure de la zone d'image, cliquez sur **Lier les séries.** 
2. Cliquez sur la série à ajouter au groupe Liaison automatique.
3. Pour indiquer que vous avez fini la modification des liens et pour continuer l'exploration, cliquez sur **Lier les séries.** 

## Réglage de contraste/brillance selon des valeurs prédéfinies

1. Dans la barre d'outils supérieure de la zone d'image, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le menu de boutons **Contraste/brillance** et sélectionnez la valeur prédéfinie à appliquer. 
2. Si le format d'écran utilisé affiche plusieurs séries ou examens, cliquez sur une image de la série à laquelle vous souhaitez appliquer le préréglage.

## Raccourcis clavier : Zone de liste

| Pour                             | Appuyer sur |
|----------------------------------|-------------|
| Ouvrir la Base de connaissances. | F1          |

## Raccourcis clavier : zone de texte









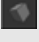

| Pour   | Appuyer sur |
|--|-------------|
| Copier un dossier ou fichier d'enseignement.   | Ctrl + C    |
| Couper un dossier ou fichier d'enseignement.   | Ctrl + X    |
| Coller un dossier ou fichier d'enseignement.   | Ctrl + V    |
| Renommer un dossier ou fichier d'enseignement. | F2          |

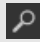
## Raccourcis clavier : Zone d'image

| Pour   | Appuyer sur       |
|--|-------------------|
| Passer à la page, à l'image ou à l'onglet suivant(e) dans l'examen (selon l'état de l'outil Avancer par).    | Page suivante *   |
| Revenir à la page, à l'image ou à l'onglet précédent(e) dans l'examen (selon l'état de l'outil Avancer par). | Page précédente * |

| Pour  | Appuyer sur           |
|---|-----------------------|
| Passer au patient suivant dans la liste du cycle ou dans l'examen ouvert du patient.    | Flèche vers la droite |
| Revenir au patient précédent dans la liste du cycle ou dans l'examen ouvert du patient. | Flèche vers la gauche |
| Accéder à la première image de la série.  | Origine               |
| Passer à l'examen suivant pour le patient en cours.                                     | Flèche vers le haut   |
| Revenir à l'examen précédent pour le patient en cours.                                  | Flèche vers le bas    |
| Accéder à la dernière image de la série.  | Fin                   |
| Revenir au premier cliché lors de l'exploration par coupe scanographique.               | Origine               |
| Agrandir l'image à l'aide de l'outil Zoom.  | Page précédente *     |
| Réduire l'image à l'aide de l'outil Zoom.   | Page suivante *       |
| Revenir au taux de grossissement d'origine de l'outil Zoom.                             | Origine               |
| Augmenter le taux de grossissement de l'outil Loupe.                                    | Page précédente **    |
| Réduire le taux de grossissement de l'outil Loupe.                                      | Page suivante **      |
| Revenir au taux de grossissement d'origine de l'outil Loupe.                            | Origine               |
| Ouvrir la boîte de dialogue Personnaliser.  | F12                   |
| Ouvrir la Base de connaissances du IMPAX 6.5.1 Client.                                  | F1                    |

## Outils de radiologie communs

| Bouton  | Nom                         | Utiliser  |
|---|-----------------------------|---|
|    | Afficheur cinématographique | Lit les images d'une série en boucle ou cliché par cliché.  |
|    | cycle                       | Déplace automatiquement les examens d'une liste de travail dans la zone d'image.  |
|    | Dicter                      | Lance la dictée d'un seul examen.   |
|    | Dicter - Plusieurs examens  | Lance la dictée pour plusieurs examens.   |
|    | Inverser                    | Permute les zones de blanc et de noir dans une image.   |
|    | Marquer annotation          | Ajoute une annotation textuelle de forme libre à une image.   |
|    | Dessiner une flèche         | Place une flèche de marquage pointant vers des zones d'intérêt.   |
|   | Mesures de distance         | Mesure la distance entre deux points.   |
|  | Volume Viewing              | Lance une série dans la fenêtre Volume Viewing pour l'analyse MIP, MPR et 3D (si cette licence est disponible)  |
|  | Contraste/brillance         | Permet de modifier la luminosité et le contraste de l'image en réglant les valeurs de largeur et de centrage de la fenêtre, et d'accorder l'accès aux |

| Bouton  | Nom  | Utiliser   |
|---|------|--|
|  | Zoom | Agrandit ou réduit les images de manière incrémentielle. |