

IMPAX 6.5.1 Kratke upute: Odjel urgentne medicine

Prijava u IMPAX


1. Ako nije prikazan zaslon za prijavu, na radnoj površini dva puta pritisnite prečac **IMPAX Kljent**.
Ili izaberite **Pokreni > Svi programi > Agfa IMPAX > IMPAX Kljent**.
2. Izaberite drugi klaster ili domenu.
3. U zaslon za prijavu u IMPAX, upišite svoj **ID korisnika** i **lozinku**.
Lozinka je osjetljiva na mala/velika slova. Ako na tipkovnici imate aktiviranu tipku Caps Lock, kada pritisnete polje Lozinka pojaviti će se poruka upozorenja.
4. Pritisnite **Prijava**.

Pronalaženje bolesnika pomoću naredbe Traži

1. U području popisa pritisnite traku **Traži** te je tako raširite.
2. U polja Prezime, Ime, upišite bolesnikovo ime.
Ili upišite **bolesnikov ID** u polje ID bolesnika ili Globalni ID bolesnika.
3. Iz popisa Trenutna lokacija bolesnika izaberite **bilo koja**.
4. Kao opciju možete izabrati pretraživanje po datumu.
5. Pritisnite **Traži**.



Otvaranje studija iz radne liste

1. Za otvaranje studije samo u području teksta, desnom tipkom miša kliknite na studiju i izaberite **Otvori tekst**.
ili

Za otvaranje snimaka koje se odnose na studiju, desnom tipkom miša kliknite na studiju i izaberite **Otvori snimke**. 

2. Da biste uz studije otvorili relevantne prijašnje studije/snimke, pritisnite **Relevantnost**.

Listanje prijašnjih izvještaja iz Popisa studija

1. Prikažite područje teksta za bolesnika od interesa.
2. Ako je Popis studija u području teksta skriven, kliknite na strelicu trake koja se može proširiti. 
3. Ako je prozor popisa studija sažet, proširite ga pritiskom na traku **Popis studija**.
4. Ako je potrebno, prebacite na karticu (tab) **Radiologija**.
5. Za gledanje izvještaja vezanog za neki prijašnji, kliknite jedanput bilo gdje u retku prijašnjih.
6. Za zatvaranje snimki studije, ali tako da pridruženi tekst ostane dostupan u području teksta, pritisnite **Snimke se gledaju**. 

Dodavanje komentara studije u obliku slobodnog teksta

1. Prikažite područje teksta za studiju koja je predmet interesa.
2. Listajte do prozora **Izvještaj**.
3. Ako nije vidljiv, prebacite na karticu (tab) **Komentari studije**.
4. U okviru za tekst, upišite komentar.
5. Da bi taj komentar ostao osoban, pritisnite **Postavi kao osobni**.
6. Pritisnite **Spremi**.

Umetanje favoritnih komentara studije na temelju modaliteta

1. Prikažite područje teksta za studiju koja je predmet interesa.
2. Listajte do prozora **Izvještaj**.
3. Ako nije vidljiv, prebacite na karticu (tab) **Komentari studije**.
4. Pritisnite **Favoritni komentari studije**.
5. U dijalogu Favoritni komentari studije, iz popisa favoritnih komentara izaberite modalitet (kako biste vidjeli komentare dostupne za određeni modalitet) ili izaberite **Svi** (kako biste vidjeli komentare dostupne za sve modalitete).
6. Izaberite komentar koji ćete umetnuti (pritisnite tipke **Shift** ili **Ctrl** za izbor više favoritnih komentara).
7. Pritisnite **U redu**.

Gledanje izvještaja

1. Prikažite područje teksta za bolesnika/studiju od interesa.
2. Ako je prozor Izvještaj sažet, raširite ga pritiskom na traku **Izvještaj** u području teksta i pogledajte izvještaj.
3. Za gledanje drugog izvještaja istog bolesnika, pritisnite na diktiranu studiju u popisu studija.
4. Osim toga, pogledajte ključne snimke vezane uz taj izvještaj.
5. Ako izvještaji dolaze iz IMPAX RIS-a, izaberite odgovarajući prikaz izvještaja.
6. Da biste povećali ključne snimke, "lebdite" pokazivačem miša nad lijevom stranom ključne snimke sve dok se pokazivač ne promijeni u dvostruku strelicu. Razvucite ključne snimke na potrebnu veličinu.

7. Otvorite ključnu snimku u području snimke desnim klikom, i izaberite **Prikaži**.

Prečaci na tipkovnici: područje popisa







Za	Pritisni
Otvaranje baze znanja.	F1



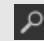

Prečaci na tipkovnici: područje snimke

Za	Pritisni
Listanje prema naprijed na sljedeću stranicu, snimku ili karticu studije (ovisno o statusu alata Naprijed po ...).	Page Down *
Listanje prema natrag na prethodnu stranicu, snimku ili karticu studije (ovisno o statusu alata Naprijed po ...).	Page Up *
Listanje prema naprijed na sljedećeg bolesnika u kružnom popisu ili otvaranje bolesnikove studije.	Strelica udesno
Listanje prema natrag na prethodnog bolesnika u kružnom popisu ili otvaranje bolesnikove studije.	Strelica ulijevo
Listanje do prve snimke u seriji.	Home
Listanje prema naprijed na sljedeću studiju trenutnog bolesnika.	Strelica prema gore
Listanje prema natrag na prethodnu studiju trenutnog bolesnika.	Strelica prema dolje
Listanje do zadnje snimke u seriji.	End
Povratak na prvi okvir u listanju po preliminarno odabranim slojevima (Scout).	Home
Povećavanje snimke u sklopu alata Zum.	Page Up *
Smanjivanje snimke u sklopu alata Zum	Page Down *

Za	Pritisni
Povratak na početno povećanje u sklopu alata Zum.	Home
Povećavanje povećanja povećala.	Page Up **
Smanjivanje povećanja povećala.	Page Down **
Povratak na početno povećanje povećala.	Home
Otvaranje Dijaloga prilagođavanja.	F12
Otvaranje IMPAX 6.5.1 Klijent baze znanja.	F1

Najčešći alati kliničkog pregledavanja

Gumb	Naziv	Upotreba
	Cine Viewer	Prikazuje serije snimaka u kontinuiranom slijedu ili kadar po kadar
	Birač kompozitnog izgleda	Ispisuje jednu ili više snimki studije na film-foliji ili papiru uz uobičajeni izgled
	Povećalo	Otvora zasebni prozor koji povećava dio snimke koji se nalazi ispod
	Oznaka Mjerka	Mjeri udaljenost između dviju točaka
	Prikvači/otkvači studije	Pričvršćuje studiju na mjestu i drži je vidljivom za vrijeme listanja drugih studija tog bolesnika
	Odaberi format zaslona	Definira kako su snimke, serije studije raspoređene u stupce i redove na području snimke na monitoru

Gumb	Naziv	Upotreba
	Pogledaj cijeli izvještaj	Prikazuje cijeli izvještaj u prozoru Izvještaj u području teksta
	Razina prozora	Mijenja svjetlinu i kontrast snimke podešavanjem vrijednosti središta i širine prozora te daje pristup prethodno određenim vrijednostima razine prozora
	Zum	Povećava ili smanjuje snimke u koracima
	Zum na cijeli zaslon	Povećava jednu snimku na punu veličinu zaslona