

IMPAX 6.5.1 Kratke upute: Ortopedija

Prijava u IMPAX


1. Ako nije prikazan zaslon za prijavu, na radnoj površini dva puta pritisnite prečac **IMPAX Klijent**.
Ili izaberite **Pokreni > Svi programi > Agfa IMPAX > IMPAX Klijent**.
2. Izaberite drugi klaster ili domenu.
3. U zaslon za prijavu u IMPAX, upišite svoj **ID korisnika** i **lozinku**.
Lozinka je osjetljiva na mala/velika slova. Ako na tipkovnici imate aktiviranu tipku Caps Lock, kada pritisnete polje Lozinka pojavit će se poruka upozorenja.
4. Pritisnite **Prijava**.

Pronalaženje bolesnika pomoću naredbe Traži

1. U području popisa pritisnite traku **Traži** te je tako raširite.
2. U polja Prezime, Ime, upišite bolesnikovo ime.
Ili upišite **bolesnikov ID** u polje ID bolesnika ili Globalni ID bolesnika.
3. Iz popisa Trenutna lokacija bolesnika izaberite **bilo koja**.
4. Kao opciju možete izabrati pretraživanje po datumu.
5. Pritisnite **Traži**.


Otvaranje studija iz radne liste

1. Za otvaranje studije samo u području teksta, desnom tipkom miša kliknite na studiju i izaberite **Otvori tekst**.
ili


Za otvaranje snimaka koje se odnose na studiju, desnom tipkom miša kliknite na studiju i izaberite **Otvori snimke**. 

2. Da biste uz studije otvorili relevantne prijašnje studije/snimke, pritisnite **Relevantnost**.


Otvaranje snimaka u prozoru Orthopaedic Application

1. U području snimke, alatom **Odabir snimaka** izaberite do 20 snimaka za pretkirurško planiranje.
2. Idite na prvu snimku koja zahtijeva pretkirurško planiranje.
3. Iz konteksta ili gornje alatne trake pritisnite **Predložak**. 
4. Kliknite na snimku koja zahtijeva pretkirurško planiranje.

Prikaz prijašnjih studija iz Popisa studija

1. U području teksta prebacite na karticu (tab) **Radiologija**.
2. Studiju koja trenutačno nije otvorena, prikažite jednim klikom na **Otvori snimke**. 


Zumiranje i paning snimke

1. U gornjoj alatnoj traci područja snimke, iz izbornika gumba Zumiranje izaberite **Zum**. 
2. Pritisnite na snimku koju želite zumirati.
3. Prema potrebi zumirajte ili koristite funkciju paninga za snimku.


Eksport ortopedskog planiranja IMPAX

1. U prozoru Ortopedsko pretkirurško planiranje, kliknite **Eksport u PACS**. 

Pregledavanje informacija o ortopedskim implantatima

1. Iz konteksta područja snimke ili gornje alatne trake pritisnite **Informacije snimke**. 
Ili, ako koristite tekstualni izbornik kontekstualne alatne trake (Ctrl + desni klik), izaberite **Informacije > Informacije snimke**.
2. Kliknite na snimku koja sadrži detalje implantata.

Ispis snimaka primjenom kompozitnog izgleda






1. U području snimke, prikažite sve snimke koje će biti uključene u ispis kompozitnog izgleda.
2. U kontekstualnoj ili gornjoj alatnoj traci, pritisnite **Birač kompozitnog izgleda**. 
3. Za ispis imena bolesnika i pristupnih brojeva na svim stranicama, u dijalogu Birača kompozitnog izgleda aktivirajte kvadratić **Prikaži tekstualna zaglavlja**.
4. Za ispis brojeva stranica, aktivirajte kvadratić **Uključi broj stranice**.
5. Za uštedu tonera pri ispisu na papir, aktivirajte kvadratić **Koristi bijelu pozadinu za papirnati ispis**.
6. Iz popisa Izgled, izaberite izgled ispisa.
7. Kod ispisa na DICOM pisaču za film-folije, iz popisa Pisača izaberite pisač koji ćete upotrijebiti.




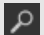
8. Kod ispisa na DICOM pisaču za film-folije, iz popisa pretpodešenih vrijednosti izaberite pretpodešene vrijednosti ispisa.
9. Idite na snimku za ispis, postavite pokazivač iznad nje i povucite je u element snimke na predložku. Ponovite to za sve snimke koje želite uključiti u ispis.
10. Ako ispis želite napraviti odmah, pritisnite **Ispis** (za ispis na film-foliji) ili **Papirnati ispis**.
11. Kod ispisa papirnate verzije, iz dijaloga Windowsa Ispis izaberite opcije ispisa i pritisnite **U redu**.

Prečaci na tipkovnici: područje popisa

Za	Pritisni
Otvaranje baze znanja.	F1

Najčešći ortopedski alati

Gumb	Naziv	Upotreba
	Birač kompozitnog izgleda	Ispisuje jednu ili više snimki studije na film-foliju ili papir uz uobičajeni izgled
	Kružni	Premješta studije iz radne liste automatski u područje snimke
	Informacije snimke	Prikazuje demografske pojedinosti i pojedinosti ortopedskih implantata i omogućuje ispis informacija
	Odabir snimaka	Odabire snimke koje će biti pokrenute u aplikaciji Orthopaedic Application
	Prikvači/otkvači studije	Pričvršćuje studiju na mjestu i drži je vidljivom za vrijeme

Gumb	Naziv	Upotreba
		listanja drugih studija tog bolesnika
	Odaberi format zaslona	Definira kako su snimke, serije i studije raspoređene u stupce i redove na području snimke na monitoru
	Predložak	Otvora snimke u prozoru Orthopaedic Application
	Razina prozora	Mijenja svjetlinu i kontrast snimke podešavanjem vrijednosti središta i širine prozora te daje pristup prethodno određenim vrijednostima razine prozora
	Zum	Povećava ili smanjuje snimke u koracima

Prečaci na tipkovnici: područje snimke

Za	Pritisni
Listanje prema naprijed na sljedeću stranicu, snimku ili karticu studije (ovisno o statusu alata Naprijed po ...).	Page Down *
Listanje prema natrag na prethodnu stranicu, snimku ili karticu studije (ovisno o statusu alata Naprijed po ...).	Page Up *
Listanje prema naprijed na sljedećeg bolesnika u kružnom popisu ili otvaranje bolesnikove studije.	Strelica udesno
Listanje prema natrag na prethodnog bolesnika u kružnom popisu ili otvaranje bolesnikove studije.	Strelica ulijevo
Listanje do prve snimke u seriji.	Home

Za	Pritisni
Listanje prema naprijed na sljedeću studiju trenutnog bolesnika.	Strelica prema gore
Listanje prema natrag na prethodnu studiju trenutnog bolesnika.	Strelica prema dolje
Listanje do zadnje snimke u seriji.	End
Povratak na prvi okvir u listanju po preliminarno odabranim slojevima (Scout).	Home
Povećavanje snimke u sklopu alata Zum.	Page Up *
Smanjivanje snimke u sklopu alata Zum	Page Down *
Povratak na početno povećanje u sklopu alata Zum.	Home
Povećavanje povećanja povećala.	Page Up **
Smanjivanje povećanja povećala.	Page Down **
Povratak na početno povećanje povećala.	Home
Otvaranje Dijaloga prilagođavanja.	F12
Otvaranje IMPAX 6.5.1 Klijent baze znanja.	F1