

IMPAX 6.5.1 Kratke upute: Radiologe

Prijava u IMPAX

1. Ako nije prikazan zaslon za prijavu, na radnoj površini dva puta pritisnite prečac **IMPAX Kljent**.

Ili izaberite **Pokreni > Svi programi > Agfa IMPAX > IMPAX Kljent**.

2. Izaberite drugi klaster ili domenu.
3. U zaslon za prijavu u IMPAX, upišite svoj **ID korisnika** i **lozinku**.



Lozinka je osjetljiva na mala/velika slova. Ako na tipkovnici imate aktiviranu tipku Caps Lock, kada pritisnete polje Lozinka pojavit će se poruka upozorenja.


4. Pritisnite **Prijava**.

Dodavanje radnih lista području popisa


1. U području popisa pritisnite **Radne liste**.
2. U aktivnom stupcu uz radnu listu, aktivirajte kvadratić za svaku radnu listu koju želite prikazati.
3. Pritisnite **Enter** ili kliknite **U redu**.

Listanje studija na radnoj listi kružnim sljedom

1. Za kružno listanje svih studija ili skupina studija na radnoj listi, kliknite na **Autom. kruženje** u traci radne liste. 
2. Za kružno listanje prioriteto grupiranih studija na radnoj listi, kliknite desnom tipkom miša na **Autom. kruženje**  i odznačite kvadratić za aktiviranje pored svakog pravila prioritelnog grupiranja za koje ne želite kružno listanje studija. Pritisnite **Autom. kruženje**.

3. Za kružno listanje specifičnih studija, izaberite ih i desnom tipkom miša kliknite na **Dodaj u kružni popis** ili **Kruži**.
4. Za kružno listanje više radnih lista, u svakoj traci radne liste kliknite na **Autom. kruženje**. 

Gledanje 'wavelet' snimaka

1. U ladici područja popisa ili konfiguracije kliknite na izbornik Korisnički ID. 
2. Provjerite je li odabrana naredba **Prikaži web snimke**.


Sinkronizacija područja teksta s područjem snimke

1. U prozoru s informacijama studije u području snimke, iznad gornje alatne trake, kliknite datum/vrijeme studije ili pristupni broj.


Dodavanje ključnih snimaka izvještaju

1. U području snimke, pritiščite snimku desnom tipkom miša dok se ne pojavi kontekstualni izbornik.
2. Iz kontekstualnog izbornika izaberite **Dodaj ključnim snimkama**.



Prikaz nedavno gledane studije

1. U traci za navigaciju područja snimke, kliknite **Povijest**. 
2. Izaberite ime bolesnika čije studije želite ponovno prikazati.


Odlaganje bolesnikovih studija u stranu

1. Uz komandu za kružno listanje, lijevo dolje u području snimke, pritisnite **Stavi na stranu**. 

Ručno povezivanje serija

1. Iz konteksta područja snimke ili gornje alatne trake pritisnite desnom tipkom miša **Poveži serije**. 
2. U izborniku Postavke povezivanja, aktivirajte kvadratić **Ručno povezivanje**.
3. Sinkronizirajte svaku seriju koju želite povezati, prelistavanjem snimaka sve dok ne budu odgovarale istoj anatomskoj regiji.
4. Za ručno povezivanje serija, lijevom tipkom miša pritisnite **Poveži serije** i izaberite potrebne serije.
5. Obratite pozornost na promjenu teksta ("Aktivne serije za povezivanje" za istaknute serije i "Pritisni za poništavanje povezivanja" za povezane serije), a ikona povezivanja pojavljuje se u lijevom gornjem kutu te prikazuje da je serija povezana.
6. Kako bi se promjene razine prozora primijenile na sve povezane serije aktivirajte podešavanje razine prozora kroz povezane serije.
7. Kako bi se zumiranje i paning primijenili na sve povezane serije, aktivirajte zumiranje i paning kroz povezane studije.
8. Za deaktiviranje moda za uređivanje povezivanja i povratak na uobičajenu navigaciju, pritisnite **Poveži serije**. 

Podešavanje automatskog povezivanja za pomake bolesnika

1. Iz konteksta područja snimke ili gornje alatne trake pritisnite lijevom tipkom miša **Poveži serije**. 
2. Ljevom tipkom miša pritisnite na snimku serije koju želite podesiti.

3. Idite na lokaciju u seriji koja odgovara sadašnjoj lokaciji drugih serija u studiji.
4. Lijevom tipkom miša pritisnite snimku kako biste je ponovno povezali sa serijom.
5. Da biste promijenili povezivanje, aktivirajte kvadratić **Da - poveži na ovu novu poziciju**.
6. Kao znak da ste završili podešavanje povezivanja, lijevom tipkom pritisnite **Poveži serije**.

Dodavanje serije s različitim koordinatama automatski povezanoj skupini

1. Iz konteksta područja snimke ili gornje alatne trake pritisnite lijevom tipkom miša **Poveži serije**.
2. Lijevom tipkom miša pritisnite seriju koju želite dodati automatski povezanoj skupini.
3. Kao znak da ste završili promjenu povezivanja i za povratak u uobičajenu navigaciju, lijevom tipkom pritisnite **Poveži serije**.

Podešavanje razine prozora prema naprijed namještenim vrijednostima

1. U gornjoj alatnoj traci područja snimke, desnom tipkom miša pritisnite izbornik gumba **Razina prozora** i izaberite pretpodešene vrijednosti.
2. U slučaju formata zaslona koji prikazuje više od jedne serije ili studije, primijenite pretpodešene vrijednosti klikom na neku snimku iz serije.

Prečaci na tipkovnici: područje popisa

Za	Pritisni
Otvaranje baze znanja.	F1

Prečaci na tipkovnici: područje teksta

Za	Pritisni
Kopiranje nastavne datoteke ili mape.	Ctrl + C
Rezanje nastavne datoteke ili mape.	Ctrl + X
Lijepljenje nastavne datoteke ili mape.	Ctrl + V
Preimenovanje nastavne datoteke ili mape.	F2

Prečaci na tipkovnici: područje snimke

Za	Pritisni
Listanje prema naprijed na sljedeću stranicu, snimku ili karticu studije (ovisno o statusu alata Naprijed po ...).	Page Down *
Listanje prema natrag na prethodnu stranicu, snimku ili karticu studije (ovisno o statusu alata Naprijed po ...).	Page Up *
Listanje prema naprijed na sljedećeg bolesnika u kružnom popisu ili otvaranje bolesnikove studije.	Strelica udesno
Listanje prema natrag na prethodnog bolesnika u kružnom popisu ili otvaranje bolesnikove studije.	Strelica ulijevo
Listanje do prve snimke u seriji.	Home
Listanje prema naprijed na sljedeću studiju trenutnog bolesnika.	Strelica prema gore
Listanje prema natrag na prethodnu studiju trenutnog bolesnika.	Strelica prema dolje
Listanje do zadnje snimke u seriji.	End
Povratak na prvi okvir u listanju po preliminarno odabranim slojevima (Scout).	Home

Za	Pritisni
Povećavanje snimke u sklopu alata Zum.	Page Up *
Smanjivanje snimke u sklopu alata Zum.	Page Down *
Povratak na početno povećanje u sklopu alata Zum.	Home
Povećavanje povećanja povećala.	Page Up **
Smanjivanje povećanja povećala.	Page Down **
Povratak na početno povećanje povećala.	Home
Otvaranje Dijaloga prilagođavanja.	F12
Otvaranje IMPAX 6.5.1 Klijent baze znanja.	F1

Najčešći alati radiologije

Gumb	Naziv	Upotreba
	Cine Viewer	Prikazuje serije snimaka u kontinuiranom slijedu ili kadar po kadar
	Kruži	Automatski premješta studije iz radne liste u područje snimke
	Diktiraj	Počinje diktat jedne studije
	Diktiraj - više studija	Počinje diktat za dvije ili više studija
	Invertiraj	Izmjenjuje bijele i crne površine na snimci
	Oznaka bilješke	Dodaje slobodnu tekstualnu oznaku na snimci
	Oznaka Strelica	Stavlja oznaku strelice za označavanje područja interesa
	Oznaka Mjerka	Mjeri udaljenost između dviju točaka

Gumb	Naziv	Upotreba
	Volume Viewing	Pokreće seriju u prozoru Volume Viewing za MIP, MPR i (ako postoji licenca) za 3D analizu
	Razina prozora	Mijenja svjetlinu i kontrast snimke podešavanjem vrijednosti središta i širine prozora te daje pristup prethodno određenim vrijednostima razine prozora
	Zum	Povećava ili smanjuje snimke u koracima