

IMPAX 6.5.1 Gyors útmutató: Sürgősségi osztály

Bejelentkezés az IMPAX rendszerre

1. Ha a bejelentkezési képernyő nem jelenik meg, az Asztalon kattintson kétszer az **IMPAX Kliens** parancsikonra.

Vagy pedig válassza ki ezeket: **Start > Programok > Agfa Impax > IMPAX Kliens**.

2. Válasszon másik klasztert vagy tartományt.
3. Az IMPAX bejelentkezési képernyőjén írja be **Felhasználói azonosítóját** és **Jelszavát**.

A jelszóban különbözőnek számítanak a kis- és nagybetűk. Ha a billentyűzeten be van kapcsolva a Caps Lock opció, akkor figyelmeztető üzenet jelenik meg, amikor a Jelszó mezőre kattint.

4. Kattintson a **Bejelentkezés** gombra.

Páciensek keresése a Keresés funkcióval

1. A Listaterületen belül kattintson a **Keresés** sávra annak megnyitásához.
2. A Vezetéknév és Utónév mezőkbe írja be a páciens nevét.

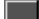
Vagy pedig a Páciensazonosító vagy a Globális páciensazonosító mezőbe írja be a **páciensazonosítót**.

3. A Páciens jelenlegi helye listán válassza ki a **bármely** értéket.
4. Opcionálisan kiválaszthat egy keresni kívánt Dátumot is.
5. Kattintson a **Keresés** gombra.

Vizsgálatok megnyitása a munkalistáról



1. A vizsgálatnak csak a Szövegterületen való megnyitásához kattintson a jobb egérgombbal a vizsgálatra, majd válassza ki a **Szöveg megnyitása** elemet.

vagy

A vizsgálat képeinek megnyitásához kattintson a jobb egérgombbal a kívánt vizsgálatra, majd jelölje ki a **Képek megnyitása** elemet. 

2. A vonatkozó kórelőzmények vizsgálatokkal együtt való megnyitásához kattintson a **Relevancia** elemre.

Tallózás a Vizsgálatok listájából származó kórelőzmény-jelentések között

1. Jelenítse meg a Szöveges területet a kívánt páciensnél.
2. Ha a Vizsgálatok listája a Szövegterületen el van rejtve, kattintson a kinyitható sáv nyíl jelére. 
3. Ha a Vizsgálati lista nincs megnyitva, akkor a megnyitáshoz kattintson a **Vizsgálati lista** eszköztárra.
4. Ha szükséges, nyissa meg a **Radiológia** fület.
5. Valamely kórelőzményre vonatkozó jelentés megtekintéséhez kattintson egyszer a kórelőzmény soron bárhová.
6. Ha be akarja zárni a vizsgálati képeket, de a hozzá tartozó szövegre még szüksége van a Szövegterületen, kattintson a **Képek megtekintés alatt** lehetőségre. 

Szabad szöveges vizsgálat-megjegyzések hozzáadása

1. Jelenítse meg a Szöveges területet a kívánt vizsgálatnál.
2. Görgessen a **Jelentés** panelhez.
3. Ha nem látható, nyissa meg a **Vizsgálat-megjegyzések** fület.
4. A szövegdobozba írja be a megjegyzés szövegét.
5. Ha a vizsgálat-megjegyzést nem szeretné nyilvánossá tenni, kattintson a **Legyen privát** elemre.
6. Kattintson a **Mentés** gombra.

Kedvenc vizsgálat-megjegyzések beszurása modultípustól függően

1. Jelenítse meg a Szöveges területet a kívánt vizsgálatnál.
2. Görgessen a **Jelentés** panelhez.
3. Ha nem látható, nyissa meg a **Vizsgálat-megjegyzések** fület.
4. Kattintson a **Kedvenc vizsgálat-megjegyzések** elemre.
5. A Kedvenc vizsgálat-megjegyzések párbeszédablakban a "Kedvenc vizsgálat-megjegyzések ehhez:" listából válassza ki a kívánt modult (az adott modulnál elérhető megjegyzések listájának megtekintéséhez), vagy válassza ki az **Összes** elemet (az összes modulnál elérhető megjegyzések listájának megtekintéséhez).
6. Válassza ki a beszúrni kívánt megjegyzést (a **Shift** vagy a **Ctrl** gombokkal több kedvenc megjegyzést is kiválaszthat).
7. Kattintson az **OK** gombra.

Jelentés megtekintése

1. Jelenítse meg a a Szövegterületet a kívánt páciensnél/vizsgálatnál.
2. Ha a Szöveges területen belül a Jelentés panel nincs megnyitva, nyissa meg azt a **Jelentés** sávra kattintva, majd tekintse meg a jelentést.
3. Ha a páciens valamely másik jelentését kívánja megtekinteni, akkor a Vizsgálatok listájában kattintson egy diktált vizsgálatra.
4. A fő képek megtekintése is össze van kapcsolva a jelentéssel.
5. Ha jelentések érkeznek az IMPAX RIS rendszerből, válassza ki a megfelelő jelentés nézetet.
6. A fő képek nagyításához vigye a kurzort a fő kép bal széléhez, és várja meg, míg a kurzor átváltozik kettős nyíllá. Húzza ki a fő képet a kívánt méretre.
7. Ha a fő képet kívánja megnyitni a Képterületen, kattintson rá kétszer, majd válassza ki a **Kijelzés** elemet.

Gyorsbillentyűk: Listaterület





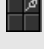

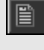

Művelet	Gomb
A Tudástár megnyitása.	F1



Gyorsbillentyűk: Képterület

Művelet	Gomb
Navigálás a vizsgálat következő oldalára, képre vagy fülére (az Előrelépés eszköz állapotának megfelelően).	Oldal le *
Navigálás a vizsgálat előző oldalára, képre vagy fülére (az Előrelépés eszköz állapotának megfelelően).	Oldal fel *

Művelet	Gomb
Navigálás a cikluslista következő pácienséhez, vagy a pácienshez tartozó vizsgálat megnyitása.	Jobb nyíl
Navigálás a cikluslista előző pácienséhez, vagy a pácienshez tartozó vizsgálat megnyitása.	Bal nyíl
Navigálás a sorozat első képéhez.	Induló oldal
Navigálás előre a jelenlegi páciens következő vizsgálatához.	Felfelé nyíl
Navigálás vissza a jelenlegi páciens előző vizsgálatához.	Lefelé nyíl
Navigálás a sorozat utolsó képéhez.	Befejezés
Visszalépés a vezérlő-képszelethez való navigálás első keretéhez	Induló oldal
A kép felnagyítása a Nagyítás eszközön belül.	Oldal fel *
A kép kicsinyítése a Nagyítás eszközön belül.	Oldal le *
Visszatérés az eredeti nagyítási szinthez a Nagyítás eszközön belül.	Induló oldal
A Nagyító eszköz nagyítási szintjének növelése	Oldal fel **
A Nagyító eszköz nagyítási szintjének csökkentése	Oldal le **
Visszatérés a Nagyító eszköz eredeti nagyítási szintjéhez.	Induló oldal
A Testre szabás párbeszédablak megnyitása.	F12
Az IMPAX 6.5.1 Kliens Tudástár megnyitása.	F1

Gyakori klinikai áttekintési eszközök

Gomb	Megnevezés	Használat
	Mozinézó	A sorozat képeit folyamatos hurokban vagy keretenként játssza le
	Összetett elrendezés kiválasztása	Egy vagy több vizsgálati kép kinyomtatása filmre vagy papírra, egyéni elrendezés szerint
	Nagyító	Egy külön ablakot nyit meg, melyben az alatta lévő kép egy részletének nagyítása látható
	Jelölésmérce	Két pont közötti távolságot méri meg
	Vizsgálatok rögzítése/feloldása	Rögzíti a vizsgálatot a helyén, hogy látható maradjon a pácienshez tartozó többi vizsgálat közötti navigálás során
	Képernyőformátum kiválasztása	Azt határozza meg, hogy a képek, sorozatok és vizsgálatok miként legyenek elrendezve oszlopokba és sorokba a Képterület monitoron
	Egész jelentés megtekintése	Megjeleníti a teljes jelentést a Jelentés panelben a Szövegterületen
	Ablak/Szint	Megváltoztatja a kép fényerejét és kontrasztját az ablak középponti és szélességi értékének módosításával, és hozzáférést biztosít az

Gomb	Megnevezés	Használat
		Ablak/Szint értékek előre beállításához
	Nagyítás	A képeket lépésenként nagyítja vagy kicsinyíti
	Nagyítás teljes képernyőre	Egyetlen képet teljes méretre nagyít