

# IMPAX 6.5.1 Gyors útmutató: Intenzív osztály

## Bejelentkezés az IMPAX rendszerre

1. Ha a bejelentkezési képernyő nem jelenik meg, az Asztalon kattintson kétszer az **IMPAX Kliens** parancsikonra.

Vagy pedig válassza ki ezeket: **Start > Programok > Agfa Impax > IMPAX Kliens**.

2. Válasszon másik klasztert vagy tartományt.
3. Az IMPAX bejelentkezési képernyőjén írja be **Felhasználói azonosítóját** és **Jelszavát**.

A jelszóban különbözőnek számítanak a kis- és nagybetűk. Ha a billentyűzeten be van kapcsolva a Caps Lock opció, akkor figyelmeztető üzenet jelenik meg, amikor a Jelszó mezőre kattint.

4. Kattintson a **Bejelentkezés** gombra.

## Páciensek keresése a Keresés funkcióval

1. A Listaterületen belül kattintson a **Keresés** sávra annak megnyitásához.
2. A Vezetéknév és Utónév mezőkbe írja be a páciens nevét.


Vagy pedig a Páciensazonosító vagy a Globális páciensazonosító mezőbe írja be a **páciensazonosítót**.

3. A Páciens jelenlegi helye listán válassza ki a **bármely** értéket.
4. Opcionálisan kiválaszthat egy keresni kívánt Dátumot is.
5. Kattintson a **Keresés** gombra.

## Vizsgálatok megnyitása a munkalistáról


1. A vizsgálatnak csak a Szövegterületen való megnyitásához kattintson a jobb egérgombbal a vizsgálatra, majd válassza ki a **Szöveg megnyitása** elemet.

vagy


A vizsgálat képeinek megnyitásához kattintson a jobb egérgombbal a kívánt vizsgálatra, majd jelölje ki a **Képek megnyitása** elemet. 

2. A vonatkozó kórelőzmények vizsgálatokkal együtt való megnyitásához kattintson a **Relevancia** elemre.

## Vizsgálat képernyő-formátumának módosítása

1. A Képterület felső eszköztárában kattintson a **Képernyő-formátum kiválasztása** elemre. 
2. A Képernyő-formátum menüben kattintson az alkalmazni kívánt elrendezésnek megfelelő gombra.


## Pontok közötti távolság mérése

1. A Képterület felső eszköztárában a Jelölés gombmenüben válassza ki a **Jelölésmérce** elemet. 
2. Kattintson a mérni kívánt terület kiindulási pontjára.
3. Kattintson a záró pontra.
4. A mérési szöveg átmozgatásához húzza át a középső vezérlőpontot az új helyre.
5. A mérés megváltoztatásához húzza át valamelyik vezérlőpontot új helyre.


6. A mérés beállításához kattintson jobb egérgombbal.

7. A mérés törléséhez nyomja meg a **Törlés** gombot.

## Kórelőzmény vizsgálatok megjelenítése a Vizsgálatok listájából

1. A Szöveges területen nyissa meg a **Radiológia** fület.
2. Jelenleg meg nem nyitott vizsgálat megjelenítéséhez kattintson egyszer a **Képek megnyitása** elemre. 

## A vizsgálat leírásának megtekintése

1. Jelenítse meg a a Szöveges területet a kívánt vizsgálatnál.
2. Ha a Szöveges területen belül a Vizsgálat panel nincs megnyitva, a megnyitáshoz kattintson a **Vizsgálat** sávra.
3. A Vizsgálati panel megnyitásához húzza át a bővíthető sávot bal oldalra vagy a Vizsgálati sávot feljebb.
4. Ha a Vizsgálati panelben felsorolt orvosok vagy a technológusok elérhetőségéről szeretne információt kapni, kattintson a **Kapcsolat** elemre. 

## Jelentés megtekintése

1. Jelenítse meg a a Szövegterületet a kívánt páciensnél/vizsgálatnál.
2. Ha a Szöveges területen belül a Jelentés panel nincs megnyitva, nyissa meg azt a **Jelentés** sávra kattintva, majd tekintse meg a jelentést.

- Ha a páciens valamely másik jelentését kívánja megtekinteni, akkor a Vizsgálatok listájában kattintson egy diktált vizsgálatra.
- A fő képek megtekintése is össze van kapcsolva a jelentéssel.
- Ha jelentések érkeznek az IMPAX RIS rendszerből, válassza ki a megfelelő jelentés nézetet.
- A fő képek nagyításához vigye a kurzort a fő kép bal széléhez, és várja meg, míg a kurzor átváltozik kettős nyíllá. Húzza ki a fő képet a kívánt méretre.
- Ha a fő képet kívánja megnyitni a Képterületen, kattintson rá kétszer, majd válassza ki a **Kijelzés** elemet.

## Gyorsbillentyűk: Listaterület



Művelet	Gomb
A Tudástár megnyitása.	F1

## Gyorsbillentyűk: Képterület

Művelet	Gomb
Navigálás a vizsgálat következő oldalára, képére vagy fülére (az Előrelépés eszköz állapotának megfelelően).	Oldal le *
Navigálás a vizsgálat előző oldalára, képére vagy fülére (az Előrelépés eszköz állapotának megfelelően).	Oldal fel *
Navigálás a cikluslista következő pácienséhez, vagy a pácienshez tartozó vizsgálat megnyitása.	Jobb nyíl
Navigálás a cikluslista előző pácienséhez, vagy a pácienshez tartozó vizsgálat megnyitása.	Bal nyíl
Navigálás a sorozat első képéhez.	Induló oldal
Navigálás előre a jelenlegi páciens következő vizsgálatához.	Felfelé nyíl

Művelet	Gomb
Navigálás vissza a jelenlegi páciens előző vizsgálatához.	Lefelé nyíl
Navigálás a sorozat utolsó képéhez.	Befejezés
Visszalépés a vezérlő-képernyőre való navigálás első keretéhez	Induló oldal
A kép felnagyítása a Nagyítás eszközön belül.	Oldal fel *
A kép kicsinyítése a Nagyítás eszközön belül.	Oldal le *
Visszatérés az eredeti nagyítási szinthez a Nagyítás eszközön belül.	Induló oldal
A Nagyító eszköz nagyítási szintjének növelése	Oldal fel **
A Nagyító eszköz nagyítási szintjének csökkentése	Oldal le **
Visszatérés a Nagyító eszköz eredeti nagyítási szintjéhez.	Induló oldal
A Testre szabás párbeszédablak megnyitása.	F12
Az IMPAX 6.5.1 Kliens Tudástár megnyitása.	F1

## Gyakori klinikai áttekintési eszközök

Gomb	Megnevezés	Használat
	Mozinéző	A sorozat képeit folyamatos hurokban vagy keretenként játssza le
	Összetett elrendezés kiválasztása	Egy vagy több vizsgálati kép kinyomtatása filmre vagy papírra, egyéni elrendezés szerint

Gomb	Megnevezés	Használat
	Nagyító	Egy külön ablakot nyit meg, melyben az alatta lévő kép egy részletének nagyítása látható
	Jelölésmérce	Két pont közötti távolságot méri meg
	Vizsgálatok rögzítése/feloldása	Rögzíti a vizsgálatot a helyén, hogy látható maradjon a pácienshez tartozó többi vizsgálat közötti navigálás során
	Képernyőformátum kiválasztása	Azt határozza meg, hogy a képek, sorozatok és vizsgálatok miként legyenek elrendezve oszlopokba és sorokba a Képterület monitoron
	Egész jelentés megtekintése	Megjeleníti a teljes jelentést a Jelentés panelben a Szövegterületen
	Ablak/Szint	Megváltoztatja a kép fényerejét és kontrasztját az ablak középponti és szélességi értékének módosításával, és hozzáférést biztosít az Ablak/Szint értékek előre beállításához
	Nagyítás	A képeket lépésenként nagyítja vagy kicsinyíti
	Nagyítás teljes képernyőre	Egyetlen képet teljes méretre nagyít