

IMPAX 6.5.1 Gyors útmutató: Ortopédia

Bejelentkezés az IMPAX rendszerre

1. Ha a bejelentkezési képernyő nem jelenik meg, az Asztalon kattintson kétszer az **IMPAX Kliens** parancsikonra.

Vagy pedig válassza ki ezeket: **Start > Programok > Agfa Impax > IMPAX Kliens**.

2. Válasszon másik klasztert vagy tartományt.
3. Az IMPAX bejelentkezési képernyőjén írja be **Felhasználói azonosítóját** és **Jelszavát**.

A jelszóban különbözőnek számítanak a kis- és nagybetűk. Ha a billentyűzeten be van kapcsolva a Caps Lock opció, akkor figyelmeztető üzenet jelenik meg, amikor a Jelszó mezőre kattint.

4. Kattintson a **Bejelentkezés** gombra.

Páciensek keresése a Keresés funkcióval

1. A Listaterületen belül kattintson a **Keresés** sávra annak megnyitásához.
2. A Vezetéknév és Utónév mezőkbe írja be a páciens nevét.


Vagy pedig a Páciensazonosító vagy a Globális páciensazonosító mezőbe írja be a **páciensazonosítót**.

3. A Páciens jelenlegi helye listán válassza ki a **bármely** értéket.
4. Opcionálisan kiválaszthat egy keresni kívánt Dátumot is.
5. Kattintson a **Keresés** gombra.

Vizsgálatok megnyitása a munkalistáról


1. A vizsgálatnak csak a Szövegterületen való megnyitásához kattintson a jobb egérgombbal a vizsgálatra, majd válassza ki a **Szöveg megnyitása** elemet.

vagy


A vizsgálat képeinek megnyitásához kattintson a jobb egérgombbal a kívánt vizsgálatra, majd jelölje ki a **Képek megnyitása** elemet. 

2. A vonatkozó kórelőzmények vizsgálatokkal együtt való megnyitásához kattintson a **Relevancia** elemre.


Képek megnyitása az Ortopéd alkalmazás ablakban

1. A Képterületen belül a **Képkijelölés** eszközzel max. 20 képet is kiválaszthat műtét előtti tervezésre.
2. Navigáljon az első olyan képhez, amelynél műtét előtti tervezésre van szükség.
3. A gyors eszköztárban vagy a felső eszköztárban kattintson a **Sablón** gombra. 
4. Kattintson egy olyan képre, amelynél szükség van műtét előtti tervezésre.

Kórelőzmény vizsgálatok megjelenítése a Vizsgálatok listájából

1. A Szöveges területen nyissa meg a **Radiológia** fület.
2. Jelenleg meg nem nyitott vizsgálat megjelenítéséhez kattintson egyszer a **Képek megnyitása** elemre. 

Kép nagyítása és pásztázása

1. A Képterület felső eszköztárában a Nagyítás menüben válassza a **Nagyítás** gombot. 
2. Kattintson a nagyítani kívánt képre.
3. Igény szerint nagyítsa vagy pásztázza a képet.

Ortopéd tervezési munka exportálása IMPAX

1. Az Ortopéd műtét előtti tervezés ablakban kattintson az **Exportálás PACS-ra** elemre.




Ortopéd implantátumok információinak áttekintése

1. A Képterület gyors vagy felső eszköztárában kattintson a **Képinformáció** elemre. 

A gyors eszköztár szöveges menü használata esetén (Ctrl + jobb egérgomb) válassza ki az **Információ > Képinformáció** elemeket.

2. Kattintson egy olyan képre, amely implantátum-adatokat tartalmaz.

Képek nyomtatása összetett elrendezéssel

1. A Képterületen jelenítse meg az összes olyan képet, melynek szerepelnie kell az Összetett elrendezési nyomtatásban.
2. A gyors eszköztárban vagy a felső eszköztárban kattintson az **Összetett elrendezés kiválasztása** gombra. 
3. A páciensnevek és a hozzáférési számok összes oldalra való kinyomtatásához az Összetett elrendezés kiválasztása párbeszédablakban jelölje be a


Szövegfejlécek megjelenítése jelölőnégyzetet.



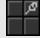

- Az oldalszámok minden oldalra való nyomtatásához jelölje be az **Oldalszámokkal együtt** jelölőnégyzetet.
- Ha papírra való nyomtatásnál takarékoskodni kíván a festékpatronnal, akkor jelölje be a **Fehér háttérű papírnyomtatás** jelölőnégyzetet.
- Az Elrendezés listában válassza ki a kívánt nyomtatási elrendezést.
- DICOM filmnyomtatóra való nyomtatás esetén a Nyomtató listáról válassza ki a kívánt nyomtatót.
- DICOM filmnyomtatóra való nyomtatás esetén az Előbeállítás listában válassza ki a kívánt nyomtatási előbeállítást.
- Keresse ki a nyomtatni kívánt képet, húzza fölé a kurzort, majd húzza át a sablon valamelyik képelemére. Ismétlje ezt meg a nyomtatásban szerepeltetni kívánt összes képre.
- Az azonnali nyomtatáshoz kattintson a **Nyomtatás** (filmnyomtatás esetén) vagy a **Papírnyomtatás** elemre.
- Papírnyomtatóra történő nyomtatás esetén a Windows Nyomtatás párbeszédablakban válassza ki a nyomtatási opciókat, majd kattintson az **OK** gombra.


Gyorsbillentyűk: Listaterület

Művelet	Gomb
A Tudástár megnyitása.	F1

Gyakori ortopéd eszközök

Gomb	Megnevezés	Használat
	Összetett elrendezés kiválasztása	Egy vagy több vizsgálati kép kinyomtatása filmre

Gomb	Megnevezés	Használat
	Ciklus	Automatikusan áthelyezi a munkalistában lévő vizsgálatokat a Képterületre
	Képinformációk	Megjeleníti a demográfiai adatokat és az ortopéd implantátum adatait, valamint lehetővé teszi az adatok nyomtatását
	Képkijelölés	Kiválasztja az Ortopédiai alkalmazásból indítandó képeket
	Vizsgálatok rögzítése/feloldása	Rögzíti a vizsgálatot a helyére, hogy látható maradjon a pácienshez tartozó többi vizsgálat közötti navigálás során
	Képernyőformátum kiválasztása	Azt határozza meg, hogy a képek, sorozatok és vizsgálatok miként legyenek elrendezve oszlopokba és sorokba a Képterület monitoron.
	Sablon	Megnyitja a képeket az Ortopéd alkalmazás ablakban
	Ablak/Szint	Megváltoztatja a kép fényerejét és kontrasztját az ablak középponti és szélességi értékének módosításával, és hozzáférést biztosít az Ablak/Szint értékek előre beállításához

Gomb	Megnevezés	Használat
	Nagyítás	A képet fokozatosan nagyítja vagy kicsinyíti

Gyorsbillentyűk: Képterület

Művelet	Gomb
Navigálás a vizsgálat következő oldalára, képére vagy fülére (az Előrelépés eszköz állapotának megfelelően).	Oldal le *
Navigálás a vizsgálat előző oldalára, képére vagy fülére (az Előrelépés eszköz állapotának megfelelően).	Oldal fel *
Navigálás a cikluslista következő pácienséhez, vagy a pácienshez tartozó vizsgálat megnyitása.	Jobb nyíl
Navigálás a cikluslista előző pácienséhez, vagy a pácienshez tartozó vizsgálat megnyitása.	Bal nyíl
Navigálás a sorozat első képéhez.	Induló oldal
Navigálás előre a jelenlegi páciens következő vizsgálatához.	Felfelé nyíl
Navigálás vissza a jelenlegi páciens előző vizsgálatához.	Lefelé nyíl
Navigálás a sorozat utolsó képéhez.	Befejezés
Visszalépés a vezérlék-szeletenként való navigálás első keretéhez	Induló oldal
A kép felnagyítása a Nagyítás eszközön belül.	Oldal fel *
A kép kicsinyítése a Nagyítás eszközön belül.	Oldal le *
Visszatérés az eredeti nagyítási szinthez a Nagyítás eszközön belül.	Induló oldal
A Nagyító eszköz nagyítási szintjének növelése	Oldal fel **

Művelet	Gomb
A Nagyító eszköz nagyítási szintjének csökkentése	Oldal le **
Visszatérés a Nagyító eszköz eredeti nagyítási szintjéhez.	Induló oldal
A Testre szabás párbeszédablak megnyitása.	F12
Az IMPAX 6.5.1 Kliens Tudástár megnyitása.	F1