

# IMPAX 6.5.1 Gyors útmutató: Radiológusok

## Bejelentkezés az IMPAX rendszerre

1. Ha a bejelentkezési képernyő nem jelenik meg, az Asztalon kattintson kétszer az **IMPAX Kliens** parancsikonra.

Vagy pedig válassza ki ezeket: **Start > Programok > Agfa Impax > IMPAX Kliens**.

2. Válasszon másik klasztert vagy tartományt.
3. Az IMPAX bejelentkezési képernyőjén írja be **Felhasználói azonosítóját** és **Jelszavát**.


A jelszóban különbözőnek számítanak a kis- és nagybetűk. Ha a billentyűzeten be van kapcsolva a Caps Lock opció, akkor figyelmeztető üzenet jelenik meg, amikor a Jelszó mezőre kattint.



4. Kattintson a **Bejelentkezés** gombra.

## Munkalisták hozzáadása a Listaterületre

1. A Listaterületen belül kattintson a **Munkalisták** elemre.
2. A munkalista melletti Aktív oszlopban jelölje be a megjeleníteni kívánt munkalisták jelölőnégyzeteit.
3. Nyomja meg az **Enter** gombot, vagy kattintson az **OK** gombra.

## Vizsgálatok pörgetése a munkalistán belül

1. Egy munkalistában lévő összes vizsgálat vagy a vizsgálatok egy csoportjának pörgetéséhez a munkalista sávban kattintson az **Automatikus pörgetés** parancsra. 
2. Egy munkalistában lévő, prioritás szerint csoportosított vizsgálatok pörgetéséhez a

- jobb egérgombbal kattintson az **Automatikus pörgetés**  parancsra, majd törölje a pipa jelet azon prioritási csoportosítási szabályok mellől, amelyek szerint nem kívánja a vizsgálatokat pörgetni. Kattintson az **Automatikus pörgetés** parancsra.
3. Meghatározott vizsgálatok pörgetéséhez válassza ki azokat, majd a jobb egérgombbal kattintson a **Hozzáadás a cikluslistához** vagy a **Ciklus** elemre.
  4. Több munkalista pörgetéséhez mindegyik munkalista sávban kattintson az **Automatikus pörgetés** parancsra. 

## Wavelet képek megtekintése

1. A Listaterület vagy a Konfigurációs terület fiókmenüjében kattintson a Felhasználói azonosító menüre. 
2. Ügyeljen arra, hogy a **Web képek megjelenítése** elem legyen kijelölve.


## A Szövegterület szinkronizálása a Képterülettel

1. A Képterület információs paneljén, a felső eszköztár fölött kattintson a vizsgálat dátuma/időpontja elemre vagy a hozzáférési számra.


## Fő képek hozzáadása egy jelentéshez

1. A Képterületen kattintson jobb egérgombbal a képre, majd várjon a gyorsmenü megjelenésére.
2. A gyorsmenüben válassza ki a **Hozzáadás fő képekhez** elemet.


## Nemrég megtekintett vizsgálat megjelenítése


1. A Képterületen a navigációs sávban kattintson az **Előzmények** elemre. 
2. Válassza ki annak a páciensnek a nevét, akiknek a vizsgálatait újra szeretné megjeleníteni.

## Páciens vizsgálatainak félreállítás



1. A Képterület bal alsó sarkában lévő ciklusszabályzó részben kattintson a **Félretesz** elemre. 

## Sorozatok manuális összekapcsolása


1. A Képterület gyors vagy felső eszköztárában kattintson jobb egérgombbal a Sorozat elemre. 
2. Az Összekapcsolási preferenciák menüben jelölje be a **Manuális összekapcsolás** jelölőnégyzetet.
3. Szinkronizálja az egyes összekapcsolandó sorozatokat: görgessen végig a képeken, amíg ugyanannak az anatómiai régióknak nem felelnek meg.
4. A sorozatok manuális összekapcsolásához kattintson bal egérgombbal a **Sorozatok összekapcsolása** elemre, majd válassza ki a kívánt sorozatot.
5. Figyelje meg a szöveg megváltozását ("Összekapcsolandó aktív sorozat" a kiemelt sorozatnál, illetve "Kattintson a bontáshoz" az összekapcsolt sorozatoknál). A bal felső sarokban megjelenő összekapcsolás ikon azt jelzi, hogy a sorozat összekapcsolása megtörtént.


- Ha az ablak/szint értékek módosítását az összes összekapcsolt sorozatra szeretné alkalmazni, engedélyezze az ablak/szint értékek módosítását az összekapcsolt sorozatokra.
- Ha a nagyítási és pásztázási műveleteket az összes összekapcsolt sorozatra szeretné alkalmazni, engedélyezze a nagyítási és pásztázási műveleteket az összekapcsolt sorozatokra.
- Az Összekapcsolódás szerkesztése mód deaktiválásához és a normál navigációhoz való visszatéréshez kattintson a **Sorozatok összekapcsolása** elemre. 

## Az automatikus kapcsolódások kiigazítása a páciens elmozdulása alapján


- A Képterület gyors vagy felső eszköztárában kattintson a bal egérgombbal a **Sorozatok összekapcsolása** elemre. 
- Kattintson a bal egérgombbal a kiigazítani kívánt sorozat képére.
- Navigáljon a sorozat azon pontjához, amely megfelel a vizsgálatban lévő többi sorozat jelenlegi helyzetének.
- A bal egérgombbal kattintson újra a képre a sorozatok újbóli összekapcsolásához.
- Az összekapcsolás módosításához jelölje be az **Igen - Összekapcsolás ezen a helyen** jelölőnégyzetet.
- A kapcsolódások kiigazításának befejezéséhez kattintson a bal egérgombbal a **Sorozatok összekapcsolása** elemre. 

## Más referenciakerethez tartozó sorozat hozzáadása egy összekapcsolási csoporthoz

- A Képterület gyors vagy felső eszköztárában kattintson bal egérgombbal a **Sorozatok összekapcsolása** elemre. 

- Kattintson bal egérgombbal az Automatikus összekapcsolási csoporthoz hozzáadni kívánt sorozatra.
- Ha befejezte az összekapcsolások módosítását, és vissza kíván térni a normál navigációhoz, kattintson bal egérgombbal a **Sorozatok összekapcsolása** elemre. 

## Ablak/szint-beállítás előre beállított értékekkel

- A Képterület felső eszköztárában kattintson jobb egérgombbal az **Ablak/Szint** gomb menüre, és válassza ki az alkalmazandó előbeállított értéket. 
- Ha olyan képernyőformátumot használ, amely egynél több sorozatot vagy vizsgálatot jelenít meg, akkor kattintson egy képre a sorozatból az előbeállítás alkalmazásához.

## Gyorsbillentyűk: Listaterület

Művelet	Gomb
A Tudástár megnyitása.	F1

## Gyorsbillentyűk: Szöveges terület

Művelet	Gomb
Oktatófájl vagy mappa másolása.	Ctrl + C
Oktatófájl vagy mappa kivágása.	Ctrl + X
Oktatófájl vagy mappa beillesztése.	Ctrl + V
Oktatófájl vagy mappa átnevezése.	F2

## Gyorsbillentyűk: Képterület

Művelet	Gomb
Navigálás a vizsgálat következő oldalára, képére vagy fülére (az Előrelépés eszköz állapotának megfelelően).	Oldal le *

Művelet	Gomb
Navigálás a vizsgálat előző oldalára, képére vagy fülére (az Előrelépés eszköz állapotának megfelelően).	Oldal fel *
Navigálás a cikluslista következő pácienséhez, vagy a pácienshez tartozó vizsgálat megnyitása.	Jobb nyíl
Navigálás a cikluslista előző pácienséhez, vagy a pácienshez tartozó vizsgálat megnyitása.	Bal nyíl
Navigálás a sorozat első képéhez.	Induló oldal
Navigálás előre a jelenlegi páciens következő vizsgálatához.	Felfelé nyíl
Navigálás vissza a jelenlegi páciens előző vizsgálatához.	Lefelé nyíl
Navigálás a sorozat utolsó képéhez.	Befejezés
Visszalépés a vezérlék-szeletenként való navigálás első keretéhez	Induló oldal
A kép felnagyítása a Nagyítás eszközön belül.	Oldal fel *
A kép kicsinyítése a Nagyítás eszközön belül.	Oldal le *
Visszatérés az eredeti nagyítási szinthez a Nagyítás eszközön belül.	Induló oldal
A Nagyító eszköz nagyítási szintjének növelése	Oldal fel **
A Nagyító eszköz nagyítási szintjének csökkentése	Oldal le **
Visszatérés a Nagyító eszköz eredeti nagyítási szintjéhez.	Induló oldal
A Testre szabás párbeszédablak megnyitása.	F12
Az IMPAX 6.5.1 Kliens Tudástár megnyitása.	F1

## Gyakori radiológiai eszközök

Gomb	Megnevezés	Használat
	Mozinéző	A sorozatok képeit folyamatos ismétlésként vagy képkeretenként játssza le
	Ciklus	A munkalistában lévő vizsgálatokat automatikusan átviszi a Képterületre
	Diktálás	Megkezdi a diktálást egy adott vizsgálathoz
	Több vizsgálat diktálása	Megkezdi a diktálást két vagy több vizsgálathoz
	Inverz	Felcseréli a kép fekete és fehér területeit
	Megjegyzés jelölés	A képhez szabadformátumú jelölő szöveget visz be
	Nyíl jelölés	A célterületekre mutató jelölő nyilat helyez el
	Jelölésmérce	A két pont közötti távolságot méri meg
	Kötet nézet	Elindít egy sorozatot a Kötet nézet ablakban MIP, MPR és - ha a licenc engedi - 3D elemzésre
	Ablak/Szint	Megváltoztatja a kép fényerejét és kontrasztját az ablak középponti és szélességi értékének módosításával, és hozzáférést biztosít az Ablak/Szint értékek előre beállításához
	Nagyítás	A képeket lépésenként nagyítja vagy kicsinyíti