

# IMPAX 6.5.1 Guida rapida: PS

## Accesso a IMPAX

1. Se sul desktop non viene visualizzata la schermata di accesso, fare doppio clic sulla scelta rapida **IMPAX Client**.

Oppure selezionare **Start > Tutti i programmi > Agfa IMPAX > IMPAX Client**.


2. Selezionare un cluster o un dominio differente.
3. Nella schermata di accesso a IMPAX digitare il proprio **ID utente** e la propria **Password**.  
La password distingue tra maiuscole e minuscole. Se sulla tastiera è abilitato Bloc Maiusc, facendo clic nel campo Password compare un messaggio di avvertimento.
4. Fare clic su **Accesso**.

## Ricerca dei pazienti tramite Ricerca

1. Nell'area Elenco, fare clic sulla barra **Ricerca** per espanderla.
2. Nel campo Cognome, Nome, digitare il nome del paziente.  
Oppure, nel campo ID paziente o ID paziente globale, digitare l'**ID paziente**.
3. Dall'elenco Posizione paziente attuale, selezionare **qualsiasi**.
4. In alternativa, scegliere una Data da ricercare.
5. Fare clic su **Ricerca**.



## Apertura degli studi da una lista di lavoro

1. Per aprire lo studio solo nell'Area di testo, fare clic con il tasto destro sullo studio e selezionare **Apri testo**.  
oppure

Per aprire le immagini dello studio, fare clic col pulsante destro sullo studio e selezionare **Apri immagini**. 

2. Per aprire i precedenti importanti con gli studi, fare clic su **Importanza**.

## Esplorazione dei referti precedenti dalla Lista di studio

1. Visualizzare l'Area di testo per il paziente di interesse.
2. Se nell'Area di testo la Lista di studio è nascosta, fare clic sulla freccia della barra espandibile. 
3. Se la Lista di studio studi è contratta, fare clic sulla barra **Lista di studio** per espanderla.
4. Se necessario, passare alla scheda **Radiologia**.
5. Per visualizzare un referto collegato a un precedente, fare clic una sola volta su un punto qualsiasi nella riga precedente.
6. Per chiudere le immagini dello studio ma lasciare a disposizione il testo associato nell'Area di testo, fare clic su **Immagini visualizzate**. 

## Aggiunta di commenti allo studio come testo libero

1. Visualizzare l'Area di testo per lo studio di interesse.
2. Scorrere fino al riquadro **Referto**.
3. Se non è visibile, passare alla scheda **Commenti allo studio**.
4. Nella casella di testo, digitare un commento.
5. Per rendere riservato un commento allo studio, fare clic su **Rendi riservato**.

6. Fare clic su **Salva**.

## Inserimento di commenti allo studio preferiti in base al tipo di modalità

1. Visualizzare l'Area di testo per lo studio di interesse.
2. Scorrere fino a riquadro **Referto**.
3. Se non è visibile, passare alla scheda **Commenti allo studio**.
4. Fare clic su **Commenti preferiti allo studio**.
5. Nella finestra di dialogo Commenti preferiti allo studio, dall'elenco Commenti preferiti allo studio, selezionare una modalità (per vedere i commenti disponibili per una specifica modalità) oppure selezionare **Tutti** (per vedere i commenti disponibili per tutte le modalità).
6. Selezionare il commento da inserire (utilizzare i tasti **Maiusc** o **Ctrl** per selezionare più commenti preferiti).
7. Fare clic su **OK**.

## Visualizzazione di un referto

1. Visualizzare l'Area di testo per il paziente/studio di interesse.
2. Nell'area di testo, se il riquadro Referto è chiuso, fare clic sulla barra **Referto** per espanderla e visualizzare il referto.
3. Per visualizzare un altro referto per il paziente, fare clic su uno studio dettato nella Lista di studio.
4. Inoltre visualizzare le eventuali immagini chiave associate al referto.
5. Se i referti provengono dal RIS IMPAX, selezionare la visualizzazione appropriata del referto.

- Per ingrandire le immagini chiave, passare il mouse sul lato sinistro dell'immagine chiave fino a quando il puntatore si trasforma in una doppia freccia. Trascinare le immagini chiave fino a ottenere la dimensione richiesta.
- Per aprire l'immagine chiave nell'Area immagine, fare clic con il tasto destro e selezionare **Visualizza**.

### Scelte rapide da tastiera: Area dell'elenco

Per	Premere
Aprire la base di conoscenza.	F1






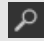

### Scelte rapide da tastiera: Area immagini

Per	Premere
Scorrere in avanti alla pagina, immagine o scheda successiva nello studio (a seconda dello stato dello strumento Avanzamento per).	Pggiù *
Scorrere indietro alla pagina, immagine o scheda precedente nello studio (a seconda dello stato dello strumento Avanzamento per).	Pgsu *
Scorrere in avanti al paziente successivo nell'elenco oppure allo studio successivo del paziente aperto.	Freccia destra
Scorrere indietro al paziente precedente nell'elenco oppure allo studio precedente del paziente aperto.	Freccia sinistra
Spostarsi sulla prima immagine della serie.	Pagina iniziale
Scorrere in avanti allo studio successivo per il paziente corrente.	Freccia su

Per	Premere
Scorrere indietro allo studio precedente per il paziente corrente.	Freccia giù
Spostarsi sull'ultima immagine della serie.	Fine
Tornare al primo fotogramma durante lo spostamento tra le fette scout.	Pagina iniziale
Ingrandire l'immagine con lo strumento Zoom.	Pgsu *
Ridurre l'immagine con lo strumento Zoom.	Pggiù *
Ritornare all'ingrandimento originale con lo strumento Zoom.	Pagina iniziale
Incrementare l'ingrandimento dello strumento Lente d'ingrandimento.	Pgsu **
Ridurre l'ingrandimento dello strumento Lente d'ingrandimento.	Pggiù **
Ritornare all'ingrandimento originale dello strumento Lente d'ingrandimento.	Pagina iniziale
Aprire la finestra di dialogo Personalizza.	F12
Aprire la IMPAX 6.5.1 Client6.4	F1

### Strumenti comuni di revisione clinica

Pulsante	Nome	Uso
	Visualizzatore Cine	Esegue le immagini delle serie in un ciclo continuo o fotogramma per fotogramma
	Scelta layout combinato	Stampa uno o più immagini dello studio su pellicola o carta con layout personalizzato
	Lente d'ingrandimento	Apri una finestra separata che ingrandisce la sezione dell'immagine sottostante

Pulsante	Nome	Uso
	Marcatura calibro	Misura la distanza tra due punti
	Affissa/Non affissa Studi	Fissa uno studio in posizione e lo mantiene visibile durante gli spostamenti tra altri studi del paziente.
	Selezione di un formato schermo	Definisce in modo in cui immagini, serie e studi vengono organizzati in colonne e righe su un monitor con l'Area immagine
	Visualizza l'intero referto	Visualizza l'intero referto nel riquadro Referti dell'Area di testo
	Window/Level	Modifica la luminosità e il contrasto dell'immagine regolando i relativi valori e permette di accedere a valori preimpostati
	Zoom	Ingrandisce o riduce le immagini per incrementi
	Zoom a schermo intero	Ingrandisce una singola immagine a schermo intero