

IMPAX 6.5.1 Guida rapida: Radiologi

Accesso a IMPAX

1. Se sul desktop non viene visualizzata la schermata di accesso, fare doppio clic sulla scelta rapida **IMPAX Client**.

Oppure selezionare **Start > Tutti i programmi > Agfa IMPAX > IMPAX Client**.

2. Selezionare un cluster o un dominio differente.
3. Nella schermata di accesso a IMPAX digitare il proprio **ID utente** e la propria **Password**.



La password distingue tra maiuscole e minuscole. Se sulla tastiera è abilitato Bloc Maiusc, facendo clic nel campo Password compare un messaggio di avvertimento.

4. Fare clic su **Accesso**.


Aggiunta di liste di lavoro all'Area dell'elenco

1. Nell'Area dell'elenco, fare clic su **Liste di lavoro**.
2. Nella colonna Attiva accanto alla lista di lavoro, selezionare la casella di controllo per ciascuna lista di lavoro che si desidera visualizzare.
3. Premere **Invio** o fare clic su **OK**.


Scorrimento ciclico degli studi in un elenco di lavoro

1. Per scorrere ciclicamente tutti gli studi o gruppi di studi in un elenco di lavoro, fare clic su **Ciclo automatico** nella barra dell'elenco di lavoro. 
2. Per scorrere ciclicamente gli studi raggruppati in base alla priorità in un elenco di lavoro, fare clic con il tasto destro su **Ciclo automatico**  nella barra dell'elenco

di lavoro ed eliminare il segno di spunta accanto a ciascuna regola di raggruppamento in base alla priorità che si vuole escludere dallo scorrimento ciclico degli studi. Fare clic su **Ciclo automatico**.

3. Per scorrere ciclicamente studi specifici, selezionarli e fare clic con il tasto destro su **Aggiungi a Elenco cicli** o su **Ciclo**.
4. Per scorrere ciclicamente elenchi di lavoro multipli, in ciascuna barra dell'elenco di lavoro, fare clic su **Ciclo automatico**. 

Visualizzazione delle immagini wavelet

1. Dal cassetto area Elenco o dell'area Configurazione, fare clic sul menu ID utente. 
2. Verificare che **Mostra immagini web** sia selezionato.


Sincronizzazione dell'Area di testo con l'Area immagine

1. Nel riquadro delle informazioni sullo studio nell'Area immagine, sopra la barra degli strumenti in alto, fare clic sulla data/ora dello studio o sul numero di accettazione.

Aggiunta di immagini chiave a un referto


1. Nell'Area immagine, fare clic con il tasto destro su un'immagine e fare comparire un menu contestualizzato.
2. Dal menu contestualizzato selezionare **Aggiungi a immagini chiave**.

Visualizzazione di uno studio visualizzato di recente


1. Nell'Area immagine, dalla barra di navigazione fare clic su **Cronologia**. 


2. Selezionare il nome del paziente per il quale si desidera visualizzare nuovamente gli studi.

Spostamento degli studi di un paziente



1. Accanto al comando per il ciclo in basso a sinistra dell'area Immagine, fare clic su **Sposta**. 

Collegamento manuale delle serie



1. Dalla barra degli strumenti in alto o dalla barra degli strumenti contestualizzata dell'Area immagine, fare clic con il tasto destro su **Collega serie**. 
2. Sul menu Preferenza collegamento, selezionare la casella di controllo **Collegamento manuale**.
3. Sincronizzare ciascuna serie da collegare scorrendo attraverso le immagini fino a quando non corrispondono alla stessa regione anatomica.
4. Per collegare insieme le serie manualmente, fare clic con il tasto sinistro su **Collega serie** e selezionare le serie necessarie.
5. Notare che il testo si modifica ("Serie attiva per il collegamento" per la serie evidenziata e "Fare clic per scollegare" per una serie collegata) e che nell'angolo in alto a sinistra compare un'icona di collegamento che indica che la serie è stata collegata.
6. Perché le modifiche alle impostazioni del livello di luminosità si applichino a tutte le serie collegate, abilitare le impostazioni del livello di luminosità a tutte le serie collegate.
7. Perché zoom e panoramica si applichino a tutte le serie collegate, abilitare zoom e panoramica a tutte le serie collegate.

- Per disattivare la modalità Modifica collegamento e tornare alla navigazione regolare, fare clic su **Collega serie**. 


Correzione dei collegamenti automatici per il movimento del paziente.

- Dalla barra degli strumenti in alto o dalla barra degli strumenti contestualizzata dell'Area immagine, fare clic su **Collega serie**. 
- Fare clic con il tasto sinistro sull'immagine della serie che si desidera correggere.
- Spostarsi nella posizione della serie che corrisponde alla posizione corrente delle altre serie nello studio.
- Fare nuovamente clic con il tasto sinistro sull'immagine per riattivare il collegamento con la serie.
- Per effettuare la modifica al collegamento, selezionare la casella di controllo **Si**, **effettuare il collegamento a questa nuova posizione**.
- Per indicare la conclusione della correzione dei collegamenti, fare clic con il tasto sinistro su **Collega serie**. 

Aggiunta di una serie con un diverso fotogramma di riferimento a un gruppo di collegamento.

- Dalla barra degli strumenti in alto o dalla barra degli strumenti contestualizzata dell'Area immagine, fare clic su **Collega serie**. 
- Fare clic con il tasto sinistro sulla serie che si desidera aggiungere al gruppo Collegamento automatico.
- Per indicare la conclusione della modifica dei collegamenti e il ritorno alla navigazione regolare, fare clic con il tasto sinistro su **Collega serie**. 

Impostazione Window/Level mediante valori preimpostati

- Dalla barra degli strumenti in alto nell'Area immagine, fare clic con il tasto destro sul pulsante **Window/Level** e selezionare il valore preimpostato da applicare. 
- Se si utilizza un formato schermo che visualizza più di una serie o studio, fare clic su un'immagine della serie a cui applicare la preimpostazione.

Scelte rapide da tastiera: Area dell'elenco

Per	Premere
Aprire la base di conoscenza.	F1

Scelte rapide da tastiera: Area di testo

Per	Premere
Copiare un teaching file o una cartella.	Ctrl + C
Tagliare un teaching file o una cartella.	Ctrl + X
Incollare un teaching file o una cartella.	Ctrl + V
Rinominare un teaching file o una cartella.	F2

Scelte rapide da tastiera: Area immagini

Per	Premere
Scorrere in avanti alla pagina, immagine o scheda successiva nello studio (a seconda dello stato dello strumento Avanzamento per).	Pggiù *
Scorrere indietro alla pagina, immagine o scheda precedente nello studio (a	Pgsu *

Per	Premere
seconda dello stato dello strumento Avanzamento per).	
Scorrere in avanti al paziente successivo nell'elenco oppure allo studio successivo del paziente aperto.	Freccia destra
Scorrere indietro al paziente precedente nell'elenco oppure allo studio precedente del paziente aperto.	Freccia sinistra
Spostarsi sulla prima immagine della serie.	Pagina iniziale
Scorrere in avanti allo studio successivo per il paziente corrente.	Freccia su
Scorrere indietro allo studio precedente per il paziente corrente.	Freccia giù
Spostarsi sull'ultima immagine della serie.	Fine
Tornare al primo fotogramma durante lo spostamento tra le fette scout.	Pagina iniziale
Ingrandire l'immagine con lo strumento Zoom.	Pgsu *
Ridurre l'immagine con lo strumento Zoom.	Pggiù *
Ritornare all'ingrandimento originale con lo strumento Zoom.	Pagina iniziale
Incrementare l'ingrandimento dello strumento Lente d'ingrandimento.	Pgsu **
Ridurre l'ingrandimento dello strumento Lente d'ingrandimento.	Pggiù **
Ritornare all'ingrandimento originale dello strumento Lente d'ingrandimento.	Pagina iniziale
Aprire la finestra di dialogo Personalizza.	F12
Aprire la IMPAX 6.5.1 Client6.4	F1

Strumenti comuni di radiologia

Pulsante	Nome	Uso
	Visualizzatore Cine	Riproduce le immagini delle serie in un ciclo continuo o fotogramma per fotogramma
	Ciclo	Sposta automaticamente gli studi di una lista di lavoro nell'Area immagine
	Dettato	Avvia la dettatura per un singolo studio
	Dettato - Studi multipli	Avvia la dettatura per due o più studi
	Inverti	Inverte le aree bianco e nero in un'immagine
	Annotazione marcatura	Aggiunge testo libero di marcatura a un'immagine
	Marcatura Freccia	Posiziona una freccia di marcatura per indicare le aree di interesse
	Marcatura calibro	Misura la distanza tra due punti
	Volume Viewing	Lancia una serie nella finestra Volume Viewing per l'analisi MIP, MPR e (se si dispone di licenza) 3D
	Window/Level	Modifica la luminosità e il contrasto dell'immagine regolando i relativi valori e permette di accedere a valori preimpostati
	Zoom	Ingrandisce o riduce le immagini per incrementi