

IMPAX 6.5.1 Quick Reference: Clinici

Aanmelden in IMPAX

1. Als het aanmeldscherm niet verschijnt, dubbelklikt u op het bureaublad op de **IMPAX Client** snelkoppeling.

Of selecteer **Start > Alle programma's > Agfa IMPAX > IMPAX Client**.

2. Selecteer een andere cluster of domein.
3. Typ uw **Gebruikers-ID** en uw **Wachtwoord** op het aanmeldscherm van IMPAX.

Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Als Caps Lock op uw toetsenbord is ingeschakeld, zal er een waarschuwingsbericht weergegeven worden als u in het veld Wachtwoord klikt.

4. Klik op **Aanmelden**.

Zoeken naar patiënten


1. Klik in de Lijstzone op de werkbalk **Zoeken** om deze uit te klappen.
2. Typ de naam van de patiënt in de velden Achternaam en/of Voornaam.

Of typ de **id van de patiënt** in de velden Patiënt-id of Algemene patiënt-id in.

3. Selecteer **Alles** in de lijst Huidige patiëntlocatie.
4. Optioneel kunt u ook nog een Datum kiezen om op te zoeken.
5. Klik op **Zoeken**.

Studies openen vanuit een werkljst

1. Om de studie alleen in de Tekstzone te openen klikt u met de rechtermuisknop op de studie en selecteert u **Tekst openen**.
of

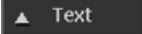

Om de studiebeelden te openen klikt u met de rechtermuisknop op de studie en selecteert u **Beelden openen**. 

2. Om relevante voorafgaande onderzoeken samen met studies te openen klikt u op **Relevantie**.

Het studie-schermformaat wijzigen


1. Klik op **Schermformaat selecteren** in de bovenste werkbalk in de Beeldzone. 
2. Klik op de knop van het toe te passen formaat in het menu Schermformaat.

De Tekstzone weergeven

1. Klik op **Tekst** in de werkbalk bovenaan in de Beeldzone. 
2. Klik op **Tekst** in de Tekstzone. 

Eerdere verslagen uit de Studielijst doorbladeren

1. Geef de Tekstzone weer voor de betrokken patiënt.
2. Als de Studielijst verborgen is in de Tekstzone, klikt u op de pijl van de uitklapbare werkbalk. 
3. Als de Studielijst ingeklapt is, kunt u op de werkbalk **Studielijst** klikken om deze uit te klappen.
4. Schakel indien nodig om naar het tabblad **Radiologie**.
5. Klik eenmaal ergens in de voorafgaande rij om een verslag over een voorafgaand onderzoek weer te geven.
6. Klik op **Beelden worden weergegeven** om de beelden van de studie te sluiten maar

de overeenkomstige tekst beschikbaar te houden in de Tekstzone. 

Een verslag weergeven

1. Geef de Tekstzone weer voor de desbetreffende patiënt/studie.
2. Indien het paneel Verslagen van de Tekstzone is samengevouwen, klikt u op de **Verslag**-balk om het uit te vouwen en het verslag te bekijken.
3. Klik op een gedichteerde studie in de Studielijst om een ander verslag voor deze patiënt te bekijken.
4. U kunt ook belangrijkste beelden bekijken die aan het verslag gekoppeld zijn.
5. Als de verslagen van de IMPAX RIS komen, selecteert u de geschikte weergave van het verslag.
6. Als u belangrijke beelden wilt vergroten, moet u de muisaanwijzer over de linkerkant van het belangrijke beeld houden tot deze verandert in een dubbele pijl. Nu kunt u het beeld slepen tot het de gewenste grootte heeft.
7. Om het belangrijke beeld in de Beeldzone te openen, klikt u erop met de rechtermuisknop en selecteert u **Weergeven**.

Belangrijke beelden bekijken in de Tekstzone

1. Als het verslag ingeklapt is, kunt u het in de Tekstzone openen door te klikken op de **Verslag**-balk.
2. Als de zone Belangrijke beelden ingeklapt is, klikt u op de pijl van de uitklapbare werkbalk  of klikt u op **Belangrijke beelden**. 

- Om een belangrijk beeld groter te maken, sleept u de uitklapbare balk met Belangrijke beelden tot het gewenste formaat.
- Als u de studie waaruit het belangrijke beeld komt wilt openen in de Beeldzone, moet u dubbelklikken op het belangrijke beeld of er met de rechtermuisknop op klikken en de optie **Weergeven** selecteren.

Sneltoetsen: Lijstzone



Om	Druk op
De Kennisbank openen.	F1



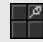



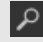

Sneltoetsen: Beeldzone

Om	Druk op
Voorwaarts navigeren naar de volgende pagina, het volgende beeld of het volgende tabblad in de studie (afhankelijk van de toestand van de functie 'Vooruitgaan per').	Page Down *
Achterwaarts navigeren naar de vorige pagina, het vorige beeld of het vorige tabblad in de studie (afhankelijk van de toestand van de functie 'Vooruitgaan per').	Page Up *
Voorwaarts navigeren naar de volgende patiënt in de cycluslijst of de volgende open patiëntstudie.	Pijl naar rechts
Achterwaarts navigeren naar de vorige patiënt in de cycluslijst of de vorige open patiëntstudie.	Pijl naar links
Navigeren naar het eerste beeld van de reeks.	Home
Voorwaarts navigeren naar de volgende studie voor de huidige patiënt.	Pijl omhoog

Om	Druk op
Achterwaarts navigeren naar de vorige studie voor de huidige patiënt.	Pijl omlaag
Navigeren naar het laatste beeld van de reeks.	Einde
Teruggaan naar het eerste frame tijdens het navigeren op scanogram-snedes.	Startpositie
Een beeld vergroten met de Zoom-functie.	Page Up *
Een beeld verkleinen met de Zoom-functie.	Page Down *
Terugkeren naar de oorspronkelijke vergroting in de Zoom-functie.	Startpositie
De vergroting van de functie Vergrootglas verhogen.	Page Up **
De vergroting van de functie Vergrootglas verlagen.	Page Down **
Terugkeren naar de oorspronkelijke vergroting in de functie Vergrootglas.	Home
Het dialoogvenster Aanpassen openen.	F12
Open de IMPAX 6.5.1 Client Kennisdatabank.	F1

Algemene functies voor klinische beoordeling

Knop	Naam	Gebruik
	"Cine"-viewer	Speelt reeksen als doorlopende film af, of beeld per beeld
	Keuze Samengestelde Lay-out	Drukt een of meerdere studiebeelden af op film of papier in een aangepaste lay-out

Knop	Naam	Gebruik
	Vergrootglas	Opent een afzonderlijk venster dat het onderliggende deel van het beeld vergroot
	Schuifmaat-markeringen	Meet de afstand tussen twee punten
	Studies vastzetten op het scherm/vastzetten ongedaan maken	Zet een studie vast op haar plaats en zorgt ervoor dat ze zichtbaar blijft terwijl u door andere studies voor de patiënt navigeert
	Schermformaat selecteren	Definieert hoe beelden, reeksen, en studies op een Beeldzonemonitor worden geschikt in kolommen en rijen
	Volledig verslag weergeven	Toont het volledige verslag in het Verslag-paneel van de Tekstzone
	Contrast/helderheid	Wijzigt helderheid en contrast van het beeld door de waarden voor venstermidden en vensterbreedte aan te passen en geeft toegang tot de vooraf ingestelde contrast/helderheid-waarden
	Zoomen	Vergroot of verkleint beelden in stappen
	Zoomen tot volledig scherm	Vergroot één enkel beeld tot de volledige schermgrootte