

IMPAX 6.5.1 Quick Reference: IC


Aanmelden in IMPAX

1. Als het aanmeldscrem niet verschijnt, dubbelklikt u op het bureaublad op de **IMPAX Client** snelkoppeling.
Of selecteer **Start > Alle programma's > Agfa IMPAX > IMPAX Client**.
2. Selecteer een andere cluster of domein.
3. Typ uw **Gebruikers-ID** en uw **Wachtwoord** op het aanmeldscrem van IMPAX.
Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Als Caps Lock op uw toetsenbord is ingeschakeld, zal er een waarschuwingsbericht weergegeven worden als u in het veld Wachtwoord klikt.
4. Klik op **Aanmelden**.

Zoeken naar patiënten

1. Klik in de Lijstzone op de werkbalk **Zoeken** om deze uit te klappen.
2. Typ de naam van de patiënt in de velden Achternaam en/of Voornaam.
Of typ de **id van de patiënt** in de velden Patiënt-id of Algemene patiënt-id in.
3. Selecteer **Alles** in de lijst Huidige patiëntlocatie.
4. Optioneel kunt u ook nog een Datum kiezen om op te zoeken.
5. Klik op **Zoeken**.

Studies openen vanuit een werkljst

1. Om de studie alleen in de Tekstzone te openen klikt u met de rechtermuisknop op de studie en selecteert u **Tekst openen**.
of
Om de studiebeelden te openen klikt u met de rechtermuisknop op de studie en selecteert u **Beelden openen**. 
2. Om relevante voorafgaande onderzoeken samen met studies te openen klikt u op **Relevantie**.


Het studie-schermformaat wijzigen

1. Klik op **Schermformaat selecteren** in de bovenste werkbalk in de Beeldzone. 
2. Klik op de knop van het toe te passen formaat in het menu Schermformaat.

De afstand tussen punten meten

1. Selecteer **Markering Schuifmaat** in de werkbalk bovenaan in de Beeldzone, knopmenu Markeren. 
2. Klik op het beginpunt van het te meten gebied.
3. Klik op het eindpunt.
4. Versleep het middelste bewerkingspunt naar een nieuwe positie om de tekst van de meting te verplaatsen.
5. Om de meting te veranderen, sleept u één van de eindpunten naar een nieuwe positie.
6. Klik met de rechtermuisknop om de meting in te stellen.
7. Om de meting te verwijderen drukt u op de knop **Verwijderen**.

Voorafgaande studies uit de Studielijst weergeven

1. Ga in de Tekstzone naar het tabblad **Radiologie**.
2. Klik op **Beelden openen** om een studie weer te geven die op dit moment niet geopend is. 

De studiebeschrijving bekijken

1. Geef de Tekstzone weer voor de belangwekkende studie.
2. Als het Studiepaneel ingeklapt is in de Tekstzone, klikt u op de werkbalk **Studie** om dit uit te klappen.
3. Versleep de uitklapbare werkbalk naar links of de Studiebalk naar boven om het paneel Studie uit te klappen.
4. Klik op **Contactgegevens** voor de contactgegevens van een arts of technicus die vermeld staan in het paneel Studie. 

Een verslag weergeven

1. Geef de Tekstzone weer voor de desbetreffende patiënt/studie.
2. Indien het paneel Verslagen van de Tekstzone is samengevouwen, klikt u op de **Verslag**-balk om het uit te vouwen en het verslag te bekijken.
3. Klik op een gedicteerde studie in de Studielijst om een ander verslag voor deze patiënt te bekijken.
4. U kunt ook belangrijkste beelden bekijken die aan het verslag gekoppeld zijn.
5. Als de verslagen van de IMPAX RIS komen, selecteert u de geschikte weergave van het verslag.

6. Als u belangrijke beelden wilt vergroten, moet u de muisaanwijzer over de linkerkant van het belangrijke beeld houden tot deze verandert in een dubbele pijl. Nu kunt u het beeld slepen tot het de gewenste grootte heeft.
7. Om het belangrijke beeld in de Beeldzone te openen, klikt u erop met de rechtermuisknop en selecteert u **Weergeven**.

Sneltoetsen: Lijstzone



Om	Druk op
De Kennisbank openen.	F1



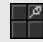



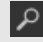

Sneltoetsen: Beeldzone

Om	Druk op
Voorwaarts navigeren naar de volgende pagina, het volgende beeld of het volgende tabblad in de studie (afhankelijk van de toestand van de functie 'Vooruitgaan per').	Page Down *
Achterwaarts navigeren naar de vorige pagina, het vorige beeld of het vorige tabblad in de studie (afhankelijk van de toestand van de functie 'Vooruitgaan per').	Page Up *
Voorwaarts navigeren naar de volgende patiënt in de cycluslijst of de volgende open patiëntstudie.	Pijl naar rechts
Achterwaarts navigeren naar de vorige patiënt in de cycluslijst of de vorige open patiëntstudie.	Pijl naar links
Navigeren naar het eerste beeld van de reeks.	Home
Voorwaarts navigeren naar de volgende studie voor de huidige patiënt.	Pijl omhoog

Om	Druk op
Achterwaarts navigeren naar de vorige studie voor de huidige patiënt.	Pijl omlaag
Navigeren naar het laatste beeld van de reeks.	Einde
Teruggaan naar het eerste frame tijdens het navigeren op scanogram-snedes.	Startpositie
Een beeld vergroten met de Zoom-functie.	Page Up *
Een beeld verkleinen met de Zoom-functie.	Page Down *
Terugkeren naar de oorspronkelijke vergroting in de Zoom-functie.	Startpositie
De vergroting van de functie Vergrootglas verhogen.	Page Up **
De vergroting van de functie Vergrootglas verlagen.	Page Down **
Terugkeren naar de oorspronkelijke vergroting in de functie Vergrootglas.	Home
Het dialoogvenster Aanpassen openen.	F12
Open de IMPAX 6.5.1 Client Kennisdatabank.	F1

Algemene functies voor klinische beoordeling

Knop	Naam	Gebruik
	"Cine"-viewer	Speelt reeksen als doorlopende film af, of beeld per beeld
	Keuze Samengestelde Lay-out	Drukt een of meerdere studiebeelden af op film of papier in een aangepaste lay-out

Knop	Naam	Gebruik
	Vergrootglas	Opent een afzonderlijk venster dat het onderliggende deel van het beeld vergroot
	Schuifmaat-markeringen	Meet de afstand tussen twee punten
	Studies vastzetten op het scherm/vastzetten ongedaan maken	Zet een studie vast op haar plaats en zorgt ervoor dat ze zichtbaar blijft terwijl u door andere studies voor de patiënt navigeert
	Schermformaat selecteren	Definieert hoe beelden, reeksen, en studies op een Beeldzonemonitor worden geschikt in kolommen en rijen
	Volledig verslag weergeven	Toont het volledige verslag in het Verslag-paneel van de Tekstzone
	Contrast/helderheid	Wijzigt helderheid en contrast van het beeld door de waarden voor venstermidden en vensterbreedte aan te passen en geeft toegang tot de vooraf ingestelde contrast/helderheid-waarden
	Zoomen	Vergroot of verkleint beelden in stappen
	Zoomen tot volledig scherm	Vergroot één enkel beeld tot de volledige schermgrootte