

# IMPAX 6.5.1 Quick Reference: Orthopedie

## Aanmelden in IMPAX

1. Als het aanmeldscrem niet verschijnt, dubbelklikt u op het bureaublad op de **IMPAX Client** snelkoppeling.

Of selecteer **Start > Alle programma's > Agfa IMPAX > IMPAX Client**.

2. Selecteer een andere cluster of domein.
3. Typ uw **Gebruikers-ID** en uw **Wachtwoord** op het aanmeldscrem van IMPAX.

Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Als Caps Lock op uw toetsenbord is ingeschakeld, zal er een waarschuwingsbericht weergegeven worden als u in het veld Wachtwoord klikt.

4. Klik op **Aanmelden**.

## Zoeken naar patiënten

1. Klik in de Lijstzone op de werkbalk **Zoeken** om deze uit te klappen.

2. Typ de naam van de patiënt in de velden Achternaam en/of Voornaam.


Of typ de **id van de patiënt** in de velden Patiënt-id of Algemene patiënt-id in.

3. Selecteer **Alles** in de lijst Huidige patiëntlocatie.
4. Optioneel kunt u ook nog een Datum kiezen om op te zoeken.
5. Klik op **Zoeken**.

## Studies openen vanuit een werkljst

1. Om de studie alleen in de Tekstzone te openen klikt u met de rechtermuisknop op de studie en selecteert u **Tekst openen**.

of


Om de studiebeelden te openen klikt u met de rechtermuisknop op de studie en selecteert u **Beelden openen**. 

2. Om relevante voorafgaande onderzoeken samen met studies te openen klikt u op **Relevantie**.


## Beelden openen in het venster Orthopedische toepassing

1. Optioneel kunt u in de Beeldzone de functie **Beelden selecteren** gebruiken om tot 20 beelden te selecteren voor preoperatieve planning.
2. Navigeer naar het eerste beeld waarop u de preoperatieve planning wilt uitvoeren.
3. Klik in de contextwerkbalk of de bovenste werkbalk op **Sjabloon**. 
4. Klik op een beeld waarop u preoperatieve planning wilt uitvoeren.


## Voorafgaande studies uit de Studielijst weergeven

1. Ga in de Tekstzone naar het tabblad **Radiologie**.
2. Klik op **Beelden openen** om een studie weer te geven die op dit moment niet geopend is. 

## Zoomen en Pannen van een beeld

1. Selecteer **Zoomen** in de werkbalk bovenaan in de Beeldzone, knopmenu Zoomen. 
2. Klik op het beeld waarop ingezoomd moet worden.
3. Zoom in op het beeld of pan het zoals vereist.

## Orthopedisch planningswerk exporteren naar IMPAX

1. Klik in het venster Orthopedische preoperatieve planning op **Exporteren naar PACS**. 


## Orthopedische implantaatinformatie bekijken

1. Klik op **Beeldinformatie** in de contextwerkbalk of de bovenste werkbalk in de Beeldzone. 

Of selecteer Informatie > **Service-venster** indien u **het tekstmenu van de contextwerkbalk** gebruikt (Ctrl + rechtsklik).

2. Klik op een beeld dat implantaatgegevens bevat.

## Beelden afdrukken met behulp van een samengestelde lay-out




1. Eerst moet u in de Beeldzone alle beelden weergeven die moeten worden opgenomen in de afdruk met de samengestelde lay-out.
2. Klik in de contextwerkbalk of de werkbalk bovenaan op **Keuze Samengestelde lay-out**. 
3. Om op alle pagina's patiëntnamen en toegangsnummers af te drukken, vinkt u in het dialoogvenster Keuze Samengestelde Lay-out het vakje **Kopteksten weergeven** aan.
4. Om op alle pagina's paginanummers af te drukken, vinkt u het vakje **Paginanummer opnemen** aan.
5. Om toner te besparen bij het afdrukken, kunt u het vakje **Gebruik witte achtergrond voor afdruk op papier** aanvinken.

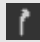
6. Selecteer de te gebruiken afdruklay-out in de lijst Lay-out.
7. Wanneer u gaat afdrukken via een DICOM-filmprinter, selecteert u in de lijst Printers, de printer die u wilt gebruiken.
8. Wanneer u gaat afdrukken via een DICOM-filmprinter, selecteert u in de lijst Voorinstellingen, de afdrukvoorinstellingen die u wilt gebruiken.
9. Navigeer naar een beeld dat u wilt afdrukken, plaats de muiscursor erop en sleep het in een beeldelement van het sjabloon. Herhaal deze bewerking voor alle beelden die u mee wilt afdrukken.
10. Om onmiddellijk af te drukken, klikt u op **Afdrukken** (voor een filmprinter) of **Afdrukken op papier**.
11. Als u gaat afdrukken op papier, selecteert u in het dialoogvenster Afdrukken in Windows 'afdrukopties' en klikt u op **OK**.

## Sneltoetsen: Lijstzone

Om	Druk op
De Kennisbank openen.	F1

## Algemene orthopedische functies

Knop	Naam	Gebruik
	Keuze Samengestelde Lay-out	Drukt een of meerdere studiebeelden af op film of papier in een aangepaste lay-out
	Cyclus	Verplaatst studies in een werkljst automatisch naar de Beeldzone
	Beeldinformatie	Toont demografische info en orthopedische implantaatgegevens en

Knop	Naam	Gebruik
		staat u toe om de informatie af te drukken
	Beelden selecteren	Selecteert beelden die worden geopend in de Orthopedische toepassing
	Studies vastzetten op het scherm/vastzetten ongedaan maken	Zet een studie vast op haar plaats en zorgt ervoor dat ze zichtbaar blijft terwijl u door andere studies voor de patiënt navigeert
	Schermformaat selecteren	Definieert hoe beelden, reeksen studies op een Beeldzonemonitor worden geschikt in kolommen en rijen
	Sjabloon	Opent beelden in het venster Orthopedische toepassing
	Contrast/helderheid	Wijzigt helderheid en contrast van het beeld door de waarden voor venstermidden en vensterbreedte aan te passen en geeft toegang tot de vooraf ingestelde contrast/helderheid-waarden
	Zoomen	Vergroot of verkleint beelden in stappen

## Sneltoetsen: Beeldzone

Om	Druk op
Voorwaarts navigeren naar de volgende pagina, het volgende beeld of het volgende tabblad in de studie (afhankelijk	Page Down *

Om	Druk op
van de toestand van de functie 'Vooruitgaan per').	
Achterwaarts navigeren naar de vorige pagina, het vorige beeld of het vorige tabblad in de studie (afhankelijk van de toestand van de functie 'Vooruitgaan per').	Page Up *
Voorwaarts navigeren naar de volgende patiënt in de cycluslijst of de volgende open patiëntstudie.	Pijl naar rechts
Achterwaarts navigeren naar de vorige patiënt in de cycluslijst of de vorige open patiëntstudie.	Pijl naar links
Navigeren naar het eerste beeld van de reeks.	Home
Voorwaarts navigeren naar de volgende studie voor de huidige patiënt.	Pijl omhoog
Achterwaarts navigeren naar de vorige studie voor de huidige patiënt.	Pijl omlaag
Navigeren naar het laatste beeld van de reeks.	Einde
Teruggaan naar het eerste frame tijdens het navigeren op scanogram-snedes.	Startpositie
Een beeld vergroten met de Zoom-functie.	Page Up *
Een beeld verkleinen met de Zoom-functie.	Page Down *
Terugkeren naar de oorspronkelijke vergroting in de Zoom-functie.	Startpositie
De vergroting van de functie Vergrootglas verhogen.	Page Up **
De vergroting van de functie Vergrootglas verlagen.	Page Down **

Om	Druk op
Terugkeren naar de oorspronkelijke vergroting in de functie Vergrootglas.	Home
Het dialoogvenster Aanpassen openen.	F12
Open de IMPAX 6.5.1 Client Kennisdatabank.	F1