

IMPAX 6.5.1 Quick Reference: Radiologen

Aanmelden in IMPAX

1. Als het aanmeldscrem niet verschijnt, dubbelklikt u op het bureaublad op de **IMPAX Client** snelkoppeling.

Of selecteer **Start > Alle programma's > Agfa IMPAX > IMPAX Client**.

2. Selecteer een andere cluster of domein.
3. Typ uw **Gebruikers-ID** en uw **Wachtwoord** op het aanmeldscrem van IMPAX.

Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Als Caps Lock op uw toetsenbord is ingeschakeld, zal er een waarschuwingsbericht weergegeven worden als u in het veld Wachtwoord klikt.


4. Klik op **Aanmelden**.

Werklijsten toevoegen aan de Lijstzone


1. Klik in de Lijstzone op **Werklijsten**.
2. In de kolom Actief naast de werkljst selecteert u het vakje voor elke werkljst die u wilt weergeven.
3. Druk op **Enter** of klik op **OK**.

Studies in een werkljst doorlopen

1. Om alle studies of groepen van studies in een werkljst te doorlopen, klikt u in de werkljstbalk op **Automatische Cyclus**. 
2. Om studies met prioriteitengroepen in een werkljst te doorlopen, klikt u met de rechtermuisknop in de werkljstbalk op **Automatische cyclus**  en vinkt u het vakje af naast elke regel voor prioriteitengroepen waarvoor u geen studies wilt doorlopen. Klik op **Automatische cyclus**.

3. Om specifieke studies te doorlopen, selecteert u ze en klikt u met de rechtermuisknop op **Toevoegen aan Cycluslijst** of op **Cyclus**.
4. Om verschillende werkljsten te doorlopen, klikt u in iedere werkljstbalk op **Automatische cyclus**. 

Wavelet-beelden weergeven

1. Klik op het menu Gebruikers-id in het menupaneel Lijst of Configuratiezone. 
2. Zorg ervoor dat **Web-beelden tonen** geselecteerd is.

Tekstzone synchroniseren met de Beeldzone

1. Klik in het paneel studie-informatie in de Beeldzone, boven de bovenste werkbalk, op de datum/tijd of het toegangsnummer van de studie.

Belangrijkste beelden toevoegen aan een verslag

1. Klik met de rechtermuisknop in de Beeldzone op een beeld tot er een contextmenu verschijnt.
2. Selecteer **Toevoegen aan Belangrijkste beelden** in het contextmenu.

Een onlangs bekeken studie weergeven


1. Klik in de Beeldzone op de navigatiebalk op **Geschiedenis**. 
2. Selecteer de naam van de patiënt van wie u de studies opnieuw wilt weergeven.

Studies van een patiënt apart houden

1. Klik op **Apart houden** naast de cyclusbediening linksonderaan in de Beeldzone. 

Reeksen handmatig koppelen


1. Klik met de rechtermuisknop op Reeksen koppelen in de contextwerkbalk of de werkbalk bovenaan in de Beeldzone. 
2. Selecteer het keuzevakje **Handmatig koppelen** in het menu Koppelingsvoorkeuren.
3. Synchroniseer elke reeks die gekoppeld moet worden door te bladeren door de beelden tot zij overeenkomen met hetzelfde anatomische gebied.
4. Om reeksen handmatig te koppelen klikt u met de linkermuisknop op **Reeksen koppelen** en selecteert u de gewenste reeksen.
5. Merk op dat de tekst verandert ('Actieve reeks om te koppelen' voor de gemarkeerde reeksen en 'Klik om te ontkoppelen' voor een gekoppelde reeks) en dat er een koppelpictogram in de rechterbovenhoek verschijnt waarmee aangegeven wordt dat de reeks gekoppeld is.
6. Als u wilt dat veranderingen van helderheid en contrast toegepast worden op alle gekoppelde reeksen, schakelt u helderheid en contrast in gekoppelde reeksen in.
7. Als u wilt dat zoomen en pannen toegepast worden op alle gekoppelde reeksen, schakelt u zoomen en pannen in gekoppelde reeksen in.
8. Om de modus Koppeling bewerken te deactiveren en om terug te keren naar

normale navigatie, klikt u op **Reeksen koppelen**. 

Automatische koppelingen aanpassen aan patiëntbeweging


1. Klik in de contextwerkbalk of de bovenste werkbalk in de Beeldzone met de linkermuisknop op **Studies koppelen**. 
2. Klik met de linkermuisknop op het beeld van de reeks dat u wilt aanpassen.
3. Ga naar de locatie in de reeks die overeenstemt met de huidige locatie van de andere reeks in de studie.
4. Klik opnieuw met de linkermuisknop op het beeld om de reeks opnieuw te koppelen.
5. Om de koppeling te wijzigen selecteert u het vakje **Ja - koppelen op deze nieuwe positie**.
6. Klik met de linkermuisknop op **Reeks koppelen** om aan te geven dat u klaar bent met het aanpassen van de koppelingen. 

Een reeks met een ander referentiekader toevoegen aan een automatische koppelgroep.

1. Klik met de linkermuisknop op **Reeksen koppelen** in de contextwerkbalk of de werkbalk bovenaan in de Beeldzone. 
2. Klik met de linkermuisknop op de reeks die u wilt toevoegen aan de Automatische koppelgroep.
3. Om aan te geven dat u klaar bent met het aanpassen van koppelingen en dat u wilt terugkeren naar de normale navigatie, klikt u met de linkermuisknop op **Reeksen koppelen**. 

Contrast/helderheid volgens vooraf ingestelde waarden

1. Klik in de werkbalk bovenaan in de Beeldzone met de rechtermuisknop op het

knopmenu **Contrast/helderheid** en selecteer de toe te passen vooraf ingestelde waarde. 

2. Als u een schermformaat gebruikt dat meer dan één reeks of studie weergeeft, klikt u op een beeld van de reeks waarop de voorinstellingen toegepast moeten worden.

Sneltoetsen: Lijstzone

Om	Druk op
De Kennisbank openen.	F1

Sneltoetsen: Tekstzone

Om	Druk op
Didactische bestanden of mappen kopiëren.	Ctrl + c
Didactische bestanden of mappen knippen.	Ctrl + x
Didactische bestanden of mappen plakken.	Ctrl + v
Didactische bestanden of mappen hernoemen.	F2

Sneltoetsen: Beeldzone

Om	Druk op
Voorwaarts navigeren naar de volgende pagina, het volgende beeld of het volgende tabblad in de studie (afhankelijk van de toestand van de functie 'Vooruitgaan per').	Page Down *
Achterwaarts navigeren naar de vorige pagina, het vorige beeld of het vorige tabblad in de studie (afhankelijk van de toestand van de functie 'Vooruitgaan per').	Page Up *

Om	Druk op
Voorwaarts navigeren naar de volgende patiënt in de cycluslijst of de volgende open patiëntstudie.	Pijl naar rechts
Achterwaarts navigeren naar de vorige patiënt in de cycluslijst of de vorige open patiëntstudie.	Pijl naar links
Navigeren naar het eerste beeld van de reeks.	Home
Voorwaarts navigeren naar de volgende studie voor de huidige patiënt.	Pijl omhoog
Achterwaarts navigeren naar de vorige studie voor de huidige patiënt.	Pijl omlaag
Navigeren naar het laatste beeld van de reeks.	Einde
Teruggaan naar het eerste frame tijdens het navigeren op scanogram-snedes.	Startpositie
Een beeld vergroten met de Zoom-functie.	Page Up *
Een beeld verkleinen met de Zoom-functie.	Page Down *
Terugkeren naar de oorspronkelijke vergroting in de Zoom-functie.	Startpositie
De vergroting van de functie Vergrootglas verhogen.	Page Up **
De vergroting van de functie Vergrootglas verlagen.	Page Down **
Terugkeren naar de oorspronkelijke vergroting in de functie Vergrootglas.	Home
Het dialoogvenster Aanpassen openen.	F12
Open de IMPAX 6.5.1 Client Kennisdatbank.	F1

Algemene radiologiefuncties

Knop	Naam	Gebruik
	"Cine"-viewer	Speelt reeksen als doorlopende film af, of beeld per beeld
	Cyclus	Verplaatst studies in een werkljst automatisch naar de Beeldzone
	Dicteren	Start het dicteren voor een afzonderlijke studie
	Dicteren - Meerdere studies	Start het dicteren voor twee of meer studies
	Inverteren	Wisselt de witte en de zwarte zones in een beeld om
	Markering annotatie	Voegt een vrije-vormtekstmarkering toe aan een beeld
	Pijl markeren	Plaats een markeringspijl om een belangstellingsgebied aan te duiden
	Markeringen - 'schuifmaat'	Meet de afstand tussen twee punten
	Volume Viewing	Start een reeks in het Volume Viewing-venster voor MIP, MPR en (indien opgenomen in de licentie) 3D-analyse
	Contrast/helderheid	Wijzigt helderheid en contrast van het beeld door de waarden voor venstermidden en vensterbreedte aan te passen en geeft toegang tot

Knop	Naam	Gebruik
		de vooraf ingestelde contrast/helderheid-waarden
	Zoomen	Vergroot of verkleint beelden in stappen