


IMPAX 6.5.1 Quick Reference: IMPAX RIS voor beheerders


De IMPAX RIS Client configureren

1. Stel de parameter TEXTAREA.DISABLE_ONLINE in op **1**.
2. Stel de parameter SPEECH.INSTALLED in op **1**.
3. Stel de andere IMPAX RIS-parameters in zoals gewenst.

IMPAX RIS-gebruikers toewijzen aan IMPAX-gebruikers

1. Selecteer in het **Configuratie**-menupaneel  **Gebruikers en Rollen**.
2. Selecteer een gebruiker in het navigatiedeelvenster.
3. Klap in het deelvenster Details de balk **Gebruiker** uit.
4. Ga naar het tabblad **Toewijzing**.
5. Typ de IMPAX RIS gebruikers-ID in het veld **Agfa RIS Gebruikers-ID**.
6. Klik op **Toepassen**.


Dicteertoestemmingen in IMPAX definiëren voor IMPAX Reporting

1. Selecteer in het **Configuratie**-menupaneel  **Gebruikers en Rollen**.
2. Selecteer in het navigatiedeelvenster de rol die u wilt configureren.
3. In het deelvenster Details moet u de **Toestemmingen**-balk uitklappen.
4. Selecteer het tabblad **Studiegebonden**.
5. Selecteer onder Voor toestemming, een toestemming uit de lijst.
6. Selecteer **PACSCient** uit de lijst Operaties toewijzen.

7. Selecteer onder Operaties welke toestemmingen er aan de studie toegewezen moeten worden.

Studies dicteren als radioloog of **Studies dicteren als arts-in-opleiding** moet geselecteerd zijn om de gebruiker in staat te stellen een nieuw verslag te beginnen op de IMPAX Client.

Stations configureren om gegevens op te halen van het IMPAX RIS en IMPAX-databases

1. Selecteer in het **Configuratie**-menupaneel  **Stations**.
2. Sleep alle stations in de stationscontainer **Internet** naar de stationscontainer **IMPAX RIS**.
3. Selecteer de stationscontainer **IMPAX RIS**.
4. Ga naar het tabblad **Servicetoegang**.
5. Verwijder **mvf** van de gekoppelde Webservice URL's.

Bepalen wat er weergegeven moet worden in de Tekstzone bij het openen van een studie

1. Selecteer **Voorkeuren** in het **Configuratie**-menupaneel .
2. Selecteer in de Configuratiezone, in het navigatiedeelvenster, de gebruiker of de rol.
3. In het deelvenster Details moet u de **Tekstzone**-balk uitklappen.
4. Schakel over naar het tabblad **Gedrag**.
5. Selecteer onder **Studie heeft een verslag** wat er in de Tekstzone weergegeven moet worden bij het openen van een studie die een verslag heeft.

6. Als u de optie **Verslag tonen** selecteert, moet u specificeren welk verslagtype standaard moet worden weergegeven.
7. Selecteer onder *Studie heeft geen verslag* wat er in de Tekstzone weergegeven moet worden bij het openen van een studie die geen verslag heeft.
8. Als **Scan tonen** of **Q en A tonen** geselecteerd werd in stappen 5 en/of 7, selecteer dan onder *Als er geen scan of Q en A beschikbaar is* wat getoond moet worden in de Tekstzone wanneer een studie zonder scan of Q en A wordt geopend.
9. Als u zich in de Configuratiezone bevindt, worden alle wijzigingen automatisch opgeslagen wanneer u van context wisselt.

IMPAX Reporting voor dicteren selecteren

1. Selecteer **Voorkeuren** in het **Configuratie**-menupaneel .
2. Selecteer in de Configuratiezone, in het navigatiedeelvenster, de gebruiker of de rol.
3. Klap in het deelvenster Details de balk **Tekstzone** uit.
4. Selecteer **IMPAX Reporting** (voor IMPAX Reporting) op het tabblad Rapportage.
5. Typ de naam van de **-database in het veld** DatabaseIMPAX RIS.
6. Selecteer IMPAX ReportingVerslagen/dictaten creëren met IMPAX Reporting **om** en ingebedde spraakintegratie te gebruiken.
7. Als de IMPAX Reporting-optie geselecteerd is, selecteert u **SpeechMagic InterActive gebruiken voor online spraakherkenning** als u de Nuance

SpeechMagic InterActive wilt gebruiken voor online spraakherkenning.

- Als u zich in de Configuratiezone bevindt, worden alle wijzigingen automatisch opgeslagen wanneer u van context wisselt.

Regellocatie addendum en status in bestaande verslagen specificeren

- Selecteer **Voorkeuren** in het **Configuratie**-menupaneel .
- Selecteer in de Configuratiezone, in het navigatiedeelvenster, de gebruiker of de rol.
- In het deelvenster Details moet u de **Tekstzone**-balk uitklappen.
- Schakel over naar het tabblad **Configuratie-opties**.
- Bepaal waar een nieuw addendum aan een bestaand verslag wordt toegevoegd.
- Bepaal waar de statusregel van het addendum ingevoegd wordt.
- Als u zich in de Configuratiezone bevindt, worden alle wijzigingen automatisch opgeslagen wanneer u van context wisselt.

Configuratie-opties bepalen voor IMPAX Reporting

- Selecteer **Voorkeuren** in het **Configuratie**-menupaneel .

Of klik in de balk van de Lijst- of Configuratiezone op het menu Gebruikers-ID  en selecteer **Voorkeuren**..

- Selecteer in de Configuratiezone, in het navigatiedeelvenster, de gebruiker of de rol.
- Klap in het deelvenster Details de balk Tekstzone uit.
- Ga naar het tabblad **Configuratie-opties**.
- Kies een van de volgende opties om de weergavemodus voor Microsoft Word te bepalen in het Verslagpaneel:

- Om het veld radioloog in te vullen met de gebruikersnaam voor aanmelden wanneer u een nieuw verslag creëert, vinkt u het vakje **Gebruiker toewijzen aan studie/studies bij aanmaken van nieuw verslag** aan.
- Om automatisch eventuele opmerkingen bij het verslag weer te geven wanneer een gebruiker een verslag bekijkt, vinkt u het vakje **Opmerking bij verslag automatisch weergeven indien aanwezig** aan.
- Om het paneel met standaardteksten weer te geven, vinkt u het vakje **Paneel met standaardteksten weergeven** aan.
- Als u zich in de Configuratiezone bevindt, worden alle wijzigingen automatisch opgeslagen wanneer u van context wisselt. Of klik op **OK** als u zich in de dialoog Voorkeuren bevindt.

Controleren van de installatie en configuratie voor IMPAX Reporting

- Open een studie.
- In het deelvenster Details moet u de Tekstzone uitklappen.
- Om het Service-venster te openen klikt u in het paneel Verslag op **Service-venster**. .
- Controleer of alle items in het Service-venster gemarkeerd zijn met een **V**.

Aanmaken van aftekenwerklijsten

- Klik in de Lijstzone op **Werklijsten**.
- Klik op **Nieuw** in de Werklijstbibliotheek, onder Standaardwerklijsten.
- Typ een naam die het doel van de werkljst beschrijft in het veld **Naam werkljst**.
- Selecteer uit de lijst **Type werkljst Aftekenwerklijsten**.

- Activeer het tabblad **Organisatie** en selecteer een locatie voor de werkljst in de rol hiërarchie.
- Activeer het tabblad **Artsen** en selecteer de radioloog of radiologen die deze werkljst zal/zullen gebruiken voor het aftekenen van verslagen (gebruik hiervoor de toetsen **Shift** en **Crtl**).
- Klik op **OK**.

Aanmaken van proxy-aftekenwerklijsten

- Klik in de Lijstzone op **Werklijsten**.
- Klik op **Nieuw** in de Werklijstbibliotheek, onder Standaardwerklijsten.
- Typ een naam die het doel van de werkljst beschrijft in het veld **Naam werkljst**.
- Selecteer uit de lijst **Type werkljst Aftekenwerklijsten**.
- Activeer het tabblad **Organisatie** en selecteer een locatie voor de werkljst in de rol hiërarchie.
- Activeer het tabblad **Artsen** en selecteer het keuzevakje **Proxy Signoff**.
- Selecteer de radioloog op wie de proxy-aftekenwerklijst van toepassing is.
- Klik op **OK**.

Een knop aangevulde werkljsten toevoegen aan de Lijstzone

- Klik in de Lijstzone met de rechtermuisknop op de werkbalk Wizard en selecteer **Nieuw**.
- Typ de naam voor de nieuwe wizard aanvullen in het veld **Wizardnaam** in het dialoogvenster Wizards.
- Typ de tekst die moet verschijnen op de wizardknop in het veld **Weergegeven tekst**.
- Typ de uitleg die moet verschijnen wanneer iemand met de muiscursor over de wizardknop gaat in het veld **Functie info**.

5. Typ (of kopieer en plak vanuit het voorbeeldscript) het uit te voeren script in het veld **Script**.
6. Klik op **Testen** om zeker te zijn dat het script goed geschreven is.
7. Klik op **OK** wanneer u klaar bent.