

IMPAX 6.5.1 Quick Reference: Zoeken

Zoeken naar studies

1. Klik in de Lijstzone op de werkbalk **Zoeken** om deze uit te klappen.
2. Om aanvullende velden met zoekcriteria weer te geven klikt u met de rechtermuisknop om toegang te krijgen tot de dialoog Configuratie.
3. Als u de zoekopdracht meer specifiek wilt maken, moet u de zoekopties typen of selecteren.
4. Om deze resultaten toe te voegen aan de resultaten van een vorige zoekopdracht, kunt u optioneel het selectievakje **Resultaten toevoegen aan vorige zoekopdracht** selecteren.
5. Indien gewenst selecteert u een andere locatie waar gezocht moet worden.
6. Klik op **Zoeken**.

Zoeken naar patiënten

1. Klik in de Lijstzone op de werkbalk **Zoeken** om deze uit te klappen.
2. Typ de naam van de patiënt in de velden Achternaam en/of Voornaam.
Of typ de **id van de patiënt** in de velden Patiënt-id of Algemene patiënt-id in.
3. Selecteer **Alles** in de lijst Huidige patiëntlocatie.
4. Optioneel kunt u ook nog een Datum kiezen om op te zoeken.
5. Klik op **Zoeken**.

Een datum selecteren om te doorzoeken

1. Selecteer uit de lijst met datumvoorwaarden **In de afgelopen** of **Ouder dan**.

2. Typ of selecteer een getal in het dialoogvenster Zoeken.
3. Klik op de eenhedenknop om te schakelen tussen **Uren, Dagen, Weken, Maanden** of **Jaren**.
4. Klik op **OK**.

Zoeken naar studies op specifieke datums

1. Selecteer in Zoeken of Geavanceerd zoeken **Elke datum, Vandaag** of **Gisteren** uit de lijst met datumvoorwaarden.
of
Selecteer **Exacte match**. Klik op de lijstpijl in het dialoogvenster Zoeken. Navigeer naar de gewenste datum in de Kalender en klik erop. Klik op **OK**.

Zoeken binnen een bepaalde periode


1. Selecteer **Tussen** in de lijst van datumvoorwaarden.
2. Selecteer de lijst **Van** in het dialoogvenster Zoeken en klik in de Kalender op de gewenste datum.
3. Selecteer de lijst **Tot** en klik in de Kalender op de gewenste datum.
4. Klik op **OK**.

Zoekresultaten toevoegen aan vorige zoekopdracht

1. Typ of selecteer de zoekopties om de zoekopdracht te beperken.
2. Klik op **Zoeken**.
3. Wijzig de zoekopties indien nodig.
4. Selecteer het vakje **Resultaten toevoegen aan vorige zoekopdracht** in de Zoekzone.

5. Klik opnieuw op **Zoeken**.

Zoekopdracht configureren

1. Klik met de rechtermuisknop op de kolomkoppen in de Zoekresultaten.
2. Klik met de rechtermuisknop op de kolomkop om het palet Aanpassen weer te geven.
3. Indien nodig kunt u kolommen toevoegen of verwijderen.
4. Indien nodig kunt u de kolommen herschikken.
5. Vink het vakje **Auto-aanpassen** af om het automatisch aanpassen van de kolommen uit te schakelen.
6. Sluit het dialoogvenster Aanpassen wanneer u klaar bent. 

Zoektips

- Gebruik het jokerteken * (asterisk) in de zoektermen om de kans te vergroten dat de correcte resultaten worden gevonden. Als u bijvoorbeeld 4*3 invult in het veld Patiënt-id, krijgt u alle patiënten waarvan de id begint met een 4 en die ook een 3 bevatten. Het jokerteken mag in het begin of in het midden van de zoekterm staan. De Zoekopdracht plaatst automatisch een asterisk aan het eind van de zoekcriteria.
- Uw systeembeheerder stelt het maximale aantal studies in dat weergegeven wordt. Als het aantal gevonden studies (zoals aangegeven wordt in de Zoekbalk) groter is dan dat aantal, verfijn dan de zoekcriteria en zoek nogmaals.
- Zoekopdrachten zonder criteria zijn niet toegelaten. Als u **Onbepaalde datum** selecteert voor de Studiedatum, moet u ook

een ander specifiek criterium selecteren om op te zoeken.

- Als u complexere zoekopdrachten nodig hebt, moet u contact opnemen met uw PACS-beheerder om toegang te vragen tot de functie Geavanceerd zoeken.
- De opdracht kan handmatig gezocht worden door met de linkermuisknop te klikken op de link **Andere studies zoeken** in de Studielijst.

Zoekopties

Criteria	Beschrijving
Toegangsnummer	Typ het toegangsnummer in voor een met de betreffende patiënt geassocieerde studie.
Lichaamsdeel	Selecteer het deel van het lichaam waar de studie werd gemaakt of selecteer Alles .
Opmerkingen bevat	Typ een willekeurig deel van de studie-opmerkingen in. In het dialoogvenster Configuratie wordt deze optie aangegeven als Studie-opmerkingen.
Huidige patiëntlocatie	Typ of selecteer de huidige locatie van de patiënt of selecteer Bewerken... als u het dialoogvenster Favoriete zoekcriteria selecteren wilt openen. Selecteer de huidige patiëntlocatie in de lijst en klik op OK .
Afdeling	Typ of selecteer de afdeling waar de studie werd uitgevoerd of selecteer ... (ellips) als u het dialoogvenster Favoriete zoekcriteria selecteren wilt openen. Selecteer de afdeling in de lijst en klik op OK .
Beschrijving bevat	Typ een deel van de studiebeschrijving in. In het dialoogvenster Configuratie wordt deze optie aangegeven als Studiebeschrijving.
Algemene patiënt-id	Typ (een deel van) de Algemene patiënt-id in. Een patiënt kan op de verschillende informatiesystemen in de organisatie verschillende

Criteria	Beschrijving
	patiënt-id's hebben. Als identificatie die nooit verandert en nooit voor andere patiënten wordt gebruikt, vormt de Algemene patiënt-id de verbinding tussen deze verschillende patiënt-id's.
Instelling	Selecteer de naam van de instelling waar de studie werd uitgevoerd of selecteer ... als u het dialoogvenster Favorieten wilt openen. Selecteer de instelling in de lijst en klik op OK .
Titel belangrijk beeld	Typ of selecteer in de lijst een documenttitel voor een Belangrijk beeld waaronder de belangrijke beelden zitten.
Trefwoorden	Typ of selecteer in de lijst een met de studie geassocieerd trefwoord.
Modaliteit	Selecteer een modaliteitstype dat u wilt zoeken of selecteer Alles . In een configuratie met verschillende IMPAX-clusters, waarin het IMPAX Data Center als het centrale archief fungeert, mag Modaliteit niet als een zoekoptie worden gebruikt.
Bediener	Typ (een deel van) de naam van de bediener die de studie heeft uitgevoerd.
Overige patiënt-id's	Typ (een deel van) een alternatieve patiënt-id in.
Leeftijd patiënt	Selecteer de leeftijd van de patiënt op het ogenblik van de acquisitie van de studie. Specificeer de parameters in het dialoogvenster Criteria en klik op OK . Als u wilt omschakelen tussen: Uren, Dagen, Weken, Maanden en Jaren moet u klikken op de knop Eenheden . In het dialoogvenster Configuratie wordt deze optie aangegeven als Leeftijd patiënt bij acquisitie.
Geboortedatum patiënt	Typ of selecteer een datum uit de kalender waarbinnen gezocht moet worden of selecteer Onbepaalde datum . Tekst die met rood gemarkeerd is, geeft een ongeldige datumopmaak aan. Merk op dat als u 'Onbepaalde datum' selecteert, u ook een ander criterium moet selecteren om op te zoeken.

Criteria	Beschrijving
	Zoekopdrachten zonder criteria zijn niet toegestaan.
Voorgeschiedenis patiënt bevat	Typ (een deel van) de informatie van de voorgeschiedenis van de patiënt in. In het dialoogvenster Configuratie wordt deze optie aangegeven als Aanvullende voorgeschiedenis patiënt.
Patiënt-id	Typ de patiënt-id in.
Familienaam, voornaam patiënt	Typ (een deel van) de naam van de patiënt in. In het dialoogvenster Configuratie wordt deze optie aangegeven als Naam patiënt.
Geslacht patiënt	Alles, mannelijk, vrouwelijk, overig (onbekend)
Uitvoerende arts	Typ of selecteer (een deel van) de naam van de uitvoerende arts of selecteer ... (ellips) als u het dialoogvenster Favoriete zoekcriteria selecteren wilt openen. Selecteer de uitvoerende arts in de lijst en klik op OK .
Procedurecode bevat	Typ (een deel van) de 'aangevraagde procedure'-tekst in. In het dialoogvenster Configuratie wordt deze optie aangegeven als Aangevraagde procedure.
Radioloog	Typ of selecteer (een deel van) de naam van de radioloog die de studie heeft gedicteerd of selecteer ... om het dialoogvenster Favoriete zoekcriteria selecteren te openen. Selecteer de radioloog in de lijst en klik op OK .
Doorverwijzende arts	Typ of selecteer (een deel van) de naam van de doorverwijzende arts of selecteer ... om het dialoogvenster Favoriete zoekcriteria selecteren te openen. Selecteer de doorverwijzende arts in de lijst en klik op OK .
Aanvragende arts	Typ of selecteer (een deel van) de naam van de aanvragende arts of selecteer ... om het dialoogvenster Favoriete zoekcriteria selecteren te openen. Selecteer de aanvragende arts in de lijst en klik op OK .

Criteria	Beschrijving
Aanvragende dienst	Typ (een deel van) de naam van de afdeling die de studie heeft aangevraagd.
Specialiteit	<p>Selecteer een specialiteit van de lijst, zoals Hoofd, Thorax, Romp, Neuro, enzovoort.</p> <p>In een configuratie met verschillende IMPAX-clusters, waarin het IMPAX Data Center als het centrale archief fungeert, mag Specialiteit niet als een zoekoptie worden gebruikt.</p>
Status	<p>Selecteer de status van de studie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle • nieuw • stagedictaat gestart • stagedictaat af • dicteren gestart • gedictieerd • gerapporteerd • goedgekeurd <p>In een configuratie met verschillende IMPAX-clusters, waarin het IMPAX Data Center als het centrale archief fungeert, mag Status niet als een zoekoptie gebruikt worden.</p>
Studiedatum	<p>Selecteer een datum waarbinnen u wilt zoeken of selecteer Alles. Als u Alles selecteert, moet u ook een ander specifiek criterium selecteren om op te zoeken. Zoekopdrachten zonder criteria zijn niet toegestaan.</p> <p>Het zoekcriterium Alles wordt tussen log-ins voor dezelfde gebruiker niet bewaard, omdat het mogelijk tot teveel zoekresultaten kan leiden. Als u Alles selecteert, verschijnt als u de volgende keer inlogt, de standaardwaarde voor Studiedatum.</p>
Bezoeknummer bevat	Typ (een deel van) het afdelingsbezoeknummer, waarmee studies worden gelokaliseerd op basis

Criteria	Beschrijving
	<p>van het aantal keren dat de patiënt de afdeling heeft bezocht, waarbij ook de huidige studie wordt meegeteld.</p> <p>In het dialoogvenster Configuratie wordt deze optie aangegeven als Afdelingsbezoeknummer.</p>