

IMPAX 6.5.1 Hurtigreferanse: Klinikere

Logge på IMPAX

1. Hvis påloggingsskjermbildet ikke vises, dobbeltklikker du på snarveien for **IMPAX-klienten** på skrivebordet.

Du kan også velge **Start > Alle programmer > Agfa IMPAX > IMPAX-klient**.

2. Velg en annen klynge eller et annet domene.
3. Skriv inn **bruker-ID** og **passord** i påloggingsskjermbildet til IMPAX.
Du må skille mellom små og store bokstaver i passordet. Hvis Caps Lock er aktivert på tastaturet, vises det en advarsel når du klikker i passordfeltet.
4. Klikk **Pålogging**.

Finne pasienter med Søk

1. Klikk **Søk**-linjen i listeområdet for å utvide linjen.
2. Skriv inn navnet på pasienten i feltet Pasientens etternavn, fornavn.
Eller skriv inn **pasient-IDen** i feltet Pasient-ID eller Global pasient-ID.
3. Velg **alle** fra Gjeldende pasientplassering-listen.
4. Du kan eventuelt også velge en verdi i Dato å søke etter.
5. Klikk på **Søk**.

Åpne undersøkelser fra en arbeidsliste


1. Hvis du bare vil åpne undersøkelsen i tekstområdet, høyreklikker du på undersøkelsen og velger **Åpne tekst**.
eller

Høyreklikk undersøkelsen, og velg Åpne bilder for å **åpne bildene i undersøkelsen**.



2. Klikk **Relevansfor å åpne relevante tidligere undersøkelser**.



Endre skjermformatet for studien

1. Klikk på **Velg skjermformat** på hovedverktøylinjen i bildeområdet. 
2. Klikk på knappen for formatet som skal brukes, på skjermformatmenyen.

Vise tekstområdet

1. Klikk på **Tekst** på hovedverktøylinjen i bildeområdet. 
2. Klikk på **Tekst** i tekstområdet. 



Bla gjennom tidligere rapporter fra undersøkelseslisten

1. Vis tekstområdet for den aktuelle pasienten.
2. Hvis undersøkelseslisten er skjult i tekstområdet, klikker du på pilen på linjen for å utvide linjen. 
3. Hvis undersøkelseslisten er trukket sammen, klikker du på **Undersøkelsesliste**-linjen for å utvide den.
4. Bytt om nødvendig til **Radiologi**-kategorien.
5. Klikk én gang et sted på raden med den tidligere undersøkelsen for å vise rapporten som er relatert til den.
6. Hvis du vil lukke bildene i undersøkelsen, men la den tilknyttede teksten være tilgjengelig i tekstområdet, klikker du på **Bilder blir vist**. 

Vise en rapport

1. Vis tekstområdet for den aktuelle pasienten/studien.
2. Hvis rapportpanelet er trukket sammen i tekstområdet, klikker du på **rapport**linjen for å utvide den og vise rapporten.
3. Hvis du vil vise en annen rapport for denne pasienten, klikker du på en diktert undersøkelse i undersøkelseslisten.
4. Du kan også vise eventuelle nøkkelbilder som er tilordnet rapporten.
5. Hvis beskrivelsene kommer fra IMPAX RIS, må du velge den riktige beskrivelsesvisningen:
6. Hvis du vil forstørre nøkkelbilder, fører du pekeren over venstre side av nøkkelbildet slik at den endres til en dobbeltpil. Dra deretter bildet til ønsket størrelse.
7. Hvis du vil åpne nøkkelbildet i bildeområdet, dobbeltklikker du på bildet eller høyreklikker det og velger **Vis**.

Vise nøkkelbilder i tekstområdet

1. Klikk på **beskrivelse**linjen i tekstområdet hvis beskrivelsen er skjult.
2. Hvis nøkkelbildeområdet er trukket sammen, kan du klikke på pilen i den utvidbare linjen  eller klikke på **Nøkkelbilder**. 
3. Hvis du vil gjøre et nøkkelbilde større, drar du den utvidbare linjen for nøkkelbildet til ønsket størrelse.
4. Hvis du vil åpne undersøkelsen som inneholder nøkkelbildet, i bildeområdet, dobbeltklikker du på bildet eller høyreklikker det og velger **Vis**.

Hurtigtaster: Listeområdet








Handling	Trykk
Åpne kunnskapsbasen.	F1




Hurtigtaster: Bildeområde

Handling	Trykk
Navigere fremover til neste side, bilde eller tabulatormerke i undersøkelsen (avhengig av statusen til verktøyet Gå frem etter side/bilde/tab).	Page Down *
Navigere bakover til forrige side, bilde eller tabulatormerke i undersøkelsen (avhengig av statusen til verktøyet Gå frem etter side/bilde/tab).	Page Up *
Navigere fremover til neste pasient i sykluslisten eller åpne pasientundersøkelse.	Pil høyre
Navigere bakover til forrige pasient i sykluslisten eller åpne pasientundersøkelse.	Pil venstre
Navigere til det første bildet i serien.	Startside
Navigere fremover til neste undersøkelse for gjeldende pasient.	Pil opp
Navigere bakover til forrige undersøkelse for gjeldende pasient.	Pil ned
Navigere til det siste bildet i serien.	Slutt
Returnere til den første rammen ved navigering etter observasjonsstedsskive.	Startside
Forstørre bildet med zoom-verktøyet.	Page Up *
Redusere bildet med zoom-verktøyet.	Page Down *
Returnerer til den opprinnelige forstørrelsen med zoom-verktøyet.	Startside
Øke forstørrelsen med forstørrelsesglasset	Page Up *

Handling	Trykk
Redusere forstørrelsen med forstørrelsesglasset	Page Down *
Returnerer til den opprinnelige forstørrelsen med forstørrelsesglasset.	Startside
Åpne Tilpass-dialogboksen.	F12
Åpne IMPAX 6.5.1 Klient kunnskapsbase	F1

Vanlige verktøy for klinisk gjennomgang

Knapp	Navn	Bruke
	Filmviser	Spiller serier med bilder i en kontinuerlig sløyfe eller ramme for ramme
	Valg av sammensatt oppsett	Skriver ut ett eller flere undersøkelsesbilder på film eller papir i et egendefinert oppsett
	Forstørrelsesglass	Åpner et eget vindu som forstørrer den delen av bildet som er rett under det
	Målermarkering	Måler avstanden mellom to punkter
	Undersøkelser, feste/frigi	Fester en undersøkelse og holder den synlig mens du navigerer gjennom andre undersøkelser for pasienten
	Velg skjermformat	Definerer hvordan bilder, serier og undersøkelser skal ordnes i kolonner og rader på en bildeområdeskjerm
	Vise hele rapporten	Viser hele rapporten i rapportpanelet i tekstområdet

Knapp	Navn	Bruke
	Vindusnivå	Endrer bildets lysstyrke og kontrast ved å justere verdier for vindussenter og vindusbredde, og gir tilgang til forhåndsinnstilte vindusnivåverdier
	Zoom	Forstørrer eller reduserer bilder trinnvis
	Zoom til full skjerm	Forstørrer et enkelt bilde i fullskjermstørrelse