

IMPAX 6.5.1 Hurtigreferanse: Ortopedi

Logge på IMPAX

1. Hvis påloggingsskjerm bildet ikke vises, dobbeltklikker du på snarveien for **IMPAX-klienten** på skrivebordet.

Du kan også velge **Start > Alle programmer > Agfa IMPAX > IMPAX-klient**.

2. Velg en annen klynge eller et annet domene.
3. Skriv inn **bruker-ID** og **passord** i påloggingsskjerm bildet til IMPAX.

Du må skille mellom små og store bokstaver i passordet. Hvis Caps Lock er aktivert på tastaturet, vises det en advarsel når du klikker i passordfeltet.

4. Klikk **Pålogging**.

Finne pasienter med Søk

1. Klikk **Søk**-linjen i listeområdet for å utvide linjen.
2. Skriv inn navnet på pasienten i feltet Pasientens etternavn, fornavn.

Eller skriv inn **pasient-IDen** i feltet Pasient-ID eller Global pasient-ID.

3. Velg **alle** fra Gjeldende pasientplassering-listen.
4. Du kan eventuelt også velge en verdi i Dato å søke etter.
5. Klikk på **Søk**.

Åpne undersøkelser fra en arbeidsliste


1. Hvis du bare vil åpne undersøkelsen i tekstområdet, høyreklikker du på undersøkelsen og velger **Åpne tekst**.
eller

Høyreklikk undersøkelsen, og velg **Åpne bilder** for å **åpne bildene i undersøkelsen**.



2. Klikk **Relevansfor å åpne relevante tidligere undersøkelser**.

Åpne bilder i ortopediprogramvinduet


1. Bruk **Velg bilde**-verktøyet i bildeområdet til å velge opptil 20 bilder for preoperativ planlegging.
2. Naviger til det første bildet som krever preoperativ planlegging.
3. Klikk **Mal** på kontekst- eller hovedverktøylinjen. 
4. Klikk på et bilde som krever preoperativ planlegging.

Vise tidligere undersøkelser fra undersøkelseslisten

1. Bytt til **Radiologi**-kategorien i tekstområdet.
2. Hvis du vil vise en undersøkelse som ikke er åpen, klikker du én gang på **Åpne bilder**.



Zoome og panorere et bilde

1. Velg **Zoom** fra menyen på Zoom-knappen på hovedverktøylinjen i bildeområdet. 
2. Klikk på bildet for å zoome.
3. Zoom eller panorer bildet etter behov.

Eksportere arbeid med ortopedisk planlegging til IMPAX

1. I vinduet for ortopedisk preoperativ planlegging velger du **Eksporter til PACS**.



Gå gjennom informasjon om ortopediske implantater

1. Klikk på **Bilddata** på kontekst- eller hovedverktøylinjen i bildeområdet. 

Hvis du bruker tekstmenyen på kontekstverktøylinjen (Ctrl + høyreklikk), velg **Informasjon > Bilddata**.

2. Klikk på et bilde som inneholder implantatdetaljer.

Skrive ut bilder med et sammensatt oppsett

1. Vis alle bilder som skal være med i utskriften med sammensatt oppsett, i bildeområdet.
2. Klikk **Valg av sammensatt oppsett** på kontekst- eller hovedverktøylinjen. 
3. Hvis du vil skrive ut pasientnavn og aksjonsnumre på alle sider, merker du av for **Vis teksthoder** i dialogboksen Valg av sammensatt oppsett.
4. Merk av for **Inkluder sidenummer** hvis du vil skrive ut sidenumre på alle sidene.
5. Hvis du vil spare toner når du skriver ut på papir, merker du av for **Bruk hvit bakgrunn ved utskrift på papir**.
6. Velg skriveroppsettet du vil bruke, fra Oppsett-listen.
7. Hvis du skriver ut til en DICOM-filmskriver, velger du skriveren du vil bruke, fra Skriver-listen.
8. Hvis du skriver ut til en DICOM-filmskriver, velger du den forhåndsinnstillingen for utskrift du vil bruke, fra listen Forhåndsinnstilling.
9. Naviger til et bilde som skal skrives ut, plasser pekeren over det, og dra det til et

bildeelement i malen. Gjenta dette for alle bilder som skal inkluderes i utskriften.

10. Klikk på **Skriv ut** (for filmutskrift) eller **Papirutskrift** for å skrive ut umiddelbart.
11. Velg utskriftsalternativene i Windows-dialogboksen Skriv ut, og klikk på **OK** hvis du skriver ut til papir.

Hurtigtaster: Listeområdet

Handling	Trykk
Åpne kunnskapsbasen.	F1

Vanlig brukte ortopediske verktøy

Knapp	Navn	Bruke
	Valg av sammensatt oppsett	Skriver ut ett eller flere undersøkelsesbilder på film eller papir i et egendefinert oppsett
	Syklus	Flytter undersøkelser i en arbeidsliste automatisk til bildeområdet
	Bilddata	Viser demografiske detaljer og ortopediske implantatdetaljer, og lar deg skrive ut informasjonen
	Velg bilde	Velger bilder som skal lastes inn i ortopediprogrammet
	Undersøkelser, feste/frigi	Fester en undersøkelse og holder den synlig mens du navigerer gjennom andre undersøkelser for pasienten
	Velg skjermformat	Definerer hvordan bilder, serier og undersøkelser skal ordnes i kolonner og rader på en bildeområdeskjerm

Knapp	Navn	Bruke
	Mal	Åpner bilder i ortopediprogramvinduet
	Vindusnivå	Endrer bildets lysstyrke og kontrast ved å justere verdier for vindusser og gir tilgang til forhåndsinnstilte vindusnivåverdier
	Zoom	Forstørrer eller reduserer bilder trinnvis

Hurtigtaster: Bildeområde

Handling	Trykk
Navigere fremover til neste side, bilde eller tabulatormerke i undersøkelsen (avhengig av statusen til verktøyet Gå frem etter side/bilde/tab).	Page Down *
Navigere bakover til forrige side, bilde eller tabulatormerke i undersøkelsen (avhengig av statusen til verktøyet Gå frem etter side/bilde/tab).	Page Up *
Navigere fremover til neste pasient i sykluslisten eller åpne pasientundersøkelse.	Pil høyre
Navigere bakover til forrige pasient i sykluslisten eller åpne pasientundersøkelse.	Pil venstre
Navigere til det første bildet i serien.	Startside
Navigere fremover til neste undersøkelse for gjeldende pasient.	Pil opp
Navigere bakover til forrige undersøkelse for gjeldende pasient.	Pil ned
Navigere til det siste bildet i serien.	Slutt

Handling	Trykk
Returnere til den første rammen ved navigering etter observasjonsstedsskive.	Startside
Forstørre bildet med zoom-verktøyet.	Page Up *
Redusere bildet med zoom-verktøyet.	Page Down *
Returnerer til den opprinnelige forstørrelsen med zoom-verktøyet.	Startside
Øke forstørrelsen med forstørrelsesglasset	Page Up *
Redusere forstørrelsen med forstørrelsesglasset	Page Down *
Returnerer til den opprinnelige forstørrelsen med forstørrelsesglasset.	Startside
Åpne Tilpass-dialogboksen.	F12
Åpne IMPAX 6.5.1 Klient kunnskapsbase	F1