

IMPAX 6.5.1 Hurtigreferanse: Radiologer

Logge på IMPAX

1. Hvis påloggingsskjerm bildet ikke vises, dobbeltklikker du på snarveien for **IMPAX-klienten** på skrivebordet.



Du kan også velge **Start > Alle programmer > Agfa IMPAX > IMPAX-klient**.


2. Velg en annen klynge eller et annet domene.
3. Skriv inn **bruker-ID** og **passord** i påloggingsskjerm bildet til IMPAX.
Du må skille mellom små og store bokstaver i passordet. Hvis Caps Lock er aktivert på tastaturet, vises det en advarsel når du klikker i passordfeltet.
4. Klikk **Pålogging**.

Legge til arbeidslister i listeområdet


1. Klikk på **Arbeidslister** i listeområdet.
2. I Aktiv-kolonnen ved siden av arbeidslisten merker du av for hver arbeidsliste som du vil vise.
3. Trykk på **Enter**, eller klikk på **OK**.

Bla gjennom undersøkelsene i en arbeidsliste

1. Hvis du vil bla gjennom alle eller grupper av undersøkelsene i en arbeidsliste, klikker du på **Automatisk syklus**-knappen på arbeidslistelinjen. 
2. Hvis du vil bla gjennom prioritetsgrupperte undersøkelser i en arbeidsliste, høyreklikker du på **Automatisk syklus**  og fjerner merket ved siden av hver prioritetsgrupperingsregel som du ikke vil bla gjennom undersøkelsene etter. Klikk på **Automatisk syklus**.

3. Hvis du vil bla gjennom bestemte undersøkelser, merker du dem og høyreklikker på **Legg til i syklusliste** eller **Syklus**.
4. Hvis du vil bla gjennom flere arbeidslister, klikker du på **Automatisk syklus**-knappen på hver enkelt arbeidslistelinje. 

Vise wavelet-bilder

1. Klikk på menyen Brukernavn på skuffen for liste- eller konfigurasjonsområdet. 
2. Sørg for at **Vis webbilder** er valgt.


Synkronisere tekstområdet med bildeområdet

1. Klikk på undersøkelsens dato/klokkeslett eller aksjonsnummer i bildeområdets undersøkelsesdatapanel over hovedverktøylinjen.

Legge til nøkkelbilder i en rapport

1. Høyreklikk på et bilde i bildeområdet til kontekstmenyen vises.
2. Velg **Legg til nøkkelbilder** fra kontekstmenyen.



Vise en nylig vist undersøkelse

1. Klikk på **Logg** på navigeringslinjen i bildeområdet. 
2. Velg navnet på pasienten som du vil vise undersøkelser på nytt for.


Sette til side en pasients undersøkelser


1. Klikk på **Sett til side** ved siden av i sykluskontrollen nederst til venstre i bildeområdet. 

Koble serier manuelt


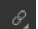
1. Høyreklikk på Koble sammen serier på kontekst- eller hovedverktøylinjen i bildeområdet. 
2. Merk av for **Manuell kobling** på koblingspreferansemenyen.
3. Synkroniser hver serie som skal kobles, ved å rulle gjennom bildene til de tilsvarer samme anatomiske region.
4. Venstreklikk på **Koble sammen serier** for å koble sammen serier manuelt og velg den aktuelle serien.
5. Merk tekstendringen ("Aktiv serie for kobling" for den uthevede serien og "Klikk for å koble fra" for en koblet serie), og at det vises et ikon øverst i høyre hjørne som indikerer at serien er koblet.
6. Hvis du vil bruke vindusnivåendringer i alle koblede serier, kan du aktivere vindunivå på tvers av koblede serier.
7. Hvis du vil at zooming og panorering skal gjelde for alle koblede serier, kan du aktivere zooming og panorering på tvers av koblede serier.
8. Klikk på **Koble sammen serier** for å deaktivere modus for koblingsredigering og gå tilbake til vanlig navigering. 

Justere automatiske koblinger for pasientbevegelser


1. Venstreklikk på **Koble serier** på kontekst- eller hovedverktøylinjen i bildeområdet. 
2. Venstreklikk på bildet i serien du vil justere.
3. Naviger til plasseringen i serien som tilsvarer den gjeldende plasseringen for den andre serien i studien.

- Venstreklikk på bildet igjen for å koble til serien.
- Merk av for **Ja, koble i den nye posisjonen** for å foreta koblingsendringen.
- Venstreklikk på **Koble serier** for å indikere at du er ferdig med å justere koblinger. 

Legge til en serie med forskjellig referanseramme til en Automatisk kobling-gruppe.

- Venstreklikk på **Kople sammen serier** på kontekst- eller hovedverktøylinjen i bildeområdet. 
- Venstreklikk på serien som du vil legge til i Automatisk kobling-gruppen.
- Venstreklikk **Kople sammen serier** for å indikere at du er ferdig med å endre koblinger og for å gå tilbake til vanlig navigasjon. 

Endre vindusnivået med forhåndsinnstilte verdier

- Høyreklikk på **Vindusnivå**-knappen på hovedverktøylinjen i bildeområdet, og velg forhåndsinnstillingen du vil bruke. 
- Hvis du bruker et skjermformat som viser mer enn én serie eller undersøkelse, klikker du på et bilde i seriene du vil bruke forhåndsinnstillingen på.

Hurtigtaster: Listeområdet

Handling	Trykk
Åpne kunnskapsbasen.	F1

Hurtigtaster: Tekstområde

Handling	Trykk
Kopiere en opplæringsfil eller -mappe.	Ctrl + C


Handling	Trykk
Klippe ut en opplæringsfil eller -mappe.	Ctrl + X
Lime inn en opplæringsfil eller -mappe.	Ctrl + V
Gi en opplæringsfil eller -mappe nytt navn.	F2



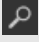
Hurtigtaster: Bildeområde

Handling	Trykk
Navigere fremover til neste side, bilde eller tabulatormerke i undersøkelsen (avhengig av statusen til verktøyet Gå frem etter side/bilde/tab).	Page Down *
Navigere bakover til forrige side, bilde eller tabulatormerke i undersøkelsen (avhengig av statusen til verktøyet Gå frem etter side/bilde/tab).	Page Up *
Navigere fremover til neste pasient i sykluslisten eller åpne pasientundersøkelse.	Pil høyre
Navigere bakover til forrige pasient i sykluslisten eller åpne pasientundersøkelse.	Pil venstre
Navigere til det første bildet i serien.	Startside
Navigere fremover til neste undersøkelse for gjeldende pasient.	Pil opp
Navigere bakover til forrige undersøkelse for gjeldende pasient.	Pil ned
Navigere til det siste bildet i serien.	Slutt
Returnere til den første rammen ved navigering etter observasjonsstedsskive.	Startside
Forstørre bildet med zoom-verktøyet.	Page Up *
Redusere bildet med zoom-verktøyet.	Page Down *
Returnerer til den opprinnelige forstørrelsen med zoom-verktøyet.	Startside

Handling	Trykk
Øke forstørrelsen med forstørrelsesglasset	Page Up *
Redusere forstørrelsen med forstørrelsesglasset	Page Down *
Returnerer til den opprinnelige forstørrelsen med forstørrelsesglasset.	Startside
Åpne Tilpass-dialogboksen.	F12
Åpne IMPAX 6.5.1 Klient kunnskapsbase	F1

Vanlig brukte radiologiverktøy

Knapp	Navn	Bruke
	Filmviser	Spiller serier med bilder i en kontinuerlig sløyfe eller ramme for ramme
	Syklus	Flytter automatisk bilder i en arbeidsliste til bildeområdet
	Dikter	Starter diktering for en enkelt undersøkelse
	Dikter - Flere undersøkelse	Starter diktering for to eller flere undersøkelser
	Inverter	Bytter om de hvite og svarte områdene i et bilde
	Markeringskommentar	Legger til frihåndsmarkeringstekst i et bilde
	Pilmarkering	Plasserer en markeringspil for å peke ut interessante områder
	Målermarkering	Måler avstanden mellom to punkter

Knapp	Navn	Bruke
	Volumvisning	Åpner en serie i vinduet for volumvisning for MIP-, MPR-- og (hvis lisensiert) 3D-analyse
	Vindusnivå	Endrer bildets lysstyrke og kontrast ved å justere verdier for vindussenter og vindusbredde, og gir tilgang til forhåndsinnstilte vindusnivåverdier
	Zoom	Forstørrer eller reduserer bilder trinnvis