

klienta 6.5.1 Poradnik podręczny: Klinikystów

Logowanie w systemie klienta

1. Jeśli ekran logowania nie jest wyświetlany, na pulpicie kliknij dwukrotnie skrót do klienta systemu **IMPAX**

lub wybierz kolejno menu **Start**
> **Wszystkie programy** > **Agfa IMPAX** >
Klient IMPAX.

2. Wybierz inny klaster lub domenę.
3. Na ekranie logowania klienta wprowadź swój numer **Id. użytkownika** oraz **Hasło**.

W hasle rozróżniana jest wielkość liter. Jeżeli włączono klawisz Caps Lock na klawiaturze, po kliknięciu pola Hasło zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.

4. Kliknij polecenie **Zaloguj**.

Wyszukiwanie pacjentów za pomocą opcji Szukaj

1. W obszarze listy kliknij pasek **Szukaj**, aby go rozwinąć.

2. W polu Nazwisko, imię wprowadź imię i nazwisko pacjenta.


Można też wprowadzić **identyfikator pacjenta** w polu Id. pacjenta lub Globalny id. pacjenta.

3. Z listy Bieżąca lokalizacja pacjenta wybierz opcję **dowolna**.
4. Opcjonalnie można wybrać datę do wyszukiwania.
5. Kliknij polecenie **Wyszukaj**.

Otwieranie badań z list roboczych


1. Aby otworzyć badanie tylko w obszarze tekstu, kliknij prawym przyciskiem myszy badanie i wybierz opcję **Otwórz tekst**.

lub

Aby otworzyć obrazy badania, kliknij badanie prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **Otwórz obrazy**. 

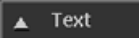
2. Aby otworzyć z badaniami istotne badania wcześniejsze, kliknij opcję **Istotność**.


Zmiana formatu ekranu badania

1. Na górnym pasku narzędzi w obszarze obrazu kliknij opcję **Wybierz format ekranu**. 


2. W menu Format ekranu kliknij przycisk odpowiadający formatowi, który ma być zastosowany.


Wyświetlanie obszaru tekstowego

1. Na górnym pasku narzędzi w obszarze obrazu kliknij przycisk **Tekst**. 

2. W obszarze tekstu kliknij przycisk **Tekst**. 

Wybieranie wcześniejszych raportów z listy badań



1. Wyświetl obszar tekstu dlażądanego pacjenta.
2. Jeśli lista badań jest ukryta w obszarze tekstu, kliknij strzałkę wielopoziomowego paska. 
3. Jeśli lista badań jest zwinięta, rozwiń ją, klikając pasek **Lista badań**.
4. W razie potrzeby przejdź do karty **Radiologia**.
5. Aby wyświetlić raport dotyczący wcześniejszego badania, kliknij wiersz wcześniejszego badania.
6. Aby zamknąć obrazy badania, ale pozostawić powiązany z nimi tekst dostępny w obszarze

tekstu, kliknij przycisk **Przeglądane obrazy**. 

Wyświetlanie raportu

1. Wyświetl obszar tekstu dla interesującego pacjenta lub badania.
2. Jeśli panel Raport jest zwinięty w obszarze tekstu, rozwiń go, klikając pasek **Raport** i wyświetl raport.
3. Aby wyświetlić kolejny raport dla pacjenta, kliknij badanie dyktowane na liście badań.
4. Ponadto wyświetl obrazy kluczowe powiązane z raportem.
5. Jeśli źródłem raportów jest system IMPAX RIS, wybierz odpowiedni widok raportu.
6. Aby powiększyć obraz kluczowy, przesunij wskaźnik myszy nad lewym bokiem obrazu kluczowego — wskaźnik zmieni się w podwójną strzałkę. Przeciągnij krawędź obrazu kluczowego, aż do uzyskania wymaganego rozmiaru.
7. Aby otworzyć obraz kluczowy w obszarze obrazu, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **Wyświetl**.

Wyświetlanie obrazów kluczowych w obszarze tekstu

1. Jeśli obszar raportu jest zwinięty w obszarze tekstu, wyświetl go, klikając pasek **Raport**.
2. Jeśli obszar Obrazy Kluczowe jest zwinięty, kliknij strzałkę paska rozwijalnego  lub kliknij **obrazy kluczowe**. 
3. Aby powiększyć obraz kluczowy, przeciągnij rozwijany pasek obrazów kluczowych dożądaney wielkości.
4. Aby otworzyć badanie zawierające obraz kluczowy w obszarze obrazu, dwukrotnie

kliknij obraz kluczowy lub kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **Wyświetl**.

Skróty klawiaturowe: obszar listy






| Aby | Naciśnij |
|---------------------|----------|
| Otwórz bazę wiedzy. | F1 |




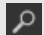

Skróty klawiaturowe: obszar obrazu

| Aby | Naciśnij |
|--|------------------|
| Przejdź do następnego obrazu, następnej strony lub karty badania (w zależności od opcji wybranej dla narzędzia Przechodź o). | Page Down * |
| Przejdź do poprzedniego obrazu, poprzedniej strony lub karty badania (w zależności od opcji wybranej dla narzędzia Przechodź o). | Page Up * |
| Przejdź do następnego pacjenta na liście cyklicznej lub otworzyć badanie pacjenta. | Strzałka w prawo |
| Przejdź do poprzedniego pacjenta na liście cyklicznej lub otworzyć badanie pacjenta. | Strzałka w lewo |
| Przejdź do pierwszego obrazu w serii. | Start |
| Przejdź do przodu do następnego badania dla bieżącego pacjenta. | Strzałka w górę |
| Przejdź do poprzedniego badania dla bieżącego pacjenta. | Strzałka w dół |
| Przejdź do ostatniego obrazu w serii. | End |
| Powróć do pierwszej klatki przy nawigacji wg warstwy źródłowej. | Start |
| Powiększyć obraz w obrębie narzędzia Skalowanie. | Page Up * |

| Aby | Naciśnij |
|---|--------------------|
| Pomniejszyć obraz w obrębie narzędzia Skalowanie. | Page Down * |
| Przywrócić początkową wielkość w narzędziu Skalowanie. | Start |
| Zwiększyć powiększenie narzędzia powiększające. | Szkło Page Up ** |
| Zmniejszyć powiększenie narzędzia powiększające. | Szkło Page Down ** |
| Przywrócić początkową wielkość w narzędziu Szkło powiększające. | Start |
| Otworzyć okno dialogowe Dostosuj. | F12 |
| Otworzyć bazę wiedzy klienta 6.5.1 Klient6.4. | F1 |

Często używane narzędzia przeglądu klinicznego

| Przycisk | Nazwa | Zastosowanie |
|---|---------------------------|---|
|  | Przeglądarka animacji | Odtwarza serie obrazów w pętli lub klatka po klatce |
|  | Selektor układu złożonego | Drukuje jeden lub większą liczbą obrazów badania na filmie lub papierze w układzie określonym przez użytkownika |
|  | Szkło powiększające | Otwiera oddzielne okno, w którym jest wyświetlany powiększony obszar obrazu znajdującego się pod tym oknem |
|  | Miarka | Mierzy odległość między dwoma punktami |
|  | Przypnij/odepnij badania | Unieruchamia widok badania, dzięki czemu jest ono wyświetlane przy |

| Przycisk | Nazwa | Zastosowanie |
|---|------------------------|---|
|  | Wybierz format ekranu | Odpowiada za sposób wyświetlania obrazów, serii oraz badań w kolumnach i wierszach na monitorze obszaru obrazu |
|  | Wyświetl cały raport | Wyświetla cały raport w panelu Raport w obszarze tekstu |
|  | Poziom okna | Umożliwia zmianę jasności i kontrastu obrazu przez regulację wartości środka okna i szerokości okna oraz umożliwia dostęp do wstępnie ustawionych wartości poziomu okna |
|  | Zmień skalę | Umożliwia stopniowe powiększanie lub pomniejszanie obrazów |
|  | Powiększ na cały ekran | Powiększa jeden obraz tak, aby zajmował cały ekran |