

klienta 6.5.1 Poradnik podręczny: Pogotowie ratunkowe

Logowanie w systemie klienta

1. Jeśli ekran logowania nie jest wyświetlany, na pulpicie kliknij dwukrotnie skrót do klienta systemu **IMPAX**

lub wybierz kolejno menu **Start**

> **Wszystkie programy** > **Agfa IMPAX** > **Klient IMPAX**.

2. Wybierz inny klaster lub domenę.
3. Na ekranie logowania klienta wprowadź swój numer **Id. użytkownika** oraz **Hasło**.

W hasle rozróżniana jest wielkość liter. Jeżeli włączono klawisz Caps Lock na klawiaturze, po kliknięciu pola Hasło zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.

4. Kliknij polecenie **Zaloguj**.

Wyszukiwanie pacjentów za pomocą opcji Szukaj

1. W obszarze listy kliknij pasek **Szukaj**, aby go rozwinąć.

2. W polu Nazwisko, imię wprowadź imię i nazwisko pacjenta.

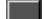
Można też wprowadzić **identyfikator pacjenta** w polu Id. pacjenta lub Globalny id. pacjenta.

3. Z listy Bieżąca lokalizacja pacjenta wybierz opcję **dowolna**.
4. Opcjonalnie można wybrać datę do wyszukiwania.
5. Kliknij polecenie **Wyszukaj**.

Otwieranie badań z list roboczych



1. Aby otworzyć badanie tylko w obszarze tekstu, kliknij prawym przyciskiem myszy badanie i wybierz opcję **Otwórz tekst**.

lub

Aby otworzyć obrazy badania, kliknij badanie prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **Otwórz obrazy**. 

2. Aby otworzyć z badaniami istotne badania wcześniejsze, kliknij opcję **Istotność**.

Wybieranie wcześniejszych raportów z listy badań

1. Wyświetl obszar tekstu dla żdanego pacjenta.
2. Jeśli lista badań jest ukryta w obszarze tekstu, kliknij strzałkę wielopoziomowego paska. 
3. Jeśli lista badań jest zwinięta, rozwiń ją, klikając pasek **Lista badań**.
4. W razie potrzeby przejdź do karty **Radiologia**.
5. Aby wyświetlić raport dotyczący wcześniejszego badania, kliknij wiersz wcześniejszego badania.
6. Aby zamknąć obrazy badania, ale pozostawić powiązany z nimi tekst dostępny w obszarze tekstu, kliknij przycisk **Przeglądane obrazy**. 

Dodawanie do badania komentarzy z dowolnym tekstem

1. Wyświetl obszar tekstu dla żdanego badania.
2. Przewiń do panelu **Raport**.
3. Jeżeli karta **Komentarze do badania** nie jest widoczna, przejdź do niej.
4. Wprowadź komentarz w polu tekstowym.
5. Aby dany komentarz do badania był prywatny, kliknij opcję **Ustaw jako prywatne**.

6. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Wstawianie ulubionych komentarzy do badań na podstawie rodzaju urządzenia

1. Wyświetl obszar tekstu dla żdanego badania.
2. Przewiń do panelu **Raport**.
3. Jeżeli karta **Komentarze do badania** nie jest widoczna, przejdź do niej.
4. Kliknij opcję **Ulubione komentarze badania**.
5. W oknie dialogowym Ulubione komentarze badania z listy Ulubione komentarze badania wybierz urządzenie (aby wyświetlić komentarze dostępne dla konkretnego urządzenia) albo wybierz opcję **Wszystkie** (aby wyświetlić komentarze dostępne dla wszystkich urządzeń).
6. Wybierz komentarz do wstawienia (do wybrania wielu elementów użyj klawiszy **Shift** lub **Ctrl**).
7. Kliknij przycisk **OK**.

Wyświetlanie raportu

1. Wyświetl obszar tekstu dla interesującego pacjenta lub badania.
2. Jeśli panel Raport jest zwinięty w obszarze tekstu, rozwiń go, klikając pasek **Raport** i wyświetl raport.
3. Aby wyświetlić kolejny raport dla pacjenta, kliknij badanie dyktowane na liście badań.
4. Ponadto wyświetl obrazy kluczowe powiązane z raportem.
5. Jeśli źródłem raportów jest system IMPAX RIS, wybierz odpowiedni widok raportu.
6. Aby powiększyć obraz kluczowy, przesunij wskaźnik myszy nad lewym bokiem obrazu

kluczowego — wskaźnik zmieni się w podwójną strzałkę. Przeciągnij krawędź obrazu kluczowego, aż do uzyskania wymaganego rozmiaru.

7. Aby otworzyć obraz kluczowy w obszarze obrazu, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **Wyświetl**.

Skróty klawiaturowe: obszar listy




Aby	Naciśnij
Otwórz bazę wiedzy.	F1

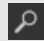
Skróty klawiaturowe: obszar obrazu

Aby	Naciśnij
Przejdź do następnego obrazu, następnej strony lub karty badania (w zależności od opcji wybranej dla narzędzia Przechodź o).	Page Down *
Przejdź do poprzedniego obrazu, poprzedniej strony lub karty badania (w zależności od opcji wybranej dla narzędzia Przechodź o).	Page Up *
Przejdź do następnego pacjenta na liście cyklicznej lub otworzyć badanie pacjenta.	Strzałka w prawo
Przejdź do poprzedniego pacjenta na liście cyklicznej lub otworzyć badanie pacjenta.	Strzałka w lewo
Przejdź do pierwszego obrazu w serii.	Start
Przejdź do przodu do następnego badania dla bieżącego pacjenta.	Strzałka w górę
Przejdź do poprzedniego badania dla bieżącego pacjenta.	Strzałka w dół
Przejdź do ostatniego obrazu w serii.	End
Powróć do pierwszej klatki przy nawigacji wg warstwy źródłowej.	Start

Aby	Naciśnij
Powiększyć obraz w obrębie narzędzia Skalowanie.	Page Up *
Pomniejszyć obraz w obrębie narzędzia Skalowanie.	Page Down *
Przywrócić początkową wielkość w narzędziu Skalowanie.	Start
Zwiększyć powiększenie narzędzia Szkoło powiększające.	Page Up **
Zmniejszyć powiększenie narzędzia Szkoło powiększające.	Page Down **
Przywrócić początkową wielkość w narzędziu Szkoło powiększające.	Start
Otworzyć okno dialogowe Dostosuj.	F12
Otworzyć bazę wiedzy klienta 6.5.1 Klient6.4.	F1

Często używane narzędzia przeglądu klinicznego

Przycisk	Nazwa	Zastosowanie
	Przeglądarka animacji	Odtwarza serie obrazów w pętli lub klatka po klatce
	Selektor układu złożonego	Drukuje jeden lub większą liczbą obrazów badania na filmie lub papierze w układzie określonym przez użytkownika
	Szkoło powiększające	Otwiera oddzielne okno, w którym jest wyświetlany powiększony obszar obrazu znajdującego się pod tym oknem
	Miarka	Mierzy odległość między dwoma punktami

Przycisk	Nazwa	Zastosowanie
	Przypnij/odepnij badania	Unieruchamia widok badania, dzięki czemu jest ono wyświetlane przy przechodzeniu przez inne badania pacjenta
	Wybierz format ekranu	Odpowiada za sposób wyświetlania obrazów, serii oraz badań w kolumnach i wierszach na monitorze obszaru obrazu
	Wyświetl cały raport	Wyświetla cały raport w panelu Raport w obszarze tekstu
	Poziom okna	Umożliwia zmianę jasności i kontrastu obrazu przez regulację wartości środka okna i szerokości okna oraz umożliwia dostęp do wstępnie ustawionych wartości poziomu okna
	Zmień skalę	Umożliwia stopniowe powiększanie lub pomniejszanie obrazów
	Powiększ na cały ekran	Powiększa jeden obraz tak, aby zajmował cały ekran