

# IMPAX 6.5.1 Consulta rápida: Serviço de urgência

## Iniciar a sessão no IMPAX

1. Se o ecrã de início de sessão não aparecer no ambiente de trabalho, clique duas vezes no atalho do **IMPAX Cliente**.

Ou então, seleccione **Iniciar > Todos os programas > Agfa IMPAX > IMPAX Cliente**.

2. Seleccione um cluster ou domínio diferente.
3. No ecrã de início de sessão do IMPAX, escreva a sua **Identificação de utilizador e Palavra-passe**.

A palavra-passe faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Se clicar no campo Palavra-passe com a tecla Caps Lock, activada no teclado, aparece uma mensagem de aviso.

4. Clique em **Início de sessão**.

## Localizar pacientes utilizando a função Procurar

1. Na área de Lista, clique na barra **Procurar** para a expandir.
2. No campo Apelido, nome próprio do paciente, escreva o nome do paciente.


Ou então, no campo da Identificação do paciente ou ID global do paciente, escreva a **Identificação do paciente**.

3. Na lista Localização actual do paciente, seleccione **Qualquer**.
4. Opcionalmente, escolha uma Data a procurar.
5. Clique em **Procurar**.

## Abrir estudos de uma lista de trabalho



1. Para abrir o estudo apenas na área de Texto, clique com o botão direito no estudo e seleccione **Abrir texto**.

ou

para abrir as imagens do estudo, clique com o botão direito no estudo e seleccione **Abrir imagens**. 

2. Para abrir estudos anteriores relevantes com os estudos, clique em **Relevância**.

## Procurar relatórios anteriores a partir da Lista de estudos

1. Visualize a Área de texto do paciente em que está interessado.
2. Se a Lista de estudos estiver oculta na Área de texto, clique na seta da barra expansível. 
3. Se a Lista de estudos estiver minimizada, clique na barra **Lista de estudo** para a expandir.
4. Se necessário, mude para o separador **Radiologia**.
5. Para ver um relatório relacionado com um estudo anterior, clique em qualquer ponto na linha do estudo anterior.
6. Para fechar as imagens do estudo mas deixar o texto a elas associado disponível na Área de texto, clique em **Imagens em curso de visualização**. 

## Adicionar texto livre aos comentários do estudo

1. Visualize a área de Texto do estudo em que está interessado.

2. Vá para o painel de **Relatório**.
3. Se não estiver visível, mude para o separador **Comentários do estudo**.
4. Na caixa de texto, escreva um comentário.
5. Para tornar o comentário do estudo privado, clique em **Tornar privado**.
6. Clique em **Guardar**.

## Inserir comentários de estudo favoritos baseados no tipo de modalidade

1. Visualize a área de Texto do estudo em que está interessado.
2. Vá para o painel de **Relatório**.
3. Se não estiver visível, mude para o separador **Comentários do estudo**.
4. Clique em **Comentários de estudo favoritos**.
5. Na caixa de diálogo Comentários de estudo favoritos, na lista Comentários de estudo favoritos para, seleccione uma modalidade (para ver os comentários disponíveis para uma determinada modalidade) ou seleccione **Todos** (para ver os comentários disponíveis para todas as modalidades).
6. Seleccione o comentário a inserir (utilize as teclas **Shift** ou **Ctrl** para seleccionar vários comentários favoritos).
7. Clique em **OK**.

## Ver um relatório

1. Visualize a área de Texto do estudo/paciente em que está interessado.
2. Se o painel Relatório estiver minimizado, na área de Texto, clique na barra **Relatório** para a expandir e ver o relatório.

3. Para ver outro relatório deste paciente, clique num estudo ditado na Lista de estudos.
4. Também deve ver todas as imagens-chave associadas ao relatório.
5. Se os relatórios vierem do IMPAX RIS, seleccione a vista de relatório adequada.
6. Para aumentar o tamanho das imagens-chave, passe com o ponteiro sobre o lado esquerdo da imagem-chave até ele mudar para uma seta dupla. Arraste as imagens-chave para o tamanho desejado.
7. Para abrir a imagem-chave na área de Imagem, clique com o botão direito e seleccione **Apresentar**.

### Atalhos do teclado: Área de Lista


Para	Carregue em
Abrir a Base de conhecimento.	F1








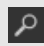

### Atalhos do teclado: Área de Imagem

Para	Carregue em
Avançar para a página, imagem ou separador seguinte no estudo (dependendo do estado da ferramenta Avançar por).	Page Down *
Navegar para a página, imagem ou separador anterior do estudo (dependendo do estado da ferramenta Avançar por).	Page Up *
Navegar para o próximo paciente da lista de ciclos ou abrir o estudo do paciente.	Seta para a direita
Navegar para o paciente anterior da lista de ciclos ou abrir o estudo do paciente.	Seta para a esquerda

Para	Carregue em
Navegar para a primeira imagem da série.	Início
Navegar para o estudo seguinte do paciente actual.	Seta para cima
Navegar para o estudo anterior do paciente actual.	Seta para baixo
Navegar para a última imagem da série.	Fim
Voltar ao primeiro fotograma quando navega por cortes do rastreador.	Início
Ampliar a imagem com a ferramenta Zoom.	Page Up *
Reduzir a imagem com a ferramenta Zoom.	Page Down *
Voltar à ampliação original com a ferramenta Zoom.	Início
Aumentar a ampliação da ferramenta Lupa.	Page Up **
Diminuir a ampliação da ferramenta Lupa.	Page Down **
Voltar à ampliação original da ferramenta Lupa.	Início
Abrir a caixa de diálogo Personalizar.	F12
Abrir o IMPAX 6.5.1 Cliente Base de conhecimento.	F1

### Ferramentas de revisão clínica normais

Botão	Nome	Utilização
	Visualizador cinematográfico	Reproduz as imagens de uma série num ciclo contínuo ou fotograma a fotograma

Botão	Nome	Utilização
	Selector de apresentação composta	Imprime uma ou mais imagens de um estudo em película ou papel numa apresentação personalizada
	Lupa	Abre uma janela separada que amplia a secção da imagem que se encontra por baixo dela
	Calibrador de anotações	Mede a distância entre dois pontos
	Fixar e soltar estudos	Fixa um estudo numa determinada localização e mantém-no visível enquanto navega através de outros estudos do paciente
	Seleccionar o formato de ecrã	Define como as imagens, séries e estudos são apresentados nas colunas e linhas num monitor da área de Imagem
	Ver todo o relatório	Apresenta todo o relatório no Painel de relatório da área de Texto
	Nível da janela	Altera o contraste e a luminosidade ajustando os valores da largura e centro da janela e permite aceder aos valores de nível da janela predefinidos
	Zoom	Amplia ou reduz as imagens em incrementos
	Ampliar para ecrã inteiro	Amplia uma imagem para o tamanho total do ecrã