

IMPAX 6.5.1 Consulta rápida: CUIDADOS INTENSIVOS (ICU)

Iniciar a sessão no IMPAX

1. Se o ecrã de início de sessão não aparecer no ambiente de trabalho, clique duas vezes no atalho do **IMPAX Cliente**.

Ou então, seleccione **Iniciar > Todos os programas > Agfa IMPAX > IMPAX Cliente**.

2. Seleccione um cluster ou domínio diferente.
3. No ecrã de início de sessão do IMPAX, escreva a sua **Identificação de utilizador e Palavra-passe**.

A palavra-passe faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Se clicar no campo Palavra-passe com a tecla Caps Lock, activada no teclado, aparece uma mensagem de aviso.

4. Clique em **Início de sessão**.

Localizar pacientes utilizando a função Procurar

1. Na área de Lista, clique na barra **Procurar** para a expandir.
2. No campo Apelido, nome próprio do paciente, escreva o nome do paciente.


Ou então, no campo da Identificação do paciente ou ID global do paciente, escreva a **Identificação do paciente**.

3. Na lista Localização actual do paciente, seleccione **Qualquer**.
4. Opcionalmente, escolha uma Data a procurar.
5. Clique em **Procurar**.

Abrir estudos de uma lista de trabalho


1. Para abrir o estudo apenas na área de Texto, clique com o botão direito no estudo e seleccione **Abrir texto**.

ou


para abrir as imagens do estudo, clique com o botão direito no estudo e seleccione **Abrir imagens**. 

2. Para abrir estudos anteriores relevantes com os estudos, clique em **Relevância**.


Mudar o formato do ecrã de estudos

1. Na barra de ferramentas superior da Área de imagem, clique em **Seleccionar o formato de ecrã**. 
2. No menu Formato de ecrã, clique no botão do formato a aplicar.


Medir a distância entre pontos

1. Na barra de ferramentas superior da área de Imagem no menu do botão Anotação, seleccione **Calibrador de anotações**. 
2. Clique no ponto de início da área a medir.
3. Clique no ponto de fim.
4. Para mover o texto da medição, arraste o ponto de controlo central para uma nova posição.
5. Para alterar a medição, arraste um dos pontos de controlo do fim para uma nova posição.
6. Para definir a medição, clique com o botão direito em.
7. Para apagar uma medição, prima a tecla **Eliminar**.

Visualizar estudos anteriores da Lista de estudos

1. Na Área de texto, mude para o separador **Radiologia**.
2. Para visualizar um estudo que não esteja actualmente aberto, clique em **Abrir imagens**. 

Ver a descrição do estudo

1. Visualize a área de Texto do estudo em que está interessado.
2. Na área de Texto, se o painel de Estudo estiver minimizado, clique na barra de **Estudo** para a expandir.
3. Para expandir o painel de Estudo, arraste a barra expansível para a esquerda ou a barra Estudo mais para cima.
4. Para obter informações de contacto de um médico ou técnico de radiologia listado no painel de Estudo, clique em **Contacto**. 

Ver um relatório

1. Visualize a área de Texto do estudo/paciente em que está interessado.
2. Se o painel Relatório estiver minimizado, na área de Texto, clique na barra **Relatório** para a expandir e ver o relatório.
3. Para ver outro relatório deste paciente, clique num estudo ditado na Lista de estudos.
4. Também deve ver todas as imagens-chave associadas ao relatório.
5. Se os relatórios vierem do IMPAX RIS, seleccione a vista de relatório adequada.
6. Para aumentar o tamanho das imagens-chave, passe com o ponteiro sobre o lado esquerdo da imagem-chave até ele

mudar para uma seta dupla. Arraste as imagens-chave para o tamanho desejado.

7. Para abrir a imagem-chave na área de Imagem, clique com o botão direito e seleccione **Apresentar**.

Atalhos do teclado: Área de Lista




| Para | Carregue em |
|-------------------------------|-------------|
| Abrir a Base de conhecimento. | F1 |






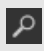

Atalhos do teclado: Área de Imagem

| Para | Carregue em |
|---|----------------------|
| Avançar para a página, imagem ou separador seguinte no estudo (dependendo do estado da ferramenta Avançar por). | Page Down * |
| Navegar para a página, imagem ou separador anterior do estudo (dependendo do estado da ferramenta Avançar por). | Page Up * |
| Navegar para o próximo paciente da lista de ciclos ou abrir o estudo do paciente. | Seta para a direita |
| Navegar para o paciente anterior da lista de ciclos ou abrir o estudo do paciente. | Seta para a esquerda |
| Navegar para a primeira imagem da série. | Início |
| Navegar para o estudo seguinte do paciente actual. | Seta para cima |
| Navegar para o estudo anterior do paciente actual. | Seta para baixo |
| Navegar para a última imagem da série. | Fim |

| Para | Carregue em |
|--|--------------|
| Voltar ao primeiro fotograma quando navega por cortes do rastreador. | Início |
| Ampliar a imagem com a ferramenta Zoom. | Page Up * |
| Reduzir a imagem com a ferramenta Zoom. | Page Down * |
| Voltar à ampliação original com a ferramenta Zoom. | Início |
| Aumentar a ampliação da ferramenta Lupa. | Page Up ** |
| Diminuir a ampliação da ferramenta Lupa. | Page Down ** |
| Voltar à ampliação original da ferramenta Lupa. | Início |
| Abrir a caixa de diálogo Personalizar. | F12 |
| Abrir o IMPAX 6.5.1 Cliente Base de conhecimento. | F1 |

Ferramentas de revisão clínica normais

| Botão | Nome | Utilização |
|---|-----------------------------------|---|
|  | Visualizador cinematográfico | Reproduz as imagens de uma série num ciclo contínuo ou fotograma a fotograma |
|  | Selector de apresentação composta | Imprime uma ou mais imagens de um estudo em película ou papel numa apresentação personalizada |
|  | Lupa | Abre uma janela separada que amplia a secção da imagem que se encontra por baixo dela |

| Botão | Nome | Utilização |
|--|-------------------------------|---|
|  | Calibrador de anotações | Mede a distância entre dois pontos |
|  | Fixar e soltar estudos | Fixa um estudo numa determinada localização e mantém-no visível enquanto navega através de outros estudos do paciente |
|  | Seleccionar o formato de ecrã | Define como as imagens, séries e estudos são apresentados nas colunas e linhas num monitor da área de Imagem |
|  | Ver todo o relatório | Apresenta todo o relatório no Painel de relatório da área de Texto |
|  | Nível da janela | Altera o contraste e a luminosidade ajustando os valores da largura e centro da janela e permite aceder aos valores de nível da janela predefinidos |
|  | Zoom | Amplia ou reduz as imagens em incrementos |
|  | Ampliar para ecrã inteiro | Amplia uma imagem para o tamanho total do ecrã |