

IMPAX 6.5.1 Consulta rápida: Radiologistas

Iniciar a sessão no IMPAX

1. Se o ecrã de início de sessão não aparecer no ambiente de trabalho, clique duas vezes no atalho do **IMPAX Cliente**.

Ou então, seleccione **Iniciar > Todos os programas > Agfa IMPAX > IMPAX Cliente**.

2. Seleccione um cluster ou domínio diferente.
3. No ecrã de início de sessão do IMPAX, escreva a sua **Identificação de utilizador e Palavra-passe**.


A palavra-passe faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Se clicar no campo Palavra-passe com a tecla Caps Lock, activada no teclado, aparece uma mensagem de aviso.

4. Clique em **Início de sessão**.

Acrescentar listas de trabalho à Área de lista


1. Na Área de lista, clique em **Listas de trabalho**.
2. Na coluna Activa junto da lista de trabalho, seleccione a caixa de verificação de cada lista de trabalho que quer visualizar.
3. Prima **Enter** ou clique em **OK**.

Percorrer os estudos de uma lista de trabalho


1. Para percorrer todos os estudos ou grupos de estudos de uma lista de trabalho, clique em **Percorrer ciclicamente automaticamente** na barra da lista de trabalho. 
2. Para percorrer estudos agrupados por prioridades numa lista de trabalho, clique com o botão direito do rato em **Percorrer**

ciclicamente automaticamente  na

barra da lista de trabalho e anule a selecção da caixa junto da regra de agrupamento por prioridade cujos estudos não quer percorrer ciclicamente. Clique em **Percorrer ciclicamente automaticamente**.

3. Para percorrer estudos específicos, seleccione-os e clique com o botão direito em **Adicionar à lista de ciclo** ou **Ciclo**.
4. Para percorrer várias listas de trabalho, clique em **Percorrer ciclicamente automaticamente** na barra de cada uma das listas de trabalho. 

Ver imagens wavelet

1. Na gaveta da área Configurar ou Lista, clique no menu Identificação do utilizador. 
2. Verifique se a opção **Mostrar imagens da web** está seleccionada.


Sincronizar a Área de texto com a Área de imagem

1. No painel de informação do estudo na Área de imagem, por cima da barra de ferramentas superior, clique no número de acesso ou na data/hora do estudo.


Adicionar imagens-chave a um relatório

1. Na Área de imagem, clique com o botão direito numa imagem até aparecer um menu de contexto.
2. No menu de contexto, seleccione **Adicionar a imagens-chave**.


Visualizar um estudo visto recentemente


1. Na Área de imagem, na barra de navegação, clique em **Histórico**. 
2. Seleccione o nome do paciente cujos estudos pretende voltar a visualizar.

Pôr de parte os estudos de um paciente



1. Junto do controlo do ciclo no canto inferior esquerdo da Área de imagem, clique em **Pôr de parte**. 

Ligar séries manualmente



1. No contexto da área de Imagem ou na barra de ferramentas superior, clique com o botão direito em Ligar a série. 
2. No menu Preferências de ligação, seleccione a caixa de verificação **Ligação manual**.
3. Sincronize as séries que pretende ligar percorrendo as imagens até corresponderem à mesma região anatómica.
4. Para ligar as séries, umas às outras, manualmente, clique com o botão esquerdo em **Ligar a série** e seleccione a série pretendida.
5. As alterações no texto ("Séries activas para ligação" nas séries realçadas e "Clique para anular a ligação" numa série ligada) e um ícone de ligação aparecem no canto superior esquerdo o que indica que a série foi ligada.
6. Para aplicar as alterações de nível da janela a todas as séries ligadas, active o nivelamento da janela nas séries ligadas.
7. Para aplicar o zoom e a panorâmica a todas as séries ligadas, active o zoom e a panorâmica nas séries ligadas.

- Para desactivar o modo Editar ligação e voltar à navegação normal, clique em **Ligar a série.** 

Ajustar as ligações automáticas ao movimento do paciente


- No contexto da área de Imagem ou barra de ferramentas superior, clique com o botão esquerdo em **Ligar a série.** 
- Clique com o botão esquerdo na imagem da série que pretende ajustar.
- Navegue para a localização na série que corresponde à localização actual da outra série do estudo.
- Clique novamente com o botão esquerdo na imagem para voltar a ligar a série.
- Para fazer a alteração na ligação, seleccione a caixa de verificação **Sim - ligar nesta nova posição**.
- Para indicar que terminou o ajuste das ligações, clique com o botão esquerdo em **Ligar a série.** 

Adicionar uma série com um fotograma de referência diferente a um grupo de ligação automática

- No contexto da área de Imagem ou barra de ferramentas superior, clique com o botão esquerdo em **Ligar a série.** 
- Clique com o botão esquerdo na série que pretende adicionar ao grupo de Ligação automática.
- Para indicar que terminou as modificações das ligações e voltar à navegação normal, clique com o botão esquerdo em **Ligar a série.** 

Nivelamento da janela pelos valores predefinidos

- Na barra de ferramentas superior da área de Imagem, clique com o botão direito no

menu do botão **Nível da janela** e seleccione o valor predefinido a aplicar. 

- Se utilizar um formato de ecrã que apresente mais do que uma série ou estudo, clique numa imagem da série a que quer aplicar a predefinição.

Atalhos do teclado: Área de Lista

Para	Carregue em
Abrir a Base de conhecimento.	F1

Atalhos do teclado: Área de Texto





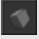
Para	Carregue em
Copiar uma pasta ou ficheiro de ensino.	Ctrl + C
Cortar uma pasta ou ficheiro de ensino.	Ctrl + X
Colar uma pasta ou ficheiro de ensino.	Ctrl + V
Mudar o nome de uma pasta ou ficheiro de ensino.	F2

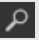
Atalhos do teclado: Área de Imagem

Para	Carregue em
Avançar para a página, imagem ou separador seguinte no estudo (dependendo do estado da ferramenta Avançar por).	Page Down *
Navegar para a página, imagem ou separador anterior do estudo (dependendo do estado da ferramenta Avançar por).	Page Up *
Navegar para o próximo paciente da lista de ciclos ou abrir o estudo do paciente.	Seta para a direita

Para	Carregue em
Navegar para o paciente anterior da lista de ciclos ou abrir o estudo do paciente.	Seta para a esquerda
Navegar para a primeira imagem da série.	Início
Navegar para o estudo seguinte do paciente actual.	Seta para cima
Navegar para o estudo anterior do paciente actual.	Seta para baixo
Navegar para a última imagem da série.	Fim
Voltar ao primeiro fotograma quando navega por cortes do rastreador.	Início
Ampliar a imagem com a ferramenta Zoom.	Page Up *
Reduzir a imagem com a ferramenta Zoom.	Page Down *
Voltar à ampliação original com a ferramenta Zoom.	Início
Aumentar a ampliação da ferramenta Lupa.	Page Up **
Diminuir a ampliação da ferramenta Lupa.	Page Down **
Voltar à ampliação original da ferramenta Lupa.	Início
Abrir a caixa de diálogo Personalizar.	F12
Abrir o IMPAX 6.5.1 Cliente Base de conhecimento.	F1

Ferramentas de radiologia normais

Botão	Nome	Utilizar
	Visualizador cinematográfico	Reproduz as imagens de uma série num ciclo contínuo ou fotograma a fotograma
	Ciclo	Move automaticamente os estudos de uma lista de trabalho para a área de Imagem
	Ditar	Inicia o ditado de um estudo
	Ditar - Vários estudos	Inicia o ditado de dois ou mais estudos
	Inverter	Troca as áreas a preto e branco numa imagem
	Anotação de marcação	Adiciona texto de marcação da anotação em forma livre a uma imagem
	Anotação com seta	Coloca uma seta na anotação para apontar as diversas áreas de interesse
	Calibrador de anotações	Mede a distância entre dois pontos
	Volume Viewing	Abre uma série na janela Volume Viewing para análise MIP, MPR e 3D (no caso de haver uma licença)
	Nível da janela	Altera a luminosidade e o contraste da imagem ajustando os valores do centro e a largura da janela e permite aceder aos valores de nível da janela predefinidos

Botão	Nome	Utilizar
	Zoom	Amplia ou reduz as imagens em incrementos