

# IMPAX 6.5.1 Referință rapidă: Clinicieni

## Conectarea în sistem IMPAX


1. Dacă ecranul de conectare nu este afișat, pe desktop, faceți dublu clic pe comanda rapidă **Client IMPAX**.  
Sau selectați **Start > Toate programele > Agfa IMPAX > Client IMPAX**.
2. Selectați un alt cluster sau domeniu.
3. În ecranul de conectare al IMPAX, introduceți **ID-ul dvs. de utilizator** și **parola**.  
Parola face diferențierea între literele mici și cele mari. Dacă tasta Caps Lock este apăsată pe tastatură, apare un mesaj de avertizare atunci când faceți clic în câmpul Parolă.
4. Faceți clic pe **Conectare**.

## Găsirea pacienților cu ajutorul funcției Căutare

1. În zona Listă, faceți clic pe bara **Căutare** pentru a o extinde.
2. În câmpul Nume de familie, prenume, tastați numele pacientului.  
Sau, în câmpul ID pacient sau ID global pacient, tastați **ID-ul pacientului**.
3. Din lista Locație curentă pacient, selectați **oricare**.
4. Opțional, alegeți o Dată pentru căutare.
5. Faceți clic pe **Căutare**.


## Deschiderea examinărilor dintr-o listă de sarcini

1. Pentru a deschide examinarea numai în zona Text, faceți clic dreapta pe examinare și selectați **Deschidere text**.  
sau

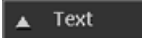
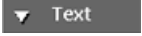
Pentru a deschide imaginile examinării, faceți clic dreapta pe examinare și selectați **Deschidere imagini**. 

2. Pentru a deschide imaginile din examinările anterioare relevante, faceți clic pe **Relevantă**.


## Schimbarea formatului ecranului examinării

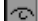
1. De pe bara de instrumente din partea de sus a zonei Imagine, faceți clic pe **Selectare format ecran**. 
2. Din meniul Format ecran, faceți clic pe butonul formatului de aplicat.

## Afișarea zonei Text

1. De pe bara de instrumente din partea de sus a zonei Imagine, faceți clic pe **Text**.  

2. Din zona Text, faceți clic pe **Text**.  


## Parcurgerea rapoartelor anterioare din Lista de examinări



1. Afișați zona Text pentru pacientul care vă interesează.
2. Dacă Lista de examinări este ascunsă în zona Text, faceți clic pe săgeata barei extensibile. 
3. Dacă Lista de examinări este restrânsă, faceți clic pe bara **Listă de examinări** pentru a o extinde.
4. Dacă este necesar, comutați la fila **Radiologie**.
5. Pentru a vizualiza un raport corelat cu un raport anterior, faceți un clic în orice loc din rândul pentru examinări anterioare.

6. Pentru a închide imaginile examinării, dar a păstra disponibil textul asociat în zona Text, faceți clic pe **Imagini vizualizate în acest moment**. 

## Vizualizarea unui raport

1. Afișați zona Text pentru pacientul/examinarea care vă interesează.
2. În zona Text, dacă panoul Raport este restrâns, faceți clic pe bara **Raport** pentru a o extinde și a vizualiza raportul.
3. Pentru a vizualiza un alt raport pentru acest pacient, faceți clic pe o examinare dictată din Lista de examinări.
4. De asemenea, vizualizați orice imagine-cheie asociată cu raportul.
5. Dacă rapoartele provin de la IMPAX RIS, selectați vizualizarea potrivită a raportului.
6. Pentru a mări imaginile-cheie, treceți peste marginea din stânga a imaginii-cheie până când indicatorul se transformă într-o săgeată dublă. Glisați imaginile-cheie la dimensiunea dorită.
7. Pentru a deschide imaginea-cheie în zona Imagine, faceți clic dreapta și selectați **Afișare**.

## Vizualizarea imaginilor-cheie din zona Text

1. În zona Text, dacă raportul este restrâns, afișați-l făcând clic pe bara **Raport**.
2. Dacă zona Imagini-cheie este restrânsă, faceți clic pe săgeata barei extensibile  sau faceți clic pe **Imagini-cheie**. 
3. Pentru a mări o imagine-cheie, glisați bara extensibilă Imagini-cheie la dimensiunea dorită.

4. Pentru a deschide examinarea care conține imaginea-cheie în zona Imagine, faceți dublu clic pe imaginea-cheie sau clic dreapta pe aceasta și selectați **Afișare**.

## Comenzi rapide tastatură: zona Listă

Pentru a	Apăsați
Deschide Baza de informații.	F1

## Comenzi rapide tastatură: zona Imagine

Pentru a	Apăsați
Naviga înainte la următoarea pagină, imagine sau filă din examinare (în funcție de starea instrumentului Avansare după).	Pagină în jos *
Naviga înapoi la pagina, imaginea sau fila precedentă a examinării (în funcție de starea instrumentului Avansare după).	Pagină în sus *
Naviga înainte la următorul pacient din lista ciclică sau a deschide examinarea pacientului.	Săgeată la dreapta
Naviga înapoi la pacientul precedent din lista ciclică sau a deschide examinarea pacientului.	Săgeată la stânga
Naviga la prima imagine din serie.	Start
Naviga înainte, la următoarea examinare a pacientului curent.	Săgeată în sus
Naviga înapoi la examinarea precedentă a pacientului curent.	Săgeată în jos
Naviga la ultima imagine din serie.	Sfârșit
Reveni la primul cadru atunci când navigați după sectorul Localizator.	Start

Pentru a	Apăsați
Mări imaginea cu instrumentul Zoom.	Pagină în sus *
Micșora imaginea cu instrumentul Zoom.	Pagină în jos *
Reveni la mărirea inițială din instrumentul Zoom.	Start
Mări puterea de mărire a instrumentului Lupă.	Pagină în sus **
Reduce puterea de mărire a instrumentului Lupă.	Pagină în jos **
Reveni la mărirea inițială a instrumentului Lupă.	Start
Deschide fereastra Personalizare.	F12
Deschide IMPAX 6.5.1 Client Baza de informații.	F1

## Instrumentele obișnuite de analiză clinică

Buton	Nume	Utilizare
	Vizualizator set imagini	Redă imaginile dintr-o serie fie continuu, fie cadru cu cadru
	Selector aspect compus	Imprimă una sau mai multe imagini dintr-o examinare pe film sau hârtie într-un aspect personalizat
	Lupă	Deschide o fereastră separată care mărește secțiunea imaginii de sub ea
	Marcaj măsurare	Măsoară distanța dintre două puncte
	Fixare/anulare fixare examinări	Fixează o examinare și menține vizibilitatea acesteia în timpul navigării printre

Buton	Nume	Utilizare
		celelalte examinări ale pacientului
	Selectare format ecran	Definește modul în care imaginile, seriileși examinările sunt dispuse pe coloane și rânduri pe un monitor al zonei Imagine
	Vizualizare raport întreg	Afișează întregul raport în panoul Raport al zonei Text
	Nivel fereastră	Modifică luminozitatea și contrastul imaginilor reglând valorile centrului și lățimii ferestrei și asigură accesul la valorile de nivel al ferestrei predefinite
	Zoom	Mărește sau micșorează treptat imaginile
	Zoom pe tot ecranul	Mărește o singură imagine până ajunge la dimensiunea pe tot ecranul