

# IMPAX 6.5.1 Referință rapidă: Ortopedie

## Conectarea în sistem IMPAX


1. Dacă ecranul de conectare nu este afișat, pe desktop, faceți dublu clic pe comanda rapidă **Client IMPAX**.  
Sau selectați **Start > Toate programele > Agfa IMPAX > Client IMPAX**.
2. Selectați un alt cluster sau domeniu.
3. În ecranul de conectare al IMPAX, introduceți **ID-ul dvs. de utilizator** și **parola**.  
Parola face diferențierea între literele mici și cele mari. Dacă tasta Caps Lock este apăsată pe tastatură, apare un mesaj de avertizare atunci când faceți clic în câmpul Parolă.
4. Faceți clic pe **Conectare**.

## Găsirea pacienților cu ajutorul funcției Căutare

1. În zona Listă, faceți clic pe bara **Căutare** pentru a o extinde.
2. În câmpul Nume de familie, prenume, tastați numele pacientului.  
Sau, în câmpul ID pacient sau ID global pacient, tastați **ID-ul pacientului**.
3. Din lista Locație curentă pacient, selectați **oricare**.
4. Opțional, alegeți o Dată pentru căutare.
5. Faceți clic pe **Căutare**.


## Deschiderea examinărilor dintr-o listă de sarcini

1. Pentru a deschide examinarea numai în zona Text, faceți clic dreapta pe examinare și selectați **Deschidere text**.  
sau


Pentru a deschide imaginile examinării, faceți clic dreapta pe examinare și selectați **Deschidere imagini**. 

2. Pentru a deschide imaginile din examinările anterioare relevante, faceți clic pe **Relevantă**.


## Deschiderea imaginilor în fereastra Aplicație ortopedică

1. În zona Imagine, folosiți instrumentul **Selectare imagine** pentru a selecta până la 20 de imagini pentru planificarea prechirurgicală.
2. Navigați la prima imagine care necesită planificare prechirurgicală.
3. De pe bara de instrumente de context sau bara de instrumente din partea de sus, faceți clic pe **Șablon**. 
4. Faceți clic pe o imagine care necesită planificare prechirurgicală.

## Afișarea examinărilor anterioare din Listă de examinări

1. În zona Text, comutați la fila **Radiologie**.
2. Pentru a afișa o examinare care nu este deschisă în acest moment, faceți un singur clic pe **Deschidere imagini**. 

## Mărirea/micșorarea și panoramarea unei imagini


1. De pe bara de instrumente din partea de sus a zonei Imagine, meniul butonului Zoom, selectați **Zoom**. 
2. Faceți clic pe imaginea de mărit/micșorat.
3. Măriți/micșorați sau panoramați imaginea după necesități.

## Exportarea lucrării de planificare ortopedică la IMPAX


1. În fereastra Planificare prechirurgicală ortopedie, faceți clic pe **Export la PACS**.



## Revizuirea informațiilor despre implanturile ortopedice

1. De pe bara de instrumente de context sau bara de instrumente din partea de sus a zonei Imagine, faceți clic pe **Informații imagine**.   
Sau, dacă folosiți meniul de text de pe bara de instrumente de context (Ctrl + clic dreapta), selectați **Informații > Informații imagine**.
2. Faceți clic pe o imagine care conține detalii despre implanturi.

## Imprimarea imaginilor folosind un aspect compus

1. În zona Imagine, afișați toate imaginile de inclus în imprimarea cu aspect compus.
2. De pe bara de instrumente de context sau bara de instrumente din partea de sus, faceți clic pe **Selector aspect compus**. 
3. Pentru a imprima numele pacienților și numerele de înregistrare pe toate paginile, în fereastra Selector aspect compus, bifați caseta de validare **Afișare anteturi text**.
4. Pentru a imprima numerele de pagină pe toate paginile, bifați caseta de validare **Includere număr pagină**.
5. Pentru a nu consuma prea mult toner atunci când imprimați pe hârtie, bifați caseta de validare **Utilizare fundal alb pentru imprimare pe hârtie**.

6. Din lista Aspecte, selectați aspectul de imprimare de utilizat.
7. Dacă imprimați cu o imprimantă DICOM pe film, din lista Imprimante, selectați imprimanta de utilizat.
8. Dacă imprimați cu o imprimantă DICOM pe film, din lista Presetări, selectați presetarea de imprimare de utilizat.
9. Navigați la o imagine de imprimat, așezați indicatorul deasupra acesteia și glisați-o într-un element-imagine al șablonului. Repetați operațiunea pentru toate imaginile de inclus în imprimare.
10. Pentru a imprima imediat, faceți clic pe **Imprimare** (pentru o imprimantă pe film) sau pe **Imprimare pe hârtie**.
11. Dacă imprimați cu o imprimantă pe hârtie, din fereastra Print a Windows, selectați opțiunile de imprimare și faceți clic pe **OK**.

## Comenzi rapide tastatură: zona Listă

Pentru a	Apăsați
Deschide Baza de informații.	F1

## Instrumentele ortopedice obișnuite

Buton	Nume	Utilizare
	Selector aspect	Imprimă una sau mai multe imagini dintr-o examinare pe film sau hârtie într-un aspect personalizat
	Ciclu	Mută automat examinările dintr-o listă de sarcini în zona Imagine
	Informații imagine	Afișează datele demografice și detaliile despre implanturile

Buton	Nume	Utilizare
		ortopedice și vă permite să imprimați informațiile
	Selectare imagine	Selectează imaginile care vor fi lansate în Aplicația ortopedică
	Fixare/anulare fixare examinări	Fixează o examinare și menține vizibilitatea acesteia în timpul navigării printre celelalte examinări ale pacientului
	Selectare format ecran	Definește modul în care imaginile, seriileși examinările sunt dispuse pe coloane și rânduri pe un monitor al zonei Imagine
	Șablon	Deschide imaginile în fereastra Aplicație ortopedică
	Nivel fereastră	Modifică luminozitatea și contrastul imaginilor reglând valorile centrului și lățimii ferestrei și asigură accesul la valorile de nivel al ferestrei predefinite
	Zoom	Mărește sau micșorează treptat imaginile

## Comenzi rapide tastatură: zona Imagine

Pentru a	Apăsați
Naviga înainte la următoarea pagină, imagine sau filă din examinare (în funcție de starea instrumentului Avansare după).	Pagină în jos *
Naviga înapoi la pagina, imaginea sau fila precedentă a examinării (în funcție de starea instrumentului Avansare după).	Pagină în sus *

Pentru a	Apăsați
Naviga înainte la următorul pacient din lista ciclică sau a deschide examinarea pacientului.	Săgeată la dreapta
Naviga înapoi la pacientul precedent din lista ciclică sau a deschide examinarea pacientului.	Săgeată la stânga
Naviga la prima imagine din serie.	Start
Naviga înainte, la următoarea examinare a pacientului curent.	Săgeată în sus
Naviga înapoi la examinarea precedentă a pacientului curent.	Săgeată în jos
Naviga la ultima imagine din serie.	Sfârșit
Reveni la primul cadru atunci când navigați după sectorul Localizator.	Start
Mări imaginea cu instrumentul Zoom.	Pagină în sus *
Micșora imaginea cu instrumentul Zoom.	Pagină în jos *
Reveni la mărirea inițială din instrumentul Zoom.	Start
Mări puterea de mărire a instrumentului Lupă.	Pagină în sus **
Reduce puterea de mărire a instrumentului Lupă.	Pagină în jos **
Reveni la mărirea inițială a instrumentului Lupă.	Start
Deschide fereastra Personalizare.	F12
Deschide IMPAX 6.5.1 Client Baza de informații.	F1