

IMPAX 6.5.1 Referință rapidă: Radiologi



Conectarea în sistem IMPAX

1. Dacă ecranul de conectare nu este afișat, pe desktop, faceți dublu clic pe comanda rapidă **Client IMPAX**.
Sau selectați **Start > Toate programele > Agfa IMPAX > Client IMPAX**.
2. Selectați un alt cluster sau domeniu.
3. În ecranul de conectare al IMPAX, introduceți **ID-ul dvs. de utilizator** și **parola**.
Parola face diferențierea între literele mici și cele mari. Dacă tasta Caps Lock este apăsată pe tastatură, apare un mesaj de avertizare atunci când faceți clic în câmpul Parolă.
4. Faceți clic pe **Conectare**.


Adăugarea listelor de sarcini la zona Listă

1. În zona Listă, faceți clic pe **Liste de sarcini**.
2. În coloana Activ, de lângă lista de sarcini, bifați caseta de validare corespunzătoare fiecărei liste de sarcini pe care doriți să o afișați.
3. Apăsăți **Enter** sau faceți clic pe **OK**.


Parcursarea ciclică a examinărilor dintr-o listă de sarcini

1. Pentru a parcurge ciclic toate examinările sau grupuri de examinări dintr-o listă de sarcini, pe bara din lista de sarcini, faceți clic pe **Ciclu automat**. 
2. Pentru a parcurge ciclic examinările grupate prioritar dintr-o listă de sarcini, pe bara din lista de sarcini, faceți clic dreapta pe **Ciclu automat**  și ștergeți semnul de validare din caseta de validare de lângă fiecare regulă de grupare prioritară ale cărei

examinări nu doriți să le parcurgeți ciclic. Faceți clic pe **Ciclu automat**.

3. Pentru a parcurge ciclic anumite examinări, selectați-le și faceți clic dreapta pe **Adăugare la lista ciclică** sau pe **Ciclu**.
4. Pentru a parcurge ciclic mai multe liste de sarcini, în fiecare bară a listei de sarcini, faceți clic pe **Ciclu automat**. 

Vizualizarea imaginilor în format WIF

1. Din caseta zonei Listă sau Configurare, faceți clic pe meniul ID utilizator. 
2. Asigurați-vă că ați selectat comanda **Afișare imagini web**.


Sincronizarea zonei Text cu zona Imagine

1. În panoul de informații despre examinări din zona Imagine, de deasupra barei de instrumente din partea de sus, faceți clic pe data/ora examinării sau pe numărul de înregistrare.

Adăugarea de imagini-cheie la un raport

1. În zona Imagine, faceți clic dreapta pe o imagine până când apare un meniu de context.
2. Din meniul de context, selectați **Adăugare la imagini-cheie**.

Afișarea unei examinări vizualizate recent

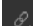

1. În zona Imagine, de pe bara de navigare, faceți clic pe **Istoric**. 
2. Selectați numele pacientului ale cărui examinări doriți să le reafișați.

Amânarea examinărilor unui pacient



1. Lângă comanda ciclică din partea stângă jos a zonei Imagine, faceți clic pe **Amânare**.





Legarea manuală a seriilor

1. De pe bara de instrumente de context sau bara de instrumente din partea de sus a zonei Imagine, faceți clic dreapta pe Legare serii. 
2. În meniul Preferință link, bifați caseta de validare **Legare manuală**.
3. Sincronizați fiecare serie de corelat parcurgând imaginile până când corespund aceleiași regiuni anatomice.
4. Pentru a corela manual seriile, faceți clic stânga pe **Legare serii** și selectați seriile dorite.
5. Observați că modificările textuale („Serie activă pentru legare” pentru seria evidențiată și „Faceți clic pentru a anula legarea” pentru o serie corelată) și o pictogramă de legătură apar în colțul stânga sus și indică faptul că seria a fost corelată.
6. Pentru ca modificările de nivel al ferestrei să se aplice tuturor seriilor corelate, activați echilibrarea ferestrei pentru seriile corelate.
7. Pentru ca mărirea/micșorarea și panoramarea să se aplice tuturor seriilor corelate, activați mărirea/micșorarea și panoramarea pentru seriile corelate.
8. Pentru a dezactiva modul Editare link și a reveni la navigarea obișnuită, faceți clic pe **Legare serii**. 


Adaptarea linkurilor automate la mutarea pacienților

- De pe bara de instrumente de context sau bara de instrumente din partea de sus a zonei Imagine, faceți clic pe **Legare serii**. 
- Faceți clic stânga pe imaginea seriei pe care doriți să o reglați.
- Navigați la locația din serie care corespunde locației curente a celeilalte serii din examinare.
- Faceți din nou clic stânga pe imagine, pentru a corela din nou seriile.
- Pentru a aplica modificarea legăturii, bifați caseta de validare **Da - legare la poziția curentă**.
- Pentru a indica faptul că ați terminat de adaptat linkurile, faceți clic stânga pe **Legare serii**. 

Adăugarea unei serii cu un alt cadru de referință la un grup cu legare automată

- De pe bara de instrumente de context sau bara de instrumente din partea de sus a zonei Imagine, faceți clic stânga pe **Legare serii**. 
- Faceți clic stânga pe seria pe care doriți să o adăugați la grupul Legare automată.
- Pentru a indica faptul că ați terminat de modificat linkurile și a reveni la navigarea obișnuită, faceți clic stânga pe **Legare serii**. 

Echilibrarea ferestrelor cu ajutorul valorilor predefinite

- De pe bara de instrumente din partea de sus a zonei Imagine, faceți clic dreapta pe meniul butonului **Nivel fereastră** și selectați valoarea predefinită de aplicat. 

- Dacă folosiți un format de ecran care afișează mai multe serii sau examinări, faceți clic pe o imagine din serie pentru a aplica presetarea la aceasta.

Comenzi rapide tastatură: zona Listă

Pentru a	Apăsați
Deschide Baza de informații.	F1

Comenzi rapide tastatură: zona Text


Pentru a	Apăsați
Copia un fișier sau un dosar de instruire.	Ctrl + C
Decupa un fișier sau un dosar de instruire.	Ctrl + X
Lipi un fișier sau un dosar de instruire.	Ctrl + V
Redenumi un fișier sau un dosar de instruire.	F2











Comenzi rapide tastatură: zona Imagine

Pentru a	Apăsați
Naviga înainte la următoarea pagină, imagine sau filă din examinare (în funcție de starea instrumentului Avansare după).	Pagină în jos *
Naviga înapoi la pagina, imaginea sau fila precedentă a examinării (în funcție de starea instrumentului Avansare după).	Pagină în sus *
Naviga înainte la următorul pacient din lista ciclică sau a deschide examinarea pacientului.	Săgeată la dreapta

Pentru a	Apăsați
Naviga înapoi la pacientul precedent din lista ciclică sau a deschide examinarea pacientului.	Săgeată la stânga
Naviga la prima imagine din serie.	Start
Naviga înainte, la următoarea examinare a pacientului curent.	Săgeată în sus
Naviga înapoi la examinarea precedentă a pacientului curent.	Săgeată în jos
Naviga la ultima imagine din serie.	Sfârșit
Reveni la primul cadru atunci când navigați după sectorul Localizator.	Start
Mări imaginea cu instrumentul Zoom.	Pagină în sus *
Micșora imaginea cu instrumentul Zoom.	Pagină în jos *
Reveni la mărirea inițială din instrumentul Zoom.	Start
Mări puterea de mărire a instrumentului Lupă.	Pagină în sus **
Reduce puterea de mărire a instrumentului Lupă.	Pagină în jos **
Reveni la mărirea inițială a instrumentului Lupă.	Start
Deschide fereastra Personalizare.	F12
Deschide IMPAX 6.5.1 Client Baza de informații.	F1

Instrumentele obișnuite de radiologie

Buton	Nume	Utilizare
	Vizualizator set imagini	Redă imaginile dintr-o serie fie continuu, fie cadru cu cadru

Buton	Nume	Utilizare
	Ciclu	Mută automat examinările dintr-o listă de sarcini în zona Imagine
	Dictare	Inițiază dictarea unei singure examinări
	Dictare - examinări multiple	Inițiază dictarea a două sau mai multe examinări
	Inversare	Schimbă între ele zonele albe și cele negre dintr-o imagine
	Marcaj adnotare	Adaugă text de marcare cu formă liberă la o imagine
	Marcaj săgeată	Plasează o săgeată de marcare, pentru a indica zonele de interes
	Marcaj măsurare	Măsoară distanța dintre două puncte
	Vizualizare volum	Lansează o serie în fereastra Vizualizare volum pentru analiza MIP, MPR și (dacă este licențiată) 3D
	Nivel fereastră	Modifică luminozitatea și contrastul imaginilor reglând valorile centrului și lățimii ferestrei și asigură accesul la valorile de nivel al ferestrei predefinite
	Zoom	Mărește sau micșorează treptat imaginile