

Поиск исследований с использованием функции «Поиск»

1. В области списков щелчком разверните строку **Поиск**.
2. Чтобы отобразить поля дополнительных критериев поиска, щелчком правой кнопки мыши выполните вход в диалоговое окно «Настройка».
3. Чтобы сузить диапазон поиска, введите или выберите критерии поиска.
4. По желанию, чтобы добавить результаты поиска к результатам предыдущего поиска, установите флажок в поле **Добавить результаты последнего поиска**.
5. Если необходимо, измените целевое размещение для выполнения поиска.
6. Нажмите **Поиск**.

Поиск пациентов с использованием функции «Поиск»

1. В области списков щелчком разверните строку **Поиск**.
2. В поля «Фамилия, имя» введите фамилию и имя пациента.
Или же в поле «Номер пациента» или «Глобальный номер пациента» введите **номер пациента**.
3. В списке «Текущее размещение пациента» выберите **любой**.
4. В качестве дополнительного критерия поиска можно выбрать дату.
5. Нажмите **Поиск**.

Определение даты для осуществления поиска

1. В области списка временных критериев (дат) выберите **За последний(-ие)** или **Старше, чем**.
2. В диалоговом окне поиска введите или выберите цифру.
3. Щелкните по кнопке единиц времени и выберите **Часы, дни, Недели, Месяцы** или **Годы**.
4. Нажмите **ОК**.

Поиск исследований для определенных дней

1. В области списка временных критериев (дат) в рамках функций Поиск или Расширенный поиск выберите **Любая дата, Сегодня** или **Вчера**.
или
Выберите **Полное совпадение**. В диалоговом окне поиска щелкните по стрелке списка. На Календаре перейдите и щелчком задайте необходимую дату. Нажмите **ОК**.


Поиск в диапазоне, ограниченном заданными датами

1. В области списка временных критериев (дат) выберите **В интервале**.
2. В диалоговом окне функции поиска выберите список **С** и щелчком выберите необходимую дату в Календаре.
3. Выберите список **По** и щелчком выберите необходимую дату в Календаре.
4. Нажмите **ОК**.

Добавление результатов поиска к предыдущему поиску

1. Чтобы сузить диапазон поиска, введите или выберите опции поиска.
2. Нажмите **Поиск**.
3. По желанию измените критерии поиска.
4. В области поиска установите флажок в поле **Добавить результаты последнего поиска**.
5. Повторно нажмите **Поиск**.

Настройка поиска

1. В области результатов поиска щелкните правой кнопкой мыши по заголовку соответствующего столбца.
2. Отобразите палитру «Настроить», щелкнув правой кнопкой мыши по заголовку столбца.
3. Если необходимо, добавьте или удалите столбцы.
4. Если необходимо, перегруппируйте столбцы.
5. Чтобы деактивировать функцию автоматической настройки размера столбцов, снимите флажок в поле **Авторазмер**.
6. Закончив операцию, закройте диалоговое окно «Настроить». 

Рекомендации по использованию функции поиска

- Чтобы повысить точность результатов поиска, вместо неизвестных вам символов в строке запроса используйте подстановочный символ * («звездочка»). К примеру, в ответ на запрос с введенными в поле номера пациента

символами «4*3» будут выведены все пациенты, номера которых начинаются на 4 и содержат 3. Подстановочный символ размещается в начале или в середине строки запроса. Функция поиска автоматически размещает звездочку в конце критерия поиска.

- Системный администратор задает максимальное количество отображаемых исследований. Если количество исследований в рамках результата поиска (указывается в строке поиска) превышает заданное максимальное количество, конкретизируйте запрос и повторите поиск.
- Поиск без конкретизирующих операторов не поддерживается. Если в рамках параметра «Дата исследования» выбран критерий **любая**, необходимо задать дополнительный более конкретный критерий поиска.
- Чтобы воспользоваться более сложной системой поиска, запросите у вашего администратора PACS доступ к функции «Расширенный поиск».
- Чтобы оформить запрос к предприятию в ручном режиме, левой кнопкой мыши нажмите ссылку **Найти другие исследования** в списке исследований.

Опции поиска

Критерий	Описание
Инвентарный номер	Введите инвентарный номер исследования, относящегося к данному пациенту.
Часть тела	Выберите часть тела, в зоне которой было выполнено исследование, или пункт любой .
Содержимое комментариев	Введите любую часть комментариев к исследованию.

Критерий	Описание
	В диалоговом окне «Настройка» эта опция обозначена «Комментарии к исследованию».
Текущее размещение пациента	Введите или выберите текущее размещение пациента или выберите Правка... , чтобы открыть диалоговое окно «Редактировать избранные параметры поиска». Выберите текущее размещение пациента из списка и нажмите ОК .
Отделение	Введите или выберите отделение, в котором исследование было выполнено, или выберите ... (замещающий знак), чтобы открыть диалоговое окно «Выбрать избранные параметры поиска». Выберите отделение из списка и нажмите ОК .
Содержимое описания	Введите часть описания исследования. В диалоговом окне «Настройка» эта опция обозначена «Описание исследования».
Глобальный номер пациента	Введите глобальный номер пациента полностью или частично. У каждого пациента может быть несколько идентификационных номеров, присваиваемых ему различными информационными системами в рамках предприятия. Глобальный номер пациента связывает все эти номера, обеспечивая уникальный идентификатор пациента, элементы которого не подлежат изменению, и который не используется применительно к другим пациентам.
Учреждение	Выберите название учреждения, в котором было выполнено исследование, или выберите ... (замещающий знак), чтобы открыть диалоговое окно «Избранное». Выберите учреждение из списка и нажмите ОК .
Название ключевого изображения	Введите или выберите из списка название документа ключевого изображения, в рамках которого организованы ключевые изображения.

Критерий	Описание
Ключевые слова	Введите или выберите из списка ключевое слово, сопоставленное с исследованием.
Модальность	Выберите тип модальности в рамках поиска или задайте условие любой . Не рекомендуется использовать «Модальность» в качестве критерия поиска в системе IMPAX с несколькими кластерами, в которой центр данных IMPAX Центр данных Data Center выполняет функции центрального архива.
Оператор	Введите фамилию и имя оператора, выполнившего исследование, полностью или частично.
Другие номера пациента	Введите альтернативный номер пациента полностью или частично.
Возраст пациента	Выберите возраст пациента на момент получения исследования. В диалоговом окне «Критерии» задайте соответствующие параметры и нажмите ОК . Переключайте единицы измерения времени - часы, дни, недели, месяцы и годы - с помощью кнопки Единицы . В диалоговом окне «Настройка» эта опция обозначена «Возраст пациента при получении».
Дата рождения пациента	Введите или с помощью календаря выберите дату поиска или выберите Любая дата . Текстовая надпись, выделенная красным, указывает на недействительный формат даты. Помните, что, выбрав критерий «Любая дата», вам необходимо задать дополнительный критерий поиска. Поиск, диапазон которого не ограничен, не поддерживается.
Карта пациента содержит	Введите данные из карты пациента полностью или частично. В диалоговом окне «Настройка» эта опция обозначена «Дополнительная карта пациента».
Номер пациента	Введите номер пациента.
Фамилия, имя пациента	Введите фамилию и имя пациента полностью или частично.

Критерий	Описание
	В диалоговом окне «Настройка» эта опция обозначена «Имя пациента».
Пол пациента	«Любой», «Мужской», «Женский», «Иной»
Ответственный врач	Введите или выберите имя ответственного врача полностью или частично или выберите ..., (замещающий знак) чтобы открыть диалоговое окно «Выбрать избранные параметры поиска». Выберите ответственного врача из списка и нажмите ОК .
Код процедуры содержит	Введите текст запрошенной процедуры полностью или частично. В диалоговом окне «Настройка» эта опция обозначена «Запрошенная процедура».
Рентгенолог	Введите или выберите имя рентгенолога, надиктовавшего исследование, или выберите ..., чтобы открыть диалоговое окно «Выбрать избранные параметры поиска». Выберите рентгенолога из списка и нажмите ОК .
Направивший врач	Введите или выберите имя направившего врача полностью или частично или выберите ..., чтобы открыть диалоговое окно «Выбрать избранные параметры поиска». Выберите направившего врача из списка и нажмите ОК .
Запрашивающий врач	Введите или выберите имя запрашивающего врача полностью или частично или выберите ... (замещающий знак), чтобы открыть диалоговое окно «Выбрать избранные параметры поиска». Выберите запрашивающего врача из списка и нажмите ОК .
Запрашивающая служба	Введите название отделения, запросившего проведение исследования, полностью или частично.
Специальность	Выберите специальность (специализацию исследования) из списка, например «Голова», «Грудная клетка», «Туловище», «Нейро» и т.д.

Критерий	Описание
	Не рекомендуется использовать «Специальность» в качестве критерия поиска в системе IMPAX с несколькими кластерами, в которой центр данных IMPAX Центр данных Data Center выполняет функции центрального архива.
Статус	Выберите статус исследования: <ul style="list-style-type: none"> любое новое начало диктовки стажером надиктовано стажером диктовка началась надиктовано заключение представлено принято <p>Не рекомендуется использовать «Статус» в качестве критерия поиска в системе IMPAX с несколькими кластерами, в которой центр данных IMPAX Центр данных Data Center выполняет функции центрального архива.</p>
Дата исследования	Выберите дату поиска или выберите любой . Если вы выбрали критерий «любой», вам необходимо задать дополнительный, более конкретный критерий поиска. Поиск, диапазон которого не ограничен, не поддерживается. Значения критерия поиска любой , заданные отдельными пользователями, не сохраняются до следующей регистрации, так как возможным поиском с их использованием может дать чрезмерное количество результатов. Если выбран критерий «любой», следующая регистрация в системе возвращает параметру «Дата исследования» значение, заданное используемым по умолчанию.

Критерий	Описание
Номер визита содержит	Введите номер визита в отделение полностью или частично; поиск исследований выполняется по количеству визитов пациента в отделение, включая текущее исследование. В диалоговом окне «Настройка» эта опция обозначена «Номер визита в отделение».