

# IMPAX 6.5.1 Snabbpreferens: Klinikläkare

## Logga in i IMPAX

1. Om inloggningsskärmen inte visas på skrivbordet, dubbelklickar du på genvägen till **IMPAX-klienten**.

Eller välj **Start > Alla program > Agfa IMPAX > IMPAX-klient**.

2. Välj ett annat kluster eller en annan domän.
3. Ange ditt **Användar-ID** och **Lösenord** i IMPAX inloggningssfönster.

I lösenord görs skillnad på små och stora bokstäver. Om Caps Lock är aktivt på ditt tangentbord, kommer ett varningsmeddelande att visas när du klickar i lösenordsfältet.

4. Klicka på **Logga in**.

## Söka efter patienter med funktionen Sök

1. Expandera fältet **Sök** i listområdet genom att klicka på det.

2. Ange patientens namn i Efter- och Förnamnsfältet.

Eller ange **patientens ID** i fältet Patient-ID eller Globalt patient-ID.

3. Välj **Valfritt** från aktuell plats för patienten.
4. Om du vill kan du även välja ett datum att söka på.
5. Klicka på **Sök**.

## Öppna studier från en arbetslista

1. Om du vill öppna studien enbart i textområdet högerklickar du på studien och väljer **Öppna text**.

eller

Högerklicka på studien och välj **Öppna bilder** för att **öppna studiens bilder**. 

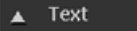
2. Klicka på Relevans för att **öppna relevanta tidigare studier**.

## Ändra skärmformat för en studie

1. Gå till det övre verktygsfältet i bildområdet och klicka på **Välj skärmformat**. 



2. Klicka på knappen för det format du vill använda i Skärmformatmenyn

## Visa textområdet

1. Gå till det övre verktygsfältet i bildområdet och klicka på **Text**. 

2. Klicka på **Text** i textområdet. 

## Visa tidigare rapporter via studielistan

1. Visa textområdet för önskad patient.
2. Om studielistan i textområdet är dold klickar du på det expanderbara fältets pil. 
3. Om studielistan är dold kan du expandera den genom att klicka på fältet **Studielista**.
4. Byt till fliken **Radiologi** om den inte redan visas.
5. Visa en rapport för en tidigare studie genom att enkelklicka var som helst på raden för den tidigare studien.
6. Om du vill stänga studiens bilder men lämna kvar tillhörande text i textområdet klickar du på **Bilder visas**. 

## Visa en rapport

1. Visa textområdet för önskad patient/studie.
2. Gå till textområdet och klicka på fältet **Rapport** och expandera panelen Rapport, om den är dold för att visa rapporten.

3. Om du vill visa en annan rapport för patienten klickar du på en dikterad studie i studielistan.



4. Visa även eventuella nyckelbilder som hör till rapporten.

5. Om rapporterna kommer från IMPAX RIS väljer du lämplig rapporttyv.

6. Om du vill förstora nyckelbilder för du pekaren över bildens vänstra sida tills den ändras till en dubbelriktad pil. Dra nyckelbilderna till önskad storlek.

7. För att öppna nyckelbilden i Bildområdet högerklickar du på den och väljer **Visa**.

## Visa nyckelbilder i textområdet

1. Om rapporten är stängd, tar du fram den genom att klicka på fältet **Rapport** i Textområdet.
2. Om området Nyckelbilder är dolt, klickar du på det expanderbara fältets pil  eller på **Nyckelbilder**. 
3. För att förstora en nyckelbild drar du Nyckelbildernas expanderbara fält till den storlek du önskar.
4. Om du vill öppna en studie som innehåller en nyckelbild i bildområdet dubbelklickar du på nyckelbilden, eller högerklickar på den och väljer **Visa**.

## Kortkommandon: Listområde









För att ...	Tryck på
Öppna Kunskapsdatabasen.	F1

## Kortkommandon: Bildområde

För att ...	Tryck på
Gå till nästa sida, bild eller märkning i studien (beroende på verktyget Gå en sida/bild/märkning i taget)	Page Down *
Navigera till föregående sida, bild eller märkning i studien (beroende på verktyget Gå en sida/bild/märkning i taget)	Page Up *
Navigera till nästa patient i rullningslistan eller nästa öppna patientstudie	Högerpil
Navigera till föregående patient i rullningslistan eller föregående öppna patientstudie.	Vänsterpil
Navigera till den första bilden i serien	Start
Navigera framåt till nästa studie för aktuell patient.	Uppåtpil
Navigera tillbaka till föregående studie för aktuell patient.	Nedåtpil
Navigera till den sista bilden i serien.	Till slutet
Återgå till den första bildrutan vid navigering i scout-skikt.	Start
Förstora bilden inom verktyget Zooma.	Page Up *
Förminska bilden inom verktyget Zooma.	Page Down *
Återgå till ursprunglig förstoring inom verktyget Zooma.	Start
Öka förstoringsglasverktygets förstoring.	Page Up **
Minska förstoringsglasverktygets förstoring.	Page Down **
Återgå till ursprunglig förstoring för förstoringsglasverktyget.	Start
Öppna dialogrutan Anpassa.	F12

För att ...	Tryck på
Öppna IMPAX 6.5.1 Klient Kunskapsdatabas.	F1

## Vanliga verktyg för klinisk granskning

Knapp	Benämning	Använda
	Filmvisning	Visar bilderna för en serie i en kontinuerlig slinga eller bildruta för bildruta
	Väljare för sammansatta layouter	Skriver ut en eller flera studiebilder på film eller papper i en anpassad layout
	Förstoringsglas	Öppnar ett separat fönster där den del av bilden som är direkt under verktyget visas förstord
	Mätsticka	Mäter avståndet mellan två punkter
	Fäst/lossa studier	Fäster en studie så att den fortsätter att vara synlig vid navigering bland andra studier för patienten
	Välj skärmformat	Anger hur bilder, serier och studier ska visas i kolumner och rader på en bildområdesskärm
	Visa hela rapporten	Visar hela rapporten i textområdets Rapportpanel
	Fönsternivå	Ändrar bildens ljusstyrka och kontrast genom att justera fönstrets centerings- och breddvärden och ger tillgång till förinställda fönsternivåvärden

Knapp	Benämning	Använda
	Zooma	Förstorar eller förminskar bilderna stegvis
	Zooma till full skärmstorlek	Förstorar en enda bild till full skärmstorlek