

IMPAX 6.5.1 Snabbpreferens: Radiologer

Logga in i IMPAX

1. Om inloggningsskärmen inte visas på skrivbordet, dubbelklickar du på genvägen till **IMPAX-klienten**.

Eller välj **Start > Alla program > Agfa IMPAX > IMPAX-klient**.

2. Välj ett annat kluster eller en annan domän.
3. Ange ditt **Användar-ID** och **Lösenord** i IMPAX inloggningfönster.


I lösenord görs skillnad på små och stora bokstäver. Om Caps Lock är aktivt på ditt tangentbord, kommer ett varningsmeddelande att visas när du klickar i lösenordsfältet.

4. Klicka på **Logga in**.


Lägga till arbetslistor i listområdet

1. Klicka på **Arbetslistor** i listområdet.
2. I den aktiva kolumnen bredvid arbetslistan, markerar du respektive kryssruta för de arbetslistor du vill visa.
3. Tryck på **Retur** eller klicka på **OK**.


Rulla studier i en arbetslista

1. Klicka på **Auto-rullning** i arbetslistfältet för att **rulla alla eller grupper av studier i en arbetslista**. 
2. För att rulla prioritetsgrupperade studier i en arbetslistahögerklickar du på **Auto-rullning**  i arbetslistfältet och avmarkerar kryssrutorna bredvid respektive prioritetsgruppregel du inte vill rulla studier för. Klicka på **Auto-rullning**.
3. Om du vill rulla specifika studier väljer du dem och högerklickar på **Lägg till rullningslista** eller **Rullning**.

4. Om du vill rulla flera arbetslistor går du till respektive arbetslistfält och klickar på

Auto-rullning. 

Visa wavelet-bilder

1. Gå till listområdes- eller konfigurationsområdesfältet och klicka på menyn Användar-ID. 
2. Kontrollera att **Visa webbilder** är valt.

Synkronisera textområdet med bildområdet

1. Från studieinformationspanelen i bildområdet, ovanför det övre verktygsfältet, klicka på studiens datum/tid eller säkerhetsnummer.


Lägga till nyckelbilder i en rapport

1. Högerklicka på en bild i bildområdet, så att en sammanhangsmeny visas.
2. Välj **Lägg till i nyckelbilder** i sammanhangsmenyn.


Visa en nyligen visad studie


1. Klicka på **Historik** i bildområdet från navigeringsfältet. 
2. Välj namnet på patienten vars studier du vill visa.

Lägga undan en patients studier


1. Klicka på **Lägg undan** vid rullningskontrollen längst ned till vänster i bildområdet. 


Länka serier manuellt

1. Gå till sammanhangsverktygsfältet eller det övre verktygsfältet i bildområdet och högerklicka på **Länka serier**. 



2. Välj kryssrutan **Manuell länk** i menyn Länkpreferenser.
3. Synkronisera respektive serie som ska länkas samman genom att bläddra genom bilderna tills de visar samma anatomiska region.
4. För att länka samman serier manuellt vänsterklickar du på **Länka serie** och väljer de önskade serierna.
5. Notera att texten ändras ("Aktiv serie för länkning" för den markerade serien och "Klicka för att frigöra länk" för en redan länkad serie) och länksymbolen presenteras i det övre vänstra hörnet för att indikera att serien länkats.
6. För att tillämpa ändringar av fönsternivå på alla länkade serier, aktivera fönsternivå över länkade serier.
7. För att tillämpa zoom och panorering på alla länkade serier, aktivera zoom och panorering över länkade serier.
8. Klicka på **Länka serie** för att deaktivera Länkkredigeringsläget och återgå till normal navigation. 

Justera automatiska länkar för patientrörelse


1. Gå till sammanhangsverktygsfältet eller det övre verktygsfältet i bildområdet och vänsterklicka på **Länka serier**. 
2. Vänsterklicka på bilden för den serie som du vill justera.
3. Navigera till platsen i serien som motsvarar den aktuella platsen i de andra serierna i studien.
4. Vänsterklicka på bilden igen för att återlänka serien.

- För att utföra länkändringen väljer du kryssrutan **Ja - länka vid denna nya position.**
- För att ange att du är klar med att justera länkar, vänsterklickar du på **Länka serier.** 

Lägga till en serie med olik referensram till en automatisk länkgrupp

- Gå till sammanhangsverktygsfältet eller det övre verktygsfältet i bildområdet och vänsterklicka på **Länka serier.** 
- Vänsterklicka på den serie som du vill lägga till i den automatiska länkgruppen.
- För att ange att du är klar med att ändra länkar och återgå till normal navigering, vänsterklickar du på **Länka serier.** 

Ställa in fönsternivå med förinställda värden

- Högerklicka på knappmenyn **Fönsternivå** i det övre verktygsfältet i bildområdet och välj det värde du vill använda. 
- Om du använder ett skärmformat som visar flera serier eller studier klickar du på en bild i serien som du vill använda förinställningen för.

Kortkommandon: Listområde

För att ...	Tryck på
Öppna Kunskapsdatabasen.	F1

Kortkommandon: Textområde

För att ...	Tryck på
Kopiera en undervisningsfil eller -mapp	Ctrl + C
Klippa ut en undervisningsfil eller -mapp	Ctrl + X

För att ...	Tryck på
Klistra in en undervisningsfil eller -mapp	Ctrl + V
Ändra namn på en undervisningsfil eller -mapp	F2


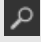
Kortkommandon: Bildområde

För att ...	Tryck på
Gå till nästa sida, bild eller märkning i studien (beroende på verktyget Gå en sida/bild/märkning i taget)	Page Down *
Navigera till föregående sida, bild eller märkning i studien (beroende på verktyget Gå en sida/bild/märkning i taget)	Page Up *
Navigera till nästa patient i rullningslistan eller nästa öppna patientstudie	Högerpil
Navigera till föregående patient i rullningslistan eller föregående öppna patientstudie.	Vänsterpil
Navigera till den första bilden i serien	Start
Navigera framåt till nästa studie för aktuell patient.	Uppåtpil
Navigera tillbaka till föregående studie för aktuell patient.	Nedåtpil
Navigera till den sista bilden i serien.	Till slutet
Återgå till den första bildrutan vid navigering i scout-skikt.	Start
Förstora bilden inom verktyget Zooma.	Page Up *
Förminska bilden inom verktyget Zooma.	Page Down *
Återgå till ursprunglig förstoring inom verktyget Zooma.	Start
Öka förstoringsglasverktygets förstoring.	Page Up **

För att ...	Tryck på
Minska förstoringsglasverktygets förstoring.	Page Down **
Återgå till ursprunglig förstoring för förstoringsglasverktyget.	Start
Öppna dialogrutan Anpassa.	F12
Öppna IMPAX 6.5.1 Klient Kunskapsdatabas.	F1

Vanliga radiologiverktyg

Knapp	Benämning	Användning
	Filmvisning	Visar bilderna i en serie i en kontinuerlig slinga eller bildruta för bildruta
	Rullning	Flyttar automatiskt studier i en arbetslista till bildområdet
	Diktera	Startar diktering för en enstaka studie
	Diktera - flera studier	Startar diktering för två eller flera studier
	Invertera	Inverterar områdena med svart och vitt i en bild
	Inställningstext	Lägger till inställningstext i valfritt format till en bild
	Pilinställning	Skapar en inställningspil som pekar på områden av intresse
	Mätsticka	Mäter avståndet mellan två punkter
	Volymvvy	Startar en serie i Volymvvyfönstret för MIP-, MPR- och (om licens finns) 3D-analys

Knapp	Benämning	Användning
	Fönsternivå	Ändrar bildens ljusstyrka och kontrast genom att justera fönstrets centrerings- och breddvärden och ger tillgång till förinställda fönsternivåvärden
	Zooma	Förstorar eller förminskar bilderna stegvis