

IMPAX 6.5.1 快速参考：乳房影像

登录到 IMPAX

1. 如果没有显示登录屏幕，可在桌面上双击 IMPAX 客户端快捷方式。
或者，选择开始 > 所有程序 > Agfa IMPAX > IMPAX 客户端。
2. 选择不同的集群或域。
3. 在 IMPAX 登录屏幕中，键入您的用户编号和密码。
密码区分大小写。如果键盘上启用了 Caps Lock，单击“密码”字段时将出现一条警告消息。
4. 单击登录。

将工作列表添加到列表区

1. 在“列表”区域中，单击工作列表。
2. 在工作列表旁的“活动”列中，选择每个要显示的工作列表的复选框。
3. 按 Enter，或单击确定。

循环显示工作列表内的检查

1. 要循环显示工作列表中的所有检查或检查组，请在工作列表栏中单击自动循环。
2. 要循环显示工作列表中的优先级分组检查，请在工作列表栏中右键单击自动循环，然后清除每个不想循环其相关检查的优先级分组规则旁的复选框。单击自动循环。
3. 要循环特定检查，选择它们并右键单击添加到循环列表或循环。
4. 要循环显示多个工作列表，请在每个工作列表栏中单击自动循环。

配置乳房影像的复查序列

1. 在“影像”区域顶端工具栏中，右键单击下一比较复查序列。
2. 在 CRM 复查序列列表中，选择要定义的复查序列。

3. 按 F12 或者，从“影像”区顶部工具栏中，单击自定义。
4. 在“自定义”对话框中，切换到比较复查标签。
5. 切换到复查模式标签。
6. 用所需的比较复查模式按所需顺序，排列序列。
7. 在“设置”标签上，要确定左乳房和右乳房的相对方式，可选择左侧和右侧对比。
8. 要确定先前检查和当前检查的相对方式，可选择相同乳房对比。
9. 在“用户设置”标签上，要提醒放射医师存在未查看的 MG 影像，可选择在口述或关闭最近的 MG 检查前进行提示（如果其中包含未查看的影像）。
10. 要保存更改并关闭“自定义”对话框，单击确定。
11. 如果第二种类型的检查（筛选或诊断）需要，重复步骤 1 到 10 配置其它比较复查模式序列。

显示和隐藏乳房造影术 CAD 结构报告标记

1. 要显示 CAD 信息，请在“影像”区的顶端工具栏中单击显示乳房造影术 CAD 结构报告标记。
2. 要隐藏这些标记，请单击隐藏乳房造影术 CAD 结构报告标记。

预留患者的检查

1. 在“影像”区左下角的循环控件旁，单击预留。

显示最近查看的检查

1. 在“影像”区中，从搜索栏中，单击历史记录。
2. 请选择要重新显示检查的患者的姓名。

同步文本区和影像区

1. 在“影像”区检查信息面板中，在顶端工具栏中，单击检查日期/时间或登记号。

向报告中添加关键影像

1. 在“影像”区域中，右键单击某个影像，直至出现上下文菜单。
2. 在上下文菜单中，选择添加到关键影像。

支持的 Genova R2 CAD S/W® CAD 标记

- - 代表亮点聚集（钙化组织）中心
- - 代表最多聚合点的密集区域、辐射线区和代表结构变形的区域
- - 代表包含聚合与钙化的区域。

支持的 iCAD®/Siemens Syngo® 标记

- - 代表亮点聚集（钙化组织）中心
- - 代表最多聚合点的密集区域、辐射线区和代表结构变形的区域
- - 指示乳头位置

键盘快捷键：列表区域

要	按
打开知识库。	F1


键盘快捷键：文本区域

要	按
复制教学文件或文件夹。	Ctrl + C
剪切教学文件或文件夹。	Ctrl + X
粘贴教学文件或文件夹。	Ctrl + V
重命名教学文件或文件夹。	F2



键盘快捷键：影像区域

要	按
导航前进到检查中的下一页、下一个影像，或下一个标签（取决于“前进方式”工具的状态）。	Page Down *
导航回到检查中的前一页、前一个影像，或前一个标签（取决于“前进方式”工具的状态）。	Page Up *
导航前进到循环列表中的下一个患者或者打开患者检查。	右箭头
导航回到循环列表中的前一个患者或者打开患者检查。	左箭头
导航到序列中的第一个影像。	Home
导航前进到当前患者的下一个检查。	上箭头
导航回到当前患者的前一个检查。	下箭头
导航到序列中的最后一个影像。	End
按定位切片导航时返回到第一个帧。	Home
使用“缩放”工具放大影像。	Page Up *
使用“缩放”工具缩小影像。	Page Down *
使用“缩放”工具恢复原始放大率。	Home
增加放大镜工具的放大率。	Page Up **
减少放大镜工具的放大率。	Page Down **
恢复放大镜工具的原始放大率。	Home
打开“自定义”对话框。	F12
打开 IMPAX 6.5.1 客户端 知识库。	F1

常规乳房成像工具

按钮	名称	用途
	1:1 导航器	以一比一像素大小显示乳房影像（屏幕上每个像素代表影像检查设备影像中的一个像素）

按钮	名称	用途
	1:1 导航器下一个	导航到乳房影像的下一个象限
	1:1 导航器前一个	导航到乳房影像的前一个象限
	比较复查序列	在所选比较复查模式中显示乳房影像
	循环	将工作列表中的检查自动移动到“影像”区域
	患者信息布局切换	在默认（临床）患者信息布局、技术布局和投资性患者信息布局间切换
	口述检查报告	启动一个检查的口述
	显示乳房造影术 CAD 结构报告标记	显示或隐藏 Cenova R2 CAD S/W® 或 iCAD®/Siemens Syngo® 乳房造影术影像 CAD 结构报告 标记
	缩放影像以适合	缩放影像使乳房填满可用的查看空间
	反相	交换影像中的黑白区域
	放大镜	将在其下打开一个单独的窗口，放大影像部分
	刻度标记	测量两点间的距离
	椭圆形标记	测量椭圆形区域
	下一比较复查模式	向前移动到为乳房造影检查定义的下一比较复查模式
	成对缩放和平移	放大所有正在查看或堆叠的乳房造影影像，然后以当前的放大率朝相似方向移动影像
	平移	更改影像位置而不更改放大率
	上一比较复查模式	向后移动到为乳房造影检查定义的前一比较复查模式

按钮	名称	用途
	窗宽窗位	通过调整窗口中心值和窗口宽度值更改影像亮度和对比度并提供对预设窗宽窗位值的访问
	1:1 像素缩放	以 1:1 比率显示所选影像，其中 1 影像像素等于 1 屏幕像素，然后能以当前放大率进行移动