

IMPAX 6.5.1 快速参: 急诊室


登录到 IMPAX

1. 如果没有显示登录屏幕，可在桌面上双击 IMPAX 客户端快捷方式。
或者，选择开始 > 所有程序 > Agfa IMPAX > IMPAX 客户端。
2. 选择不同的集群或域。
3. 在 IMPAX 登录屏幕中，键入您的用户编号和密码。
密码区分大小写。如果键盘上启用了 Caps Lock，单击“密码”字段时将出现一条警告消息。
4. 单击登录。


使用搜索功能查找患者


1. 在“列表”区中，单击搜索栏将其展开。
2. 在“姓”、“名”字段，键入患者的姓名。
或者，在“患者编号”或“全局患者编号”字段，键入患者编号。
3. 从“当前患者位置”列表，选择任何。
4. 也可以选择日期进行搜索。
5. 单击搜索。

从工作列表打开检查

1. 要仅在“文本”区域中打开检查，请右键单击该检查并选择打开文本。
或者
要打开检查的影像，请右键单击该检查并选择打开影像。
2. 要打开与检查相关的先前检查，单击关联性。

浏览检查列表中的先前报告

1. 显示感兴趣患者的“文字”区域。
2. 如果在“文字”区域中隐藏了“检查列表”，单击可展开栏的箭头。
3. 如果“检查”面板已折叠，则请单击检查列表栏将其展开。

4. 必要时，切换至放射学标签。
5. 要查看与先前报告相关的报告，请单击先前行中任意位置。
6. 要关闭检查的影像但将其相关文字保留在“文本”区域内，请单击正在查看的影像按钮。

添加自由文本检查批注

1. 显示感兴趣检查的“文本”区域。
2. 滚动到报告面板。
3. 如果不可见，切换到检查批注标签。
4. 在文本框中，键入批注。
5. 要将检查批注转换为私有，单击变为私有。
6. 单击保存。

基于影像检查设备类型插入偏好检查批注

1. 显示感兴趣检查的“文本”区域。
2. 滚动到报告面板。
3. 如果不可见，切换到检查批注标签。
4. 单击偏好检查批注。
5. 在“偏好检查批注”对话框中的“偏好检查批注用于”列表中，选择一个影像检查设备（以查看特定影像检查设备的可用批注）或者选择全部（以查看所有影像检查设备的可用批注）。
6. 选择要插入的批注（使用 Shift 或 Ctrl 键可选择多个偏好批注）。
7. 单击确定。

查看报告

1. 显示感兴趣检查的“文本”区域。
2. 在“文本”区域中，如果“报告”面板已折叠，则请单击报告栏将其展开，然后查看报告。
3. 要查看该患者的另一报告，则请在“检查列表”中单击口述的检查。
4. 也可查看与报告相关的所有关键影像。

5. 如果报告来自 IMPAX RIS，请选择适当的报告视图。
6. 要放大关键影像，请将指针置于关键影像左侧上方，直至指针变为双箭头。将关键影像拖至所需大小。
7. 要在“影像”区域中打开关键影像，请右键单击关键影像，然后选择显示。

键盘快捷键：列表区域







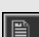
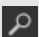
| 要 | 按 |
|--------|----|
| 打开知识库。 | F1 |

键盘快捷键：影像区域

| 要 | 按 |
|--|-------------|
| 导航前进到检查中的下一页、下一个影像，或下一个标签（取决于“前进方式”工具的状态）。 | Page Down * |
| 导航回到检查中的前一页、前一个影像，或前一个标签（取决于“前进方式”工具的状态）。 | Page Up * |
| 导航前进到循环列表中的下一个患者或者打开患者检查。 | 右箭头 |
| 导航回到循环列表中的前一个患者或者打开患者检查。 | 左箭头 |
| 导航到序列中的第一个影像。 | Home |
| 导航前进到当前患者的下一个检查。 | 上箭头 |
| 导航回到当前患者的前一个检查。 | 下箭头 |
| 导航到序列中的最后一个影像。 | End |
| 按定位切片导航时返回到第一个帧。 | Home |
| 使用“缩放”工具放大影像。 | Page Up * |

| 要 | 按 |
|-------------------------|--------------|
| 使用“缩放”工具缩小影像。 | Page Down * |
| 使用“缩放”工具恢复原始放大率。 | Home |
| 增加放大镜工具的放大率。 | Page Up ** |
| 减少放大镜工具的放大率。 | Page Down ** |
| 恢复放大镜工具的原始放大率。 | Home |
| 打开“自定义”对话框。 | F12 |
| 打开 IMPAX 6.5.1 客户端 知识库。 | F1 |

常规临床复查工具

| 按钮 | 名称 | 用途 |
|---|----------|---|
|  | 连续播放查看器 | 以持续循环方式或逐帧方式播放序列影像 |
|  | 合成布局选择器 | 以自定义布局在胶片或纸张上打印一个或多个检查影像 |
|  | 放大镜 | 将在其下打开一个单独的窗口，放大影像部分。 |
|  | 刻度标记 | 测量两点间的距离 |
|  | 固定/未固定检查 | 将检查固定到相关位置，在导航患者的其它检查时可始终看到它 |
|  | 选择屏幕格式 | 定义影像、影像序列和检查在“影像”区监视器中如何组织为列和行 |
|  | 查看整个报告 | 在“文本”区的“报告”面板显示整个报告 |
|  | 窗宽窗位 | 通过调整窗口中心值和窗口宽度值更改影像亮度和对比度并提供对预设窗宽窗位值的访问 |
|  | 缩放 | 以增量方式放大或缩小影像 |
|  | 放大至全屏 | 将一个影像放大到全屏大小 |