

IMPAX 6.5.1 快速参: 骨科


登录到 IMPAX

1. 如果没有显示登录屏幕, 可在桌面上双击 IMPAX 客户端快捷方式。
或者, 选择开始 > 所有程序 > Agfa IMPAX > IMPAX 客户端。
2. 选择不同的集群或域。
3. 在 IMPAX 登录屏幕中, 键入您的用户编号和密码。
密码区分大小写。如果键盘上启用了 Caps Lock, 单击“密码”字段时将出现一条警告消息。
4. 单击登录。


使用搜索功能查找患者

1. 在“列表”区中, 单击搜索栏将其展开。
2. 在“姓”、“名”字段, 键入患者的姓名。
或者, 在“患者编号”或“全局患者编号”字段, 键入患者编号。
3. 从“当前患者位置”列表, 选择任何。
4. 也可以选择日期进行搜索。
5. 单击搜索。

从工作列表打开检查


1. 要仅在“文本”区域中打开检查, 请右键单击该检查并选择打开文本。
或者
要打开检查的影像, 请右键单击该检查并选择打开影像。
2. 要打开与检查相关的先前检查, 单击关联性。

将影像打开到整形外科应用程序窗口


1. 在“影像”区域中, 可使用影像选择工具为术前计划选择多达 20 幅影像。
2. 导航到需术前计划的第一幅影像。
3. 在关联或顶端工具栏中, 单击模板。

4. 单击需术前计划的影像。

显示检查列表中的先前检查

1. 在“文本”区中, 切换到放射学标签。
2. 要显示当前未打开的检查, 单击打开影像。

缩放和平移影像


1. 在“影像”区域顶端工具栏的“缩放”按钮菜单中, 选择缩放。
2. 单击要缩放的影像。
3. 根据需要缩放或平移影像。

将整形外科计划工作导出到 IMPAX


1. 在整形外科“术前计划”窗口, 单击导出到 PACS。



复查整形外科植入物信息

1. 从“影像”区域关联工具条或顶端工具栏中, 单击影像信息。
- 或者, 如果使用关联工具条文本菜单 (Ctrl + 右键单击), 请选择信息 > 影像信息。
2. 单击包含植入物细节的影像。

使用合成布局打印影像

1. 在“影像”区中, 显示要包含在合成布局打印中的全部影像。
2. 在关联工具栏或顶端工具栏中, 单击合成布局选择器。
3. 要在所有页面上打印患者姓名和登记号, 在“合成布局选择器”对话框中, 选择显示文字起头复选框。
4. 要在所有页面上打印页号, 选择包括页号复选框。
5. 要在纸张打印时节省墨粉, 选择纸张打印使用白色背景复选框。
6. 从“布局”列表中, 选择要使用的打印布局。



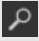
7. 如果打印到 DICOM 胶片打印机, 从“打印机”列表中, 选择要使用的打印机。
8. 如果打印到 DICOM 胶片打印机, 从“预设”列表中, 选择要使用的打印预设值。
9. 导航到要打印的影像, 将指针放在上面, 然后将其拖动到模板的影像元素中。针对要包括在打印中的所有影像, 重复此操作。
10. 要立即打印, 单击打印 (对于胶片打印机) 或者纸张打印。
11. 如果要打印到纸张打印机, 从“Windows 打印”对话框中, 选择打印选项并单击确定。

键盘快捷键: 列表区域

要	按
打开知识库。	F1

常规整形外科工具

按钮	名称	用途
	合成布局选择器	以自定义布局在胶片或纸张上打印一个或多个检查影像
	循环	在工作列表中自动移动检查到影像区
	影像信息	显示患者详细信息和整形外科植入物详细信息并允许您打印信息
	影像选择	选择要在整形外科应用程序中启动的影像
	固定/未固定检查	将检查固定到相关位置, 在导航患者的其它检查时可始终看到它
	选择屏幕格式	定义影像、影像序列和检查在“影像”区监视器中如何组织为列和行

按钮	名称	用途
	模板	将影像打开到整形外科应用程序窗口
	窗宽窗位	通过调整窗口中心值和窗口宽度值更改影像亮度和对比度并提供对预设窗宽窗位值的访问
	缩放	以增量方式放大或缩小影像

要	按
打开 IMPAX 6.5.1 客户端 知识库。	F1

键盘快捷键：影像区域

要	按
导航前进到检查中的下一页、下一个影像，或下一个标签（取决于“前进方式”工具的状态）。	Page Down *
导航回到检查中的前一页、前一个影像，或前一个标签（取决于“前进方式”工具的状态）。	Page Up *
导航前进到循环列表中的下一个患者或者打开患者检查。	右箭头
导航回到循环列表中的前一个患者或者打开患者检查。	左箭头
导航到序列中的第一个影像。	Home
导航前进到当前患者的下一个检查。	上箭头
导航回到当前患者的前一个检查。	下箭头
导航到序列中的最后一个影像。	End
按定位切片导航时返回到第一个帧。	Home
使用“缩放”工具放大影像。	Page Up *
使用“缩放”工具缩小影像。	Page Down *
使用“缩放”工具恢复原始放大率。	Home
增加放大镜工具的放大率。	Page Up **
减少放大镜工具的放大率。	Page Down **
恢复放大镜工具的原始放大率。	Home
打开“自定义”对话框。	F12