

## 登录到 IMPAX

1. 如果没有显示登录屏幕，可在桌面上双击 IMPAX 客户端快捷方式。  
或者，选择开始 > 所有程序 > Agfa IMPAX > IMPAX 客户端。
2. 选择不同的集群或域。
3. 在 IMPAX 登录屏幕中，键入您的用户编号和密码。  
密码区分大小写。如果键盘上启用了 Caps Lock，单击“密码”字段时将出现一条警告消息。
4. 单击登录。

## 将工作列表添加到列表区

1. 在“列表”区域中，单击工作列表。
2. 在工作列表旁的“活动”列中，选择每个要显示的工作列表的复选框。
3. 按 Enter，或单击确定。

## 循环显示工作列表内的检查

1. 要循环显示工作列表中的所有检查或检查组，请在工作列表栏中单击自动循环。
2. 要循环显示工作列表中的优先级分组检查，请在工作列表栏中右键单击自动循环，然后清除每个不想循环其相关检查的优先级分组规则旁的复选框。单击自动循环。
3. 要循环特定检查，选择它们并右键单击添加到循环列表或循环。
4. 要循环显示多个工作列表，请在每个工作列表栏中单击自动循环。

## 查看 wavelet 影像

1. 在“列表”区或“配置”区抽屉式菜单中，单击“用户编号”菜单。
2. 确保选中显示 Web 影像。

## 同步文本区和影像区

1. 在“影像”区检查信息面板中，在顶端工具栏中，单击检查日期/时间或登记号。

## 向报告中添加关键影像

1. 在“影像”区域中，右键单击某个影像，直至出现上下文菜单。
2. 在上下文菜单中，选择添加到关键影像。

## 显示最近查看的检查

1. 在“影像”区中，从搜索栏中，单击历史记录。
2. 请选择要重新显示检查的患者的姓名。

## 预留患者的检查

1. 在“影像”区左下角的循环控件旁，单击预留。

## 手动链接序列

1. 从“影像”区域关联工具条或顶端工具栏中，右键单击“链接序列”。
2. 在“链接首选项”菜单中，选择手动链接复选框。
3. 通过滚动影像同步每个要链接的序列，直到它们与相同的解剖区对应。
4. 要手动将序列链接在一起，左键单击链接序列并选择所需的序列。
5. 注意：文本会发生改变（对于突出显示的序列是“用于链接的活动序列”，而对于已链接的序列是“单击取消链接”）并且链接图标将出现在左上角，指示序列已链接。
6. 要将窗宽窗位调整应用到所有链接的序列中，在链接的序列中启用窗宽窗位调整。
7. 要将缩放和平移应用到所有链接的序列，在链接的序列中启用缩放和平移。
8. 要取消激活链接编辑模式并返回定期导航，单击链接序列。

## 调整患者移动的自动链接

1. 从“影像”区域关联工具条或顶端工具栏中，左键单击链接序列。
2. 左键单击要调整的序列中的影像。
3. 导航到与检查中的其它序列的当前位置对应的序列中的位置。
4. 再次左键单击影像可重新链接序列。
5. 要对链接进行更改，选择是 - 在新位置链接复选框。
6. 要表示您已完成对链接的调整，左键单击链接序列。

## 向自动链接组中添加具有不同参考帧的序列

1. 从“影像”区域关联工具条或顶端工具栏中，左键单击链接序列。
2. 左键单击要添加到自动链接组的序列。
3. 要表示您已完成对链接的修改并将返回定期导航，左键单击链接序列。

## 按预设值调整窗宽窗位

1. 在“影像”区顶端工具栏中，右键单击窗宽窗位按钮菜单并选择要应用的预设值。
2. 如果使用可显示多个序列或检查的屏幕格式，单击序列中要应用预设值的影像。

## 键盘快捷键：列表区域

要	按
打开知识库。	F1

## 键盘快捷键：文本区域

要	按
复制教学文件或文件夹。	Ctrl + C
剪切教学文件或文件夹。	Ctrl + X
粘贴教学文件或文件夹。	Ctrl + V
重命名教学文件或文件夹。	F2

## 键盘快捷键：影像区域

要	按
导航前进到检查中的下一页、下一个影像，或下一个标签（取决于“前进方式”工具的状态）。	Page Down *
导航回到检查中的前一页、前一个影像，或前一个标签（取决于“前进方式”工具的状态）。	Page Up *
导航前进到循环列表中的下一个患者或者打开患者检查。	右箭头
导航回到循环列表中的前一个患者或者打开患者检查。	左箭头
导航到序列中的第一个影像。	Home
导航前进到当前患者的下一个检查。	上箭头
导航回到当前患者的前一个检查。	下箭头
导航到序列中的最后一个影像。	End
按定位切片导航时返回到第一个帧。	Home
使用“缩放”工具放大影像。	Page Up *
使用“缩放”工具缩小影像。	Page Down *
使用“缩放”工具恢复原始放大率。	Home
增加放大镜工具的放大率。	Page Up **
减少放大镜工具的放大率。	Page Down **
恢复放大镜工具的原始放大率。	Home
打开“自定义”对话框。	F12
打开 IMPAX 6.5.1 客户端 知识库。	F1

## 常规放射科工具

按钮	名称	用途
	连续播放查看器	以持续循环方式或逐帧方式播放序列影像
	循环	将工作列表中的检查自动移动到“影像”区域
	口述	启动一个检查的口述
	口述 - 多个检查	启动两个或多个检查的口述
	反相	交换影像中的黑白区域
	标注标记	向影像添加不规则形状的标记文本
	箭头标记	放置指向关注区域的箭头标记
	刻度标记	测量两点间的距离
	卷查看	在“卷查看”窗口启动序列进行 MIP、MPR 和（如果已授权）3D 分析
	窗宽窗位	通过调整窗口中心值和窗口宽度值更改影像亮度和对比度并提供对预设窗宽窗位值的访问
	缩放	以增量方式放大或缩小影像