


IMPAX 6.5.1 管理员: IMPAX 报告中 管理员




配置 IMPAX RIS 客户端

1. 将 TEXTAREA.DISABLE_ONLINE 参数设置为 1。
2. 将 SPEECH.INSTALLED 参数设置为 1。
3. 根据情况设置其它 IMPAX RIS 参数。

将 IMPAX RIS 用户映射到 IMPAX 用户


1. 从配置抽屉式菜单  中, 选择用户和角色。
2. 在导航窗格中, 选择用户。
3. 在详细信息窗格中, 展开用户工具栏。
4. 切换到映射标签。
5. 在 Agfa RIS 用户编号字段, 键入 IMPAX RIS 用户编号。
6. 单击应用。

在 IMPAX 中定义 IMPAX 报告中的口述权限

1. 从配置抽屉式菜单  中, 选择用户和角色。
2. 在导航窗格中, 选择要配置的角色。
3. 在详细信息窗格中, 展开权限工具栏。
4. 选择基于检查标签。
5. 在“权限”下, 从列表中选择一个权限。
6. 从“指定操作”列表中, 选择 PACS 客户端。
7. 在“操作”下选择要分配给检查的权限。


必须选中以放射医师身份口述报告或以住院医师身份口述报告, 用户才能在 IMPAX 客户端上启动新报告。

配置工作站以从 IMPAX RIS 和 IMPAX 数据库检索数据


1. 从配置抽屉式菜单  中, 选择工作站。
2. 将 Internet 工作站容器中的全部工作站拖动到 IMPAX RIS 工作站容器。
3. 选择 IMPAX RIS 工作站容器。

4. 切换到服务访问标签。
5. 从相关的 Web 服务 URL 移除 mvf。

确定打开检查时文本区域显示什么内容

1. 从配置抽屉式菜单  中, 选择首选项。
2. 如果处于“配置”区, 在导航窗格中, 选择角色或用户。
3. 在详细信息窗格中, 展开文本区栏。
4. 切换到行为标签。
5. 在检查有报告下, 选择打开带报告的检查时“文本”区中显示的内容。
6. 如果选择显示报告选项, 必须指定要显示的默认报告类型。
7. 在检查没有报告下, 选择打开不带报告的检查时“文本”区中显示的内容。
8. 如果在步骤 5 和/或 7 中选中了显示扫描或显示 Q&A, 在 *如果扫描或 Q&A 不可用*下, 选择当打开不带扫描或者 Q&A 的检查时, “文本”区中显示的内容。
9. 如果位于“配置”区域, 更改会在切换背景时自动保存。


选择 IMPAX 报告中用于口述

1. 从配置抽屉式菜单  中, 选择首选项。
2. 如果处于“配置”区, 在导航窗格中, 选择角色或用户。
3. 在详细信息窗格中, 展开文本区栏。
4. 在“报告”标签中, 选择 IMPAX Reporting (用于 IMPAX 报告中)。
5. 在数据库字段, 键入 IMPAX RIS 数据库的名称。
6. 要使用 IMPAX 报告中 和嵌入式语音集成, 请选择使用 IMPAX Reporting 创建报告/口述。
7. 如果选中了 IMPAX 报告中 选项, 要使用 Nuance SpeechMagic InterActive 进行在线语音识别, 请



选择使用 SpeechMagic InterActive 进行在线语音识别。

8. 如果位于“配置”区域, 更改会在切换背景时自动保存。

指定现有报告中附录和状态行的位置

1. 从配置抽屉式菜单  中, 选择首选项。
2. 如果处于“配置”区, 在导航窗格中, 选择角色或用户。
3. 在详细信息窗格中, 展开文本区栏。
4. 切换到配置选项标签。
5. 确定新附录将添加到现有报告的哪个位置。
6. 确定附录状态行插入的位置。
7. 如果位于“配置”区域, 更改会在切换背景时自动保存。

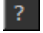
确定配置选项 - IMPAX 报告中

1. 从配置抽屉式菜单  中, 选择首选项。
或者, 从“列表”区或“配置”区栏中, 单击“用户编号”菜单 , 然后选择首选项。
2. 如果处于“配置”区, 在导航窗格中, 选择角色或用户。
3. 在详细信息窗格中, 展开“文本区”栏。
4. 切换到配置选项标签。
5. 要确定“报告”面板中 Microsoft Word 的查看模式, 请选择以下选项之一:
6. 要在创建新报告时用登录用户名填充放射医师字段, 可选择创建新报告时将用户指定到检查复选框。
7. 用户查看报告时要自动显示所有报告注释, 选择在存在报告注释时自动弹出复选框。
8. 要显示标准文本面板, 选择显示标准文本面板复选框。

9. 如果位于“配置”区域，更改会在切换背景时自动保存。

或者，如果在“首选项”对话框中，单击确定。

验证安装与配置 - IMPAX 报告中

1. 打开一个检查。
2. 在详细信息窗格中，展开“文本”区。
3. 要打开“服务”窗口，在“报告”面板中，单击服务窗口。
4. 确保“服务”窗口中的全部项目都标记有 V。

创建签署工作列表

1. 在“列表”区域中，单击工作列表。
2. 在“工作列表库”下的“标准工作列表”中单击新建。
3. 在工作列表名称字段，键入描述工作列表用途的名称。
4. 在工作列表类型列表中，选择签署工作列表。
5. 切换到组织标签并在角色层级中选择工作列表的位置。
6. 切换到医师标签并选择使用此工作列表签署报告的放射医师（使用 Shift + Ctrl 键）。
7. 单击确定。

创建代理签署工作列表

1. 在“列表”区域中，单击工作列表。
2. 在“工作列表库”下的“标准工作列表”中单击新建。
3. 在工作列表名称字段，键入描述工作列表用途的名称。
4. 在工作列表类型列表中，选择签署工作列表。
5. 切换到组织标签并在角色层级中选择工作列表的位置。
6. 切换到医师标签并选择代理签署复选框。
7. 选择代理签署工作列表应用到的放射医师。
8. 单击确定。

向列表区添加提供工作列表按钮

1. 在“列表”区，右键单击“向导”工具栏并选择新建。

2. 在“向导”对话框的向导名称字段，键入新的提供向导的名称。
3. 在显示文本字段，键入向导按钮上要显示的文本。
4. 在工具提示字段，键入指针放置在向导按钮上时显示的解释性文本。
5. 在脚本字段，键入（或者从示例脚本复制并粘贴）要运行的脚本。
6. 为确保脚本语法正确，单击测试。
7. 结束后，单击确定。