

使用搜索功能查找检查

1. 在“列表”区中，单击搜索栏将其展开。
2. 要显示其他搜索条件字段，右键单击以访问“配置”对话框。
3. 要缩小搜索范围，请键入或选择搜索选项。
4. 通过选择将结果添加到上一搜索复选框，也可以将这些结果添加到以前的搜索结果中。
5. 如有必要，选择不同的搜索位置。
6. 单击搜索。

使用搜索功能查找患者

1. 在“列表”区中，单击搜索栏将其展开。
2. 在“姓”、“名”字段，键入患者的姓名。
或者，在“患者编号”或“全局患者编号”字段，键入患者编号。
3. 从“当前患者位置”列表，选择任何。
4. 也可以选择日期进行搜索。
5. 单击搜索。

选择搜索日期范围

1. 从日期条件列表中，选择在前...内或早于。
2. 在“搜索”对话框中，键入或选择数字。
3. 要在小时、天、周、月或年之间切换，可单击“单位”按钮。
4. 单击确定。

搜索特定日期的检查

1. 在搜索或高级搜索中，从日期条件列表中选择任何日期、今天或者昨天。
或者
选择精确匹配。在“搜索”对话框中，单击列表箭头。在“日历”中，导航到并单击所需日期。单击确定。

在日期范围内进行搜索

1. 从日期条件列表中，选择期间。
2. 在“搜索”对话框中，选择从列表并且在“日历”中，单击所需日期。
3. 选择至列表并在“日历”中，单击所需日期。
4. 单击确定。

向之前的搜索添加搜索结果

1. 要缩小搜索范围，请键入或选择搜索选项。
2. 单击搜索。
3. 根据需要，更改搜索选项。
4. 在“搜索”区中，选择将结果添加到上一搜索复选框。
5. 再次单击搜索。

配置搜索

1. 在“搜索”结果中，右键单击列标题。
2. 右键单击列标题可显示“自定义”选项板。
3. 如有必要，添加或删除列。
4. 如有必要，重新排序列。
5. 要禁用自动调整列大小，可清除自动调整大小复选框。
6. 完成后，关闭“自定义”对话框。

搜索提示

- 在搜索值中使用通配符 * (星号) 可增加返回正确结果的可能性。例如，在全局患者编号中输入 4*3 将返回其 ID 以 4 开头并同时含有 3 的所有患者。通配符既可以在字符串的开头，也可以在字符串中间。“搜索”会自动在搜索条件的结尾放置一个星号。
- 您的系统管理员可设置显示检查的最大数量。如果找到的检查数 (如“搜索”栏中指示) 大于该数值，请缩小搜索限制并再次搜索。

- 不允许执行无约束条件的搜索。如果在“检查日期”中选择任何，则还必须选择另一特定标准才能进行搜索。
- 如果要执行更为复杂的搜索，请联系 PACS 管理员以获取使用“高级搜索”的许可。
- 右键单击“检查列表”中的查找其它检查链接，可手动查询企业。

搜索选项

条件	叙述
登记号	键入与该患者相关联的检查登记号。
身体部位	选择要执行检查的身体部位或者选择任何。
批注包含	键入检查批注的任何部分。 在“配置”对话框中，此选项标记为“检查批注”。
当前患者位置	键入或选择患者的当前位置，或者选择编辑... 打开“编辑偏好搜索项目”对话框。从列表中选择当前患者位置，然后单击确定。
部门	键入或选择执行检查的部门，或选择... (省略号) 打开“选择搜索偏好”对话框。从列表中选择科室，然后单击确定。
说明包含	键入检查描述的任何部分。 在“配置”对话框中，此选项标记为“检查描述”。
全局患者编号	键入全部或部分全局患者编号。一个患者在企业的不同信息系统中可具有多个患者编号。全局患者编号通过提供对于患者始终不变且永远不会用于其他患者的标识符来连接多个患者编号。
机构	选择执行检查的医疗机构的名称，或者选择... (省略号) 打开“偏好”对话框。从列表中选择医疗机构，然后单击确定。
关键影像标题	从列表键入或选择包含关键影像的“关键影像文档标题”。
关键词	从列表键入或选择一个已与检查关联的关键词。
影像检查设备	选择要搜索的影像检查设备类型或选择任何。 在多个 IMPAX 集群配置中 (其中 IMPAX Data Center 充当中央档案)，不要使用“影像检查设备”作为搜索选项。

条件	叙述
操作者	键入执行该检查的操作员的完整或部分姓名。
其它患者编号	键入全部或部分备选的患者编号。
患者年龄	选择采集检查时患者的年龄。在“条件”对话框中，指定参数，然后单击确定。要在“小时”、“天”、“周”、“月”和“年”之间切换，可单击单位按钮。 在“配置”对话框中，此选项标记为“采集时患者年龄”。
患者生日	键入日期或从日历中选择要在其搜索的日期，或者选择任何日期。以红色突出显示的文本表示无效日期格式。 注意，如果选择了“任何日期”，则还必须选择另一特定条件才能进行搜索。不允许执行无约束条件的搜索。
患者历史记录包含	键入全部或部分患者历史记录信息。 在“配置”对话框中，此选项标记为“附加病史”。
患者编号	键入“患者编号”。
患者姓、名	键入患者的全部或部分姓名。 在“配置”对话框中，此选项标记为“患者姓名”。
患者性别	任何、男性、女性、其他
检查医师	键入或选择执行医师的全部或部分姓名，或者选择...（省略号）打开“选择搜索偏好”对话框。从列表中选择执行医师，然后单击确定。
程序代码包含	键入全部或部分申请程序的文本。 在“配置”对话框中，此选项标记为“申请的程序”。
放射医师	键入或选择口述检查的放射医师的全部或部分姓名，或者选择... 打开“选择搜索偏好”对话框。从列表中选择放射医师，然后单击确定。
经管医师	键入或选择经管医师的全部或部分姓名，或者选择... 打开“选择搜索偏好”对话框。从列表中选择经管医师，然后单击确定。
申请医师	键入或选择申请医师的全部或部分姓名，或者选择...（省略号）打开“选择搜索偏好”对话框。从列表中选择申请医师，然后单击确定。
申请服务	键入请求检查的科室的全部或部分名称。
专科	从列表选择一个专科，如头、胸、躯干、神经等。 在多个 IMPAX 集群配置中（其中 IMPAX Data Center 充当中央档案），不要使用“专科”作为搜索选项。
状态	选择检查的状态：

条件	叙述
	<ul style="list-style-type: none"> • 任何 • 新 • 实习医师口述已开始 • 实习医师已口述 • 口述已开始 • 已口述 • 已报告 • 已审核 <p>在多个 IMPAX 集群配置中（其中 IMPAX Data Center 充当中央档案），不要使用“状态”作为搜索选项。</p>
检查日期	选择要搜索的日期范围，或选择任何。如果选择“任何”，则还必须选择另一特定条件才能进行搜索。不允许执行无约束条件的搜索。 任何搜索条件不会被保存用于同一用户的再次登录，因为该条件可能会返回过多的搜索结果。如果选择“任何”，下次登录时，“检查日期”会显示默认值。
就诊编号包含	键入全部或部分科室就诊编号，这会根据患者访问科室的次数（包括当前检查的时间）来查找检查。 在“配置”对话框中，此选项标记为“科室就诊编号”。